

# Draps de glisse et de rehaussement ReadySlide

## Pour simplifier le rehaussement et / ou la translation



Ces draps sont réalisés dans un tissu à ultra faible coefficient de friction ULF®, pour aider la réalisation de la quasi totalité des besoins en transferts hospitaliers ou dans les établissements comme les centres ou les EHPAD.

Avec nos draps de glisse il est aisé de réaliser une translation de transfert à l'aide du modèle en 195 cm. Notre drap de glisse 11235 en 90 x 110 cm est le drap qui sera le plus adapté pour le rehaussement du patient alité, à un ou deux aidants. Avec notre petit drap polyvalent réf. 11250 en 70 x 70 cm, c'est la mobilisation, le passage de et vers le fauteuil et le réhaussement qui seront facilités.



### Le rehaussement



On latéralise le patient pour placer le drap de glisse plié en deux, de manière à ce qu'il couvre les points d'appui tête / épaules / bassin.

NB : quand cela est possible, activer le patient en lui demandant de tourner le regard et la tête vers soi, ce qui enclenche la latéralisation.

Déplier le drap de glisse sous le patient en enfonçant la main à plat dans le matelas, puis en saisissant la partie inférieure du drap le déplier avec douceur vers soi en plusieurs fois. Maintenir la partie opposée pour garder le drap en place.



Fléchir une jambe du patient, et avec une main à plat sur l'arrière de la cuisse et une main sur les avant-bras croisés, pousser avec douceur le patient vers le haut du lit. Avec les lits électriques, on doit se servir des fonctions du lit, pour réhausser en ayant le moins d'effort possible à fournir.

### Astuce produit: mise en place de sangles de levage



Placer un drap de glisse plié en deux, derrière les épaules, partie «ouverte» vers le haut du lit, partie pliée derrière les épaules, et ramener la partie avant sur les épaules. Glisser la sangle dans le creux formé par le drap de glisse, et la mettre en place en tirant un côté après l'autre vers le bas. Enlever le drap en glissant la main à l'intérieur, sous les lombaires, en tirant plusieurs fois la partie inférieure.



Placer un drap de glisse plié en deux derrière les épaules du patient et le laisser tomber sur ses épaules.

Glisser la sangle dans le pli du drap de glisse et la descendre le plus bas possible sans effort.

Passer les parties jambes sous les cuisses du patient et procéder au levage.

**Nos draps de glisse, réduisent les efforts nécessaires pour réaliser des rehaussements, des translations et pour la mise en place de positionneurs. Ils servent aussi pour latéraliser les patients et les toilettes et soins.**



**Pour rehausser :** pour remonter plus facilement les patients "enfoncés" dans leur matelas.



Les manipulations se feront : seul, à 2 soignants ou avec un deuxième produit.



**Pour latéraliser :** mise en place de positionneur, toilette, ...

## La latéralisation



Une fois le drap placé sous le patient (voir rehaussement), quand c'est possible lui demander de tourner la tête vers la barrière, et de la saisir. La main bien à plat, ramener légèrement le bassin/hanche du dessus vers soi tout en poussant celle du dessous. Le patient pivotera alors sans effort. Placer alors une cale, de type multi-usage devant référence MEM90, ou le modèle MEM80 derrière pour un décubitus latéral à 30°.



Gestion du temps, des T.M.S, du confort du patient : **aménagement du poste de travail**

## Draps de glisse U.U. EasySlide Disposable

Draps de transfert à usage ou patient unique



EasySlide Disposable en rouleaux, un drap de glisse à usage ou patient unique incroyablement versatile pour une utilisation de courte durée.

Il répond à la quasi totalité des besoins en transferts hospitaliers ou dans les établissements, comme les centres et les EHPAD.

Un conditionnement en rouleau pour choisir la dimension suivant le besoin. Le rouleau avec dévidoir contient jusqu'à 60 EasySlide individuels, donc avec un carton de 2 rouleaux (120) on peut réaliser un maximum de transferts.

Les avantages des EasySlide Disposable :

- une bonne glisse pour des transferts faciles
- guide d'utilisation imprimé sur le produit
- des formats à la demande
- un maximum d'hygiène



### Un format facile à utiliser

Les EasySlide Disposable sont livrés dans un distributeur plastique hygiénique et pratique.



Les EasySlide Disposable peuvent aussi s'utiliser pour protéger une planche ou un matelas souple.

### Références - Désignations - Spécifications

20400	EasySlide Disposable - présentoir plastique	50 x 70 cm	2 rouleaux
11210	ReadySlide drap de glisse	195 x 70 cm	en tissu ULF
11230	ReadySlide drap de glisse	110 x 70 cm	en tissu ULF
11250	ReadySlide drap de glisse	70 x 70 cm	en tissu ULF
11235	ReadySlide drap de glisse	90 x 110 cm	en tissu ULF
11245	ReadySlide drap de glisse	110 x 130 cm	en tissu ULF

