



NETTOYAGE THERMO-CHIMIQUE NEUTRE ET DÉSINFECTION POUR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES INSTRUMENTS

Anios NDT

**NETTOYANT DÉSINFECTANT DES INSTRUMENTS
MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX ET DES DISPOSITIFS
MÉDICAUX, ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION EN
LAVEURS-DÉSINFECTEURS DE L'INSTRUMENTATION,
EN TUNNELS ET CABINES DE LAVAGE**

- Excellente compatibilité avec les matériaux: compatible avec une large gamme d'instruments chirurgicaux
- Fonction polyvalente: nettoyant et désinfectant conçu pour être utilisé dans tout type de machine, tunnel ou cabine de lavage



Anios NDT

Nettoyant désinfectant des instruments médicaux et chirurgicaux et des dispositifs médicaux, adapté pour une utilisation en Laveurs-Désinfecteurs de l'Instrumentation, en tunnels et cabines de lavage



Anios NDT
Bidon de 5 L



Anios NDT
Bidon de 10 L

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide limpide incolore
- Densité à 20°C: env. 1,0
- pH du produit pur à 20°C: 2,0
- pH du produit dilué :
 - 0,1 % en eau de réseau : 4,3
 - 0,5 % en eau de réseau : 3,8
 - 1 % en eau de réseau : 3,5
 - 2 % en eau de réseau : 3,2
- Conductivité de la solution diluée:
 - 0,1 % = 35 µs/cm
 - 0,5 % = 105 µs/cm
 - 1 % = 210 µs/cm
 - 2 % = 390 µs/cm
- Valeurs de viscosité: < 10 mPa/s

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

ACTIVITE/CONDITIONS	CONCENTRATION	TEMPS DE CONTACT	TEMPÉRATURE
Bactéricide - Selon EN 13727 et EN 14561, conditions de saleté	0,5 %	5 min	55°C
Levuricide - Selon EN 13624 et EN 14562, conditions de saleté	0,1 %	5 min	55°C
Fongicide - Selon EN 13624 et EN 14562, conditions de saleté	1,0 %	10 min	55°C
Efficace sur virus enveloppés - Selon EN 14476/EN 17111, conditions de saleté	1,0 %	15 min	20°C
Mycobactéricide - Selon EN 14348/EN 14563, conditions de saleté	2,0 %	10 min	60°C

INFORMATION

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Anios NDT	2 bidons de 5 L	3154.0382J
Anios NDT	1 bidon de 10 L	3154.0242J
Anios NDT	1 bidon de 20 L	3154.2712J
Anios NDT	1 fût de 200 L	3154.331FA
Anios NDT	1 fût de 1000 L	3154.004FA



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France



An Ecolab Company

www.anios.com

INDICATIONS

Liquide pour le nettoyage thermochimique et la désinfection des instruments médicaux et chirurgicaux avant stérilisation et des dispositifs médicaux tels que les lits médicalisés, les chariots, les récipients, les tables de chevet et les tables du bloc opératoire dans toutes les machines à laver courantes, pour tous les articles pouvant être lavés en machine.

MODE D'EMPLOI

Solution concentrée. S'utilise lors du retraitement automatique des dispositifs médicaux dans des laveurs désinfecteurs, des tunnels de lavage et des cabines de lavage. Dilution à 0,5 % à 2 % de préférence dans de l'eau tiède ou chaude, selon le type de machine. Respecter les concentrations et le temps de contact requis. Cycle de rinçage à l'eau courante requis. Vérifier la compatibilité du dispositif avant utilisation. Dossier scientifique (efficacité, compatibilité...) disponible sur demande.

COMPOSITION

N, N-didecyl-N. Chlorure de didécyl diméthylammonium. Agents dispersants et séquestrants. Agents anti-mousse.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi (élaboré selon les règles européennes en vigueur concernant la classification et l'étiquetage des produits chimiques). Stockage: entre +5°C et +25°C.

CERTIFICATS

Dispositif médical. L'activité antimicrobienne complète d'ANIOS NDT est incluse dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS.