

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOUCHETTE	FILTRANIOS 31 LPS+	FILTRANIOS 31 DS+	FILTRANIOS 2MS	FILTRANIOS 62 LPS+
MEMBRANES DE PRÉFILTRATION	Polypropylène 3 µm avec gradient de densité "effet entonnoir" de 10 µm à 3 µm		Polypropylène 1 µm avec gradient de densité "effet entonnoir" de 5 µm à 1 µm	
MEMBRANE DE FILTRATION	Polyéthersulfone asymétrique 0.2 µm	Asymétrique en PES 0.2 µm + Asymétrique en PES 0.1 µm	Polyéthersulfone asymétrique 0.2 µm + Polyéthersulfone asymétrique 0.1 µm	Polyéthersulfone asymétrique 0.2 µm
COUCHES SUPPORT ET DRAINAGE	Polypropylène			
CORPS DE FILTRE	Polypropylène			
SURFACE EFFECTIVE DE FILTRATION (SEF)	711 cm² (conception "plissage multi-hauteur")	547 cm² (conception "plissage multi-hauteur")		711 cm² (conception "plissage multi-hauteur")
DÉBIT DE FILTRATION	13 litres/minute à 3 bar	7 litres/minute à 3 bar	7 litres/minute à 3 bar	13 litres/minute à 3 bar
CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION	5 bar à 45°C			
RÉSISTANCE THERMIQUE	310 cycles de 7 min à +45°C à 5 bar + 4 cycles de 60 min à +60°C à 5 bar + 1 cycle de 30 min à +90°C à 3 bar	124 cycles de 7 min à +45°C à 5 bar + 4 cycles de 60 min à +60°C à 5 bar + 1 cycle de 30 min à +90°C à 3 bar	248 cycles de 5 min à +45°C à 5 bar + 8 cycles de 60 min à +60°C à 5 bar + 2 cycles de 30 min à +90°C à 3 bar	620 cycles de 7 min à +45°C à 5 bar + 8 cycles de 60 min à +60°C à 5 bar + 2 cycles de 30 min à +90°C à 3 bar
RÉSISTANCE CHIMIQUE	Chlore actif : > 1000 ppm à +40°C pendant 31 jours - APA : 250 ppm à +40°C pendant 31 jours	Chlore actif : > 1000 ppm à +40°C pendant 31 jours - APA : 250 ppm à +40°C pendant 31 jours	Chlore actif : 150 ppm - 18 cycles de 30 min à +40°C et 3 bar	Chlore actif : 150 ppm - 10 cycles de 30 min à +40°C et 3 bar
PRESSIION D'ÉCLATEMENT	à +60°C : > 11 bar	à +60°C : > 10 bar	à +60°C : > 12 bar	à +60°C : > 22 bar
DIMENSIONS	Long. : 222 mm - Haut. : 68 mm ø douchette : 81 mm	Long. : 223 mm - Haut. : 68 mm ø douchette : 81 mm		Long. : 222 mm - Haut. : 68 mm ø douchette : 81 mm
POIDS	138 grammes	144 grammes	154 grammes	137 grammes

BOÎTIER FILTRE	FILTRANIOS 30 LP A	FILTRANIOS 31 DA+	FILTRANIOS 2M
MEMBRANES DE PRÉFILTRATION	Polypropylène 1 µm avec gradient de densité "effet entonnoir" de 5 µm à 1 µm		
MEMBRANE DE FILTRATION	Polyéthersulfone asymétrique 0.2 µm	1 membrane asymétrique en PES à 0.2 µm 1 membrane asymétrique en PES à 0.1 µm	Polyéthersulfone asymétrique 0.2 µm + Polyéthersulfone asymétrique 0.1 µm
COUCHES SUPPORT ET DRAINAGE	Polypropylène		
CORPS DE FILTRE	Polypropylène		
SURFACE EFFECTIVE DE FILTRATION (SEF)	415 cm² (conception "plissage standard")	547 cm² (conception "plissage multi-hauteur")	547 cm² (conception "plissage multi-hauteur")
DÉBIT DE FILTRATION	6.3 litres/minute à 3 bar	6 litres/minute à 3 bar	7 litres/minute à 3 bar
CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION	5 bar à 45°C	5 bar à 45°C	5 bar à 45°C
RÉSISTANCE THERMIQUE	2500 cycles de 5 min à +66°C à 6.2 bar	620 cycles de 5 min à +45°C à 5 bar + 4 cycles de 60 min à +60°C à 5 bar + 1 cycle de 30 min à +90°C à 3 bar	1240 cycles de 5 min à +45°C à 5 bar + 8 cycles de 60 min à +60°C à 5 bar + 2 cycles de 30 min à +90°C à 3 bar
RÉSISTANCE CHIMIQUE	Chlore actif : > 1000 ppm à 40°C pendant 31 jours - APA : 250 ppm à 40°C pendant 31 jours		Chlore actif : 150 ppm - 18 cycles de 30 min à +40°C à 3 bar APA : 250 ppm - 18 cycles de 30 min à +40°C à 3 bar
PRESSIION D'ÉCLATEMENT	à +50°C : >20 bar	à +60°C : >11 bar	à +60°C : >13 bar
DIMENSIONS	Haut. : 65 mm ø boîtier : 76 mm - ø douchette : 54 mm	Haut. : 65 mm (droite) - 62 mm (douchette) ø boîtier : 76 mm - ø douchette : 54 mm	Haut. : 65 mm (droite) - 63 mm (douchette) ø boîtier : 76 mm - ø douchette : 54 mm
POIDS	100 grammes	105 grammes	117 grammes

SÉLECTION FILTRES

LA FILTRATION DE L'EAU EN TOUTE SÉCURITÉ

FILTRANIOS TOUS GERMES
FILTRANIOS LEGIONELLE
31 JOURS / 62 JOURS



1 rue de l'Espoir - 59260 Lezennes - FRANCE
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 67 67 68
www.anios.com



UN CONCEPT "SÉCURITÉ ABSOLUE"



TRAÇABILITÉ TOTALE



Étiquette de traçabilité sur le sachet, permettant de documenter le cahier de traçabilité.




Informations sérigraphiées sur le filtre pour une traçabilité absolue et unique : référence du filtre, désignation, n° de lot, n° de série individuel, code-barres 2D avec n° de lot et n° de série (usage usine).




2 étiquettes de traçabilité sur le filtre avec code-barres et n° de logistique unique. Seules les dates de mise en service et d'élimination sont à renseigner.

UN CONCEPT UNIQUE

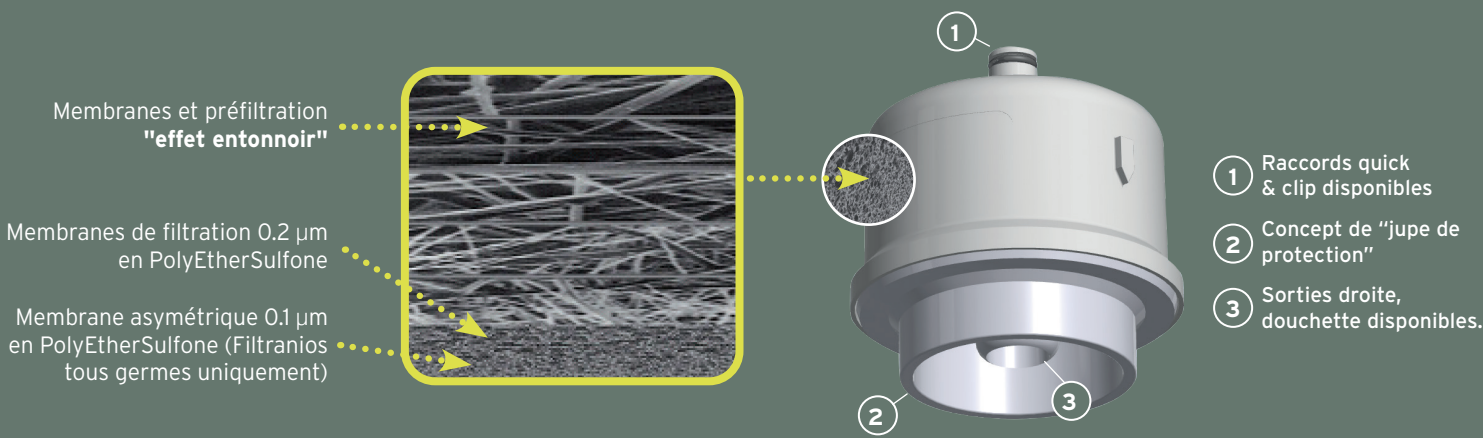

PLISSAGE DES MEMBRANES DE PRÉ-FILTRATION ET DE FILTRATION.

- La séparation des couches de filtration permet de collecter une plus grande masse de contaminants.
- L'asymétrie des membranes, dont la structure est plus aérée sur la face amont (1 µm) que sur la face aval (0,2 µm), prolonge la durée de vie du filtre et améliore la rétention des contaminants et le débit par rapport à une structure symétrique.
- Dans de nombreux cas (en fonction de la qualité d'eau), l'utilisation d'un système de préfiltration en amont n'est plus nécessaire.

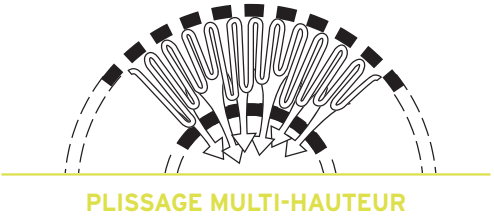

ÉCO-CONCEPTION



- Compacts et recyclables, les FILTRANIOS offrent une conception monobloc attractive avec peu de composants.
- Légers, les FILTRANIOS peuvent bénéficier d'une revalorisation sur site pour limiter leur impact sur l'environnement.
- Optimisation du poids des filtres : moins de matériaux transformés, quantité de déchets limitée.
- Les FILTRANIOS sont conçus sans additifs indésirables (dérivés Epoxy, Bisphénol A (PBA), Dioxine, Latex, Lactose, Phtalate (DEHP), Plastifiants, Gluten, Amiente, Polychlorobiphényles (PCB), Mélamine).
- Réduction du volume de suremballage : le volume des emballages est optimisé pour limiter l'impact environnemental du transport.

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE VALIDÉ

- Validé selon la norme ASTM F 838 "challenge bactérien" sur Brevundimonas diminuta : grade stérilisant à 0,2 µm de la membrane.
- Validé sur la période d'utilisation (31 ou 62 jours) selon la norme ASTM F 838 (challenge bactérien) sur Legionella pneumophila.
- Validé sur la période d'utilisation (31 ou 62 jours) selon la norme ASTM F 838 (challenge bactérien) sur Brevundimonas diminuta (uniquement pour les Filtranios tous germes).
- Compatible avec les procédures de traitements thermiques appliquées à l'hôpital : +60°C, +70°C et +90°C.
- Compatible avec les procédures de traitements chimiques appliquées à l'hôpital : chlore, acide peracétique.
- Matériaux utilisés conformes aux règlements CE 1935/2004 et CE 10/2011 relatifs aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

RÉFÉRENCES

TOUS GERMES	Raccord Clip	Références	Durée
	Sortie douchette	432.173 FILTRANIOS 31 DA+	1 mois
	Sortie droite	432.177 FILTRANIOS 31 DA+	1 mois
	Sortie clip	432.180 FILTRANIOS 31 DA+	1 mois
	Sortie douchette	432.513 FILTRANIOS 2M	2 mois
	Sortie droite	432.514 FILTRANIOS 2M	2 mois
	-	432.515 FILTRANIOS 2MS	2 mois
	-	432.175 FILTRANIOS 31 DS+	1 mois

SPÉCIFIQUE LÉGIONNELLE	Raccord Clip	Références	Durée
	Sortie fileté 1/2	432.421 FILTRANIOS 30 LP A	1 mois
	-	432.176 FILTRANIOS 31 LPS+	1 mois
	-	432.516 FILTRANIOS 62 LPS+	2 mois