

ÉLECTROSTIMULATEUR PERINEAL INNOVO®

INNOVO



Indications :

- Indiqué dans le renforcement et la rééducation des Muscles du Plancher Pelvien (MPP), dans le traitement à domicile de l'incontinence urinaire d'effort, par impériosité ou mixte.

Propriétés :

- La technologie Innovotherapy envoie des signaux multidirectionnels via 8 électrodes placées à l'intérieur du short Innovo®, permettant de contracter l'ensemble des muscles du plancher pelvien
- Certifié CE 0086.

Contre-indications :

- Ne doit pas être utilisé en cas de : port de stimulateurs cardiaques / grossesse / cardiopathie suspectée ou avérée, sans consultation préalable d'un médecin / dispositif métallique implanté dans la zone abdominale ou pelvienne / épilepsie / dénervation périphérique totale du plancher pelvien / proximité immédiate (inférieure à 1 m) avec appareils à hautes fréquences et à ondes courtes.

Mode d'emploi :

- En traitement : 30 min/jour, 5 jours par semaine maximum, 4 à 12 semaines suivant la pathologie.
- En prévention et entretien : pour conserver un bon tonus musculaire et éviter les problèmes futurs (un relâchement, des fuites urinaires ou une descente d'organes) : 30 minutes, 1 à 2 fois par semaine.

Contient :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| - 1 unité de contrôle | - 1 chargeur |
| - 1 short + 1 spray ou 2 cuissières | - 1 tour de cou |
| - 8 électrodes (selon modèle) | - 1 câble de branchement |