

Description/indication

La sonde externe auto-adhésive pour homme est conçue pour gérer l'incontinence urinaire de l'homme adulte.

Contre-indication

Ne pas utiliser sur une peau irritée ou fragilisée.

Précautions

Ne pas utiliser en cas de réaction allergique ou si le patient a des allergies connues aux composants du dispositif. Pour une bonne hygiène, changer la sonde tous les jours. L'utilisation d'un même dispositif pendant plus de 24 heures peut augmenter le risque de complications. Suivre les instructions pour le retirer en cas d'enflure, d'engourdissement, d'inconfort, de douleur, de décoloration ou d'apparence anormale.

Veuillez lire l'intégralité de la notice fournie avec le dispositif médical avant son utilisation.

Les étuis péniens Spirit® sont des dispositifs médicaux réservés à un usage urologique. Pour un bon usage, se référer aux instructions d'utilisation. Dispositif médical Classe I (MDR 2017/745), Fabricant : C.R.Bard, Inc. Dispositif pris en charge par l'assurance maladie.

Les poches à urine Spirit® sont des dispositifs médicaux réservés à un usage urologique. Pour un bon usage se référer à la notice d'utilisation. Dispositif médical de classe I non stérile (MDR 2017/745) ou de classe I stérile (Dir 93/42/CEE), CE0123 Fabricant Conod Medical Co., Limited. Dispositif pris en charge par l'assurance maladie. Édition Mai 2023.

CE CE
0123

BD, 11 rue Aristide Bergès, 38800 Le Pont-de-Claix, France
Tél : 04 76 68 36 36

bd.com/fr

BD, le logo BD et Spirit sont des marques déposées de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. ©2023 BD. Tous droits réservés. Becton Dickinson France au capital de 64 719 915€ / RCS Grenoble B 056 501 711 / Siret 056 501 711 00115. BD-71834. Mai 2023



7566 - pro/G www.pro-g.eu



Spirit®

Etui pénien, votre guide pratique

Engagé pour la santé de demain.



Comment bien appliquer votre étui pénien **Spirit®** en toute sécurité ?



1

Munissez-vous de la bonne taille

Munissez-vous de votre périmètre et mesurez le diamètre de votre pénis à l'endroit le plus large afin de trouver la taille qui vous convient.



2

Rasez-vous les poils pubiens

Lavez-vous toujours les mains avant de commencer. Rasez tous les poils pubiens qui pourraient être en contact avec l'adhésif de l'étui pénien.



3

Nettoyez votre pénis

Nettoyez votre pénis avec du savon doux. Rincez puis essuyez soigneusement afin que l'adhésif de l'étui pénien adhère parfaitement à votre pénis.



4

Appliquez votre étui pénien **Spirit®**

Ouvrez l'emballage. Si l'étui pénien comprend une coque, retirez là et placez l'étui pénien sur l'extrémité de votre pénis. Déroulez l'adhésif délicatement sur votre pénis. Pressez avec précaution l'étui afin qu'il puisse bien adhérer à la peau.



5

Sélectionnez votre poche à urine

Sélectionnez votre poche de jambe Spirit® en fonction de la contenance et de la longueur de tubulure souhaitée. Pour plus de sécurité, vous pouvez également sélectionner une poche 2 L Spirit® pour la nuit.



6

Raccordez votre étui à votre poche à urine

Saisissez-vous de votre poche à urine et accrochez là. N'hésitez pas à couper la longueur de la tubulure pour un meilleur confort. Insérez le connecteur de la poche à l'embout de l'étui pénien.



7

Durée d'utilisation

La durée d'utilisation d'un étui va dépendre d'un patient à un autre. Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de changer votre étui pénien au minimum toutes les 24 h.




8

Retirez le collecteur d'urine puis l'étui pénien

Vidangez votre poche à urine, vérifiez qu'elle soit bien fermée, puis déconnectez la poche de l'étui. Déroulez délicatement l'étui pénien vers l'extrémité de votre pénis pour l'enlever. Si nécessaire, appliquer une compresse humide tiède (tel qu'un gant de toilette mouillé) autour de l'étui pour ramollir l'adhésif.

Les 3 questions à se poser pour sélectionner le bon étui pénien

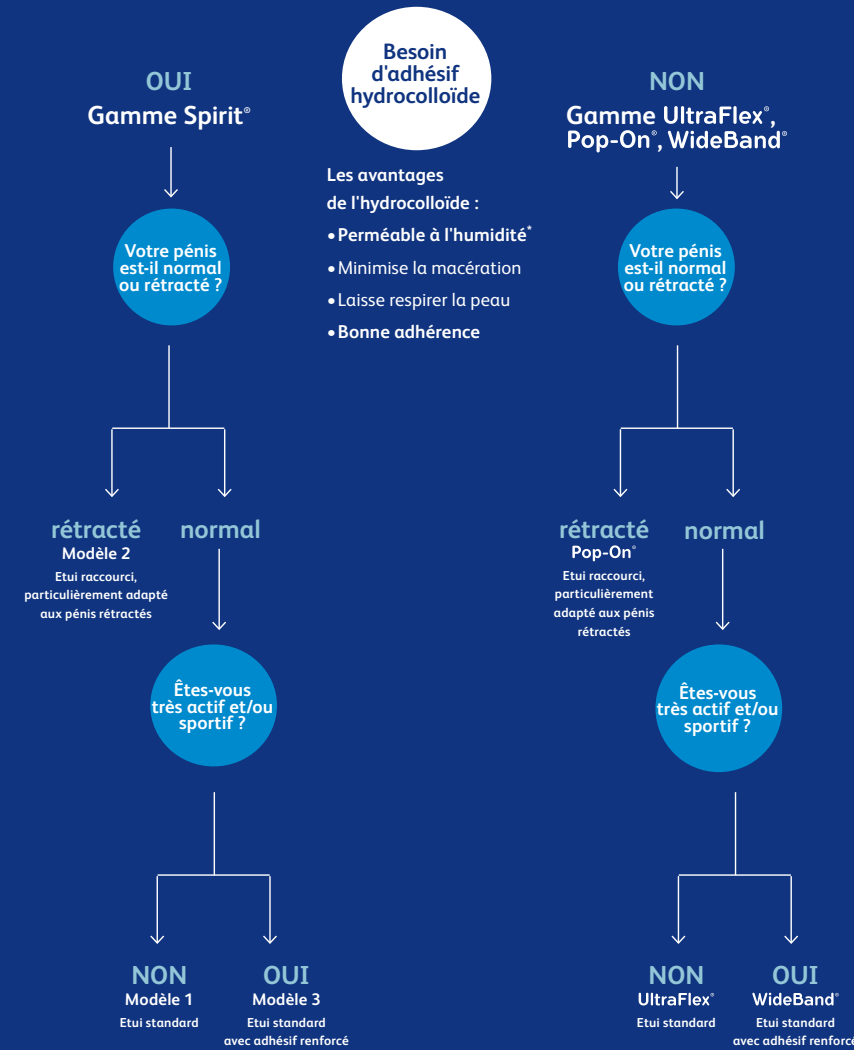

* PermaTech, Test report (TR 1665), Nov 2011. Comparaison du taux de transmission de la vapeur d'eau entre les étuis péniers avec adhésif l'hydrocolloïde (14 % carbopol) et les autres étuis péniers de Rochester Medical, Test effectué par PermaTech (selon la norme ASTM F1249). Les étuis péniers avec adhésif l'hydrocolloïde (14 % carbopol) ont le meilleur taux de perméabilité.

Associez votre étui pénien à une poche Spirit®

Etuis péniers Spirit® Modèle 1, Modèle 2, Modèle 3 	OU	Etuis péniers Ultraflex®, Pop On®, WideBand® 
	+	
Poche de jambe Spirit® 500 ml, 750 ml Stérile et non stérile 	ET/OU	Poche 2 L Spirit® Stérile et non stérile 
	=	
La solution BD		

Sangle de jambe offerte

Document réservé aux professionnels de santé. Veuillez lire l'intégralité de la notice fournie avec le dispositif médical avant son utilisation. Indication : l'étui pénien est un étui pénien externe auto-collant pour homme en silicone, conçu pour maîtriser l'incontinence urinaire. Dispositif médical Classe I

Fabricant : C.R. BARD, Inc - Covington. Spirit® LEG BAGS et Spirit® BED BAGS*

Les étuis péniers Spirit® Ultraflex® Pop-On® et Wide Band® sont des dispositifs médicaux réservés à un usage urologique. Pour un bon usage, se référer aux instructions d'utilisation. Dispositif médical Classe I (MDR 2017/745) - Fabricant : C.R.Bard, Inc. Dispositif pris en charge par l'assurance maladie.

Les poches à urine Spirit® sont des dispositifs médicaux réservés à un usage urologique. Pour un bon usage se référer à la notice d'utilisation. Dispositifs médicaux de classe I (MDR 2017/745) pour les poches non stériles, de classe Is (Dir 93/42/CEE) pour les poches stériles - CE0123 CE ou de classe I stérile (Dir 93/42/CEE) - Fabricant Conod Medical Co, Ltd. Dispositif pris en charge par l'assurance maladie. Edition mai 2023.

BD, 11 rue Aristide Bergès,
38800 Le Pont-de-Claix, France
Tél : 04 76 68 36 36

bd.com/fr

BD, le logo BD, Spirit, UltraFlex, WideBand et Pop-On sont la propriété de Becton, Dickinson and Company® 2023 BD et ses filiales. Tous droits réservés. Becton Dickinson France S.A.S au capital de 64 719 915€ / RCS Grenoble B 056 501 711 / Siret 056 501 711 00115. BD-71865 Mai 2023



Spirit®

Sélectionnez le bon étui pénien

Engagé pour la santé de demain



7566 - proIG ww.pro-g.eu

Les références BD

Spirit® étuis péniers en silicone avec adhésif hydrocolloïde

Modèle 1
Étui standard



- Longueur étui : 80 mm
- Longueur adhésif : 40 mm

Réf.	Diamètre	Code ACL
35301	25 mm	3401563203612
35302	29 mm	3401563203780
35303	32 mm	3401563203902
35304	36 mm	3401563204091
35305	41 mm	3401563204152

Modèle 2

Etui raccourci, particulièrement adapté aux pénis rétractés



- Longueur étui : 38 mm
- Longueur adhésif : 38 mm

Réf.	Diamètre	Code ACL
37301	25 mm	3401563204381
37302	29 mm	3401563204442
37303	32 mm	3401563204503
37304	36 mm	3401563204732
37305	41 mm	3401563204961

Modèle 3

Etui standard avec adhésif renforcé



- Longueur étui : 80 mm
- Longueur adhésif : 80 mm

Réf.	Diamètre	Code ACL
39301	25 mm	3401563205043
39302	29 mm	3401563205104
39303	32 mm	3401563205272
39304	36 mm	3401563205333
39305	41 mm	3401563205562

Étuis péniers en silicone auto-adhésif

UltraFlex®
Étui standard



- Longueur étui : 80 mm
- Longueur adhésif : 40 mm

Réf.	Diamètre	Code ACL
33301	25 mm	3401096188592
33302	29 mm	3401096188653
33303	32 mm	3401096188714
33304	36 mm	3401096188882
33305	41 mm	3401096188943

Pop-On®

Etui raccourci, particulièrement adapté aux pénis rétractés



- Longueur étui : 38 mm
- Longueur adhésif : 38 mm

Réf.	Diamètre	Code ACL
32301	25 mm	3401096187991
32302	29 mm	3401096188073
32303	32 mm	3401096188134
32304	36 mm	3401096188363
32305	41 mm	3401096188424

WideBand®

Etui standard avec adhésif renforcé



- Longueur étui : 80 mm
- Longueur adhésif : 80 mm

Réf.	Diamètre	Code ACL
36301	25 mm	3401096189025
36302	29 mm	3401096189193
36303	32 mm	3401096189254
36304	36 mm	3401096189315
36305	41 mm	3401096299694

Tous les étuis péniers sont disponibles en boîte de 30.

Les avantages de l'hydrocolloïde :

- Perméable à l'humidité
- Minimise la macération
- Laisse respirer la peau
- Bonne adhérence

Pensez à raccorder votre étui pénien à une poche Spirit®

Spirit®

Poche de jambe


Poche à urine de 500 ml et 750 ml également disponible avec une tubulure ajustable. Les poches de jambe Spirit® peuvent être facilement connectées aux poches 2 litres grâce à l'embout de sortie de la poche de jambe. Poches disponibles en stérile et non-stérile.

Spirit®

Poche 2 litres

Poche à urine de 2000 ml

Poches disponibles en stérile et non-stérile.

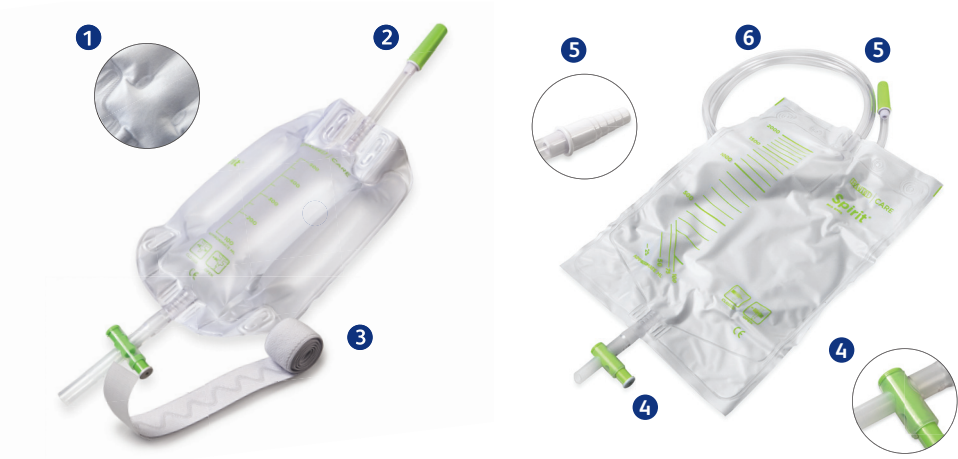

1 Une Face en non-tissé

2 Poche de jambe ergonomique

3 Sangle de jambe

4 Robinet en T

5 Connecteur strié

6 Tubulure transparente

Manipulable avec une seule main

Conçu pour s'adapter aux sondes intermittentes, sondes de Foley, poches à urine et étuis péniers

D'une longueur de 120 cm

Spirit®

Poches de jambe et poches 2 litres

Poches à urine
Sangles de jambe inclus

Poches de jambe
Stérile

Réf.	Unité	Volume	Tube	Code ACL
LB50010S	10	500 ml	10 cm	3401060239442
LB50030S	10	500 ml	30 cm	3401060239466
LB50060S	10	500ml	60 cm	3401060239497
LB75010S	10	750 ml	10 cm	3401060239510
LB75030S	10	750ml	30 cm	3401060239558
LB75060S	10	750 ml	60 cm	3401060239589

Non-Stérile

Réf.	Unité	Volume	Tube	Code ACL
LB50030NS	10	500 ml	30 cm	3401060239466
LB50060NS	10	500ml	60 cm	3401060239480
LB75030NS	10	750ml	30 cm	3401060239558
LB75060NS	10	750 ml	60 cm	3401060239589

Poches 2 L
Stérile

Réf.	Unité	Volume	Tube	Code ACL
BB2010S	10	2 L	120 cm	3401060239343
BB2030S	30	2 L	120 cm	3401060239367

Non-Stérile

Réf.	Unité	Volume	Tube	Code ACL
BB2010NS	10	2 L	120 cm	3401060239336
BB2030NS	30	2 L	120 cm	3401060239350