



FICHE TECHNIQUE

Protège bassin avec tampon absorbant à usage unique
REFERENCE : BMPB-020B

1-Produit

1.1- Description

Protège Bassin avec tampon super-absorbant pour confiner les excréta (capacité d'absorption de 500 ml saline 0,9%)
(capacité d'absorption de l'eau propre de 1500 ml)

1.2- Composition

Sac: PEBD, muni de liens coulissants PEHD. Dimensions : 60x38 cm,
Tampon super-absorbant: Support non-tissé à base de fluff (Cellulose) et de Polymères Super-Absorbants (SAP), 24x13cm pour une capacité d'absorption de 500 ml de solution saline 0,9%

2-Utilisation

2.1- Mode d'emploi

1. Ouvrir la boîte et enlever le rouleau de protèges-bassin
2. Dérouler le 1^{er} protège-bassin et tirer en séparant le long des marques de perforation
3. Ouvrir le sac, le positionner sur le bassin,
4. Le tampon doit être au fond du protège-bassin
5. Attendre que le contenu soit transformé en gel en 1 à 2 minutes environ
6. Fermer hermétiquement le sac

2.2- Élimination

Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

2.3- Précautions d'emploi

Produit à usage unique. En cas de contact oculaire rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants.

3-Réglementaire

3.1 - Conformité

Conforme aux dispositifs médicaux - Classe I. - CE

3.2- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (5 ans).

3.3- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.

4-Logistique

4.1- Information

Code EAN Boite: 3760360510805
Code EAN Carton: 3760360510812
Carton de 18 Boites de 20 sacs

Boite dimension: 19x11x11cm
Carton dimension: 39x35x35cm

Poids: 0.915kg
Poids: 16.5kg