



## FICHE TECHNIQUE

### Protège seau avec tampon absorbant à usage unique REFERENCE : BMPS-500B

#### 1-Produit

##### 1.1- Description

Protège seau de chaise à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant (capacité d'absorption de 500 ml saline 0,9%).  
(capacité d'absorption de l'eau propre de 1500 ml)

##### 1.2- Composition

Sac: PEBD, muni de liens coulissants PEHD bleus. Dimensions : 52x40 cm,  
Tampon super-absorbant: Support non-tissé à base de fluff (Cellulose) et de Polymères Super-Absorbants (SAP), 24x13cm pour une capacité d'absorption de 500 ml de solution saline 0,9%.

#### 2-Utilisation

##### 2.1- Mode d'emploi

1. Ouvrir la boîte et enlever le rouleau de protèges-seaux
2. Dérouler le 1<sup>er</sup> protège-seau et tirer en séparant le long des marques de perforation
3. Ouvrir le sac, le positionner sur le seau, rabattre l'assis de la chaise
4. Le tampon doit être au fond du protège-seau
5. Utiliser le seau garni du protège-seau
6. Attendre que le contenu soit transformé en gel en 1 à 2 minutes environ
7. Fermer hermétiquement le sac.

##### 2.2- Élimination

Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

##### 2.3- Précautions d'emploi

Produit à usage unique. En cas de contact oculaire rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants.

#### 3-Réglementaire

##### 3.1 - Conformité

Conforme aux dispositifs médicaux - Classe I. - CE

##### 3.2- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (5 ans).

##### 3.3- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.

#### 4-Logistique

##### 4.1- Information

Code EAN Boite: 3760360510782

Code EAN Carton: 3760360510799

Carton de 18 Boites de 20 sacs

Boite dimension: 19x11x11cm

Carton dimension: 39x35x35cm

Poids: 0.915kg

Poids: 16.5kg

BIENMED

16 avenue de joinville

94130 Nogent sur marne

FT de protège seau