

BANDE DE SOUS-CONTENTION ADHÉSIVE TENSOBAN 20 M X 7 CM



Bande de sous-contention adhésive Tensoban®. Protège les téguments et permet un retrait indolore de la contention. Rouleau de 20 m x 7 cm.

FICHE TECHNIQUE

Description du produit

Bande de sous-contention adhésive Tensoban®.

Rouleau de 20 m x 7 cm.

Protège les téguments lors de contentions.

Assure une protection efficace de la peau.

Permet un retrait des contentions facile et sans douleur.

Cette bande auto-adhérente empêche les glissements.

Capacité d'allongement : minimum de 100%.

Bande en mousse polyuréthane.

Confortable sur la peau.

Structure résistante.

Bande fine et légère.

Mousse de couleur blanche.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Sécable à la main.

Facile à utiliser.

Bande très conformable.

Formule sans latex ni phtalates.

Produit non stérile.

Marquage CE.

Mode d'emploi

Nettoyer et sécher la peau.

Vaporiser un spray adhésif du type Tensospray® afin de préparer la peau.

Appliquer la bande Tensoban® en circulaire et avec une légère tension.

Bien lisser.