

# TENSOPLAST 3CM X 2.5M HB ELASTO ADHESIVE - BANDE ADHESIVE ELASTIQUE POUR ENTORSES, PHLEBOLOGIE, MAIN



## Indications :

Pour toutes contentions adhésives souples ou strapping en pathologie articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire.

Compression en traumatologie musculaire.

Traitement élasto-compressif en phlébologie.

Fixation de pansements.

Fixation d'attelles.

## Description :

Bénéficiant du savoir-faire et de la formule originale des laboratoires Fisch, Tensoplast garantit la qualité unique et reconnue de ses bandes adhésives élastiques depuis 1931. Tensoplast, véritable référence pour la médecine du sport, vous accompagne dans votre pratique quotidienne.

Grâce à Tensoplast, BSN MEDICAL est fournisseur et partenaire des équipes médicales de nombreuses fédérations sportives et d'associations de professionnels de santé du sport.

Grâce à ses caractéristiques uniques, Tensoplast assure une excellente qualité de contention en :

Traumatologie du sport : contentions adhésives souples en préventif et traitement curatif des pathologies articulaires, tendineuses, musculaires et ligamentaires.

Angiophlébologie : traitement élasto-compressif des troubles de l'insuffisance veineuse.

Soins infirmiers : fixation de pansements.

### Caractéristiques :

Longueur de la bande : 2.5 m.

Largeur de la bande : 3 cm.

100 % coton : excellente tolérance.

Lisières tissées : absence de fils flottants.

Adhésivité immédiate et prolongée.

Élasticité longitudinale nominale de 50 %.

Effet de rappel élastique.

Grande résistance aux contraintes de force.

Élément protecteur gaufré : contrôle de la tension lors de la pose.

Aérée par stries ; évite la macération.

Assure le maintien tout en évitant l'immobilisation complète du patient.

Formule HBC en phlébologie (couleur chair).

### Précaution d'emploi :

Ne pas utiliser en tension maximale lorsqu'une circulaire est faite sur un membre.

En cas d'engourdissement ou de sensation douloureuse, ôter la bande puis refaire le montage moins serré.

Demander conseil à votre médecin si la douleur persiste.

### Composition :

Support coton.

Masse adhésive résine de synthèse, élastomère de synthèse, lanoline, oxyde de zinc.

Film protecteur polyéthylène.

Existe également en :

Bande de 8 cm x 2.5 m.

Bande de 10 cm x 2.5 m.