

	<b>Marque :</b>	<b>Actimove®</b>
	<b>Classe CE :</b>	I, non stérile
	<b>Durée de vie :</b>	3 ans
	<b>Année de mise sur le marché :</b>	2019 en France (Sous le nom Physiopack® de 1989 à 2019)
	<b>Code CLADIMED :</b>	M50ZZ99
	<b>Code CND :</b>	/
	<b>Code GMDN :</b>	37240
	<b>Version :</b>	H
	<b>Date :</b>	23/02/2022

## DONNEES PRODUIT

### Description

Poche plastique contenant un gel de couleur bleu, pour application externe de froid ou de chaud.

### Caractéristiques

- Utilisation, à chaud ou à froid, jusqu'à 30 minutes,
- Conserve sa souplesse, à froid comme à chaud,
- Poche réutilisable, se nettoie facilement après chaque utilisation,
- Formule sans latex, sans phtalates.

### Composition

Gel Eau, agent réfrigérant, agent épaississant, conservateur, agent neutralisant, colorant alimentaire  
 Poche Complexe laminé PE/PA/PE. PE = polyéthylène, PA = polyamide.

### Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

### Conditionnement / Stérilisation

Conditionnement en boîte unitaire ou en boîte de 4 poches (72075-14), avec notice d'utilisation. Les références 72075-14 & 72075-16 sont livrées avec une housse de protection munie d'une fermeture et d'une attache auto-agrippantes. Produit livré non stérile

### Références

Présentation avec housse de protection

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809652413	72075-14	(7,5 cm x 10 cm) x 4	1	12	
4042809652451	72075-16	12 cm x 29 cm	1	12	

Présentation sans housse de protection

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809652475	72075-17	16 cm x 26 cm	1	12	

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker les boîtes unitaires dans un milieu propre et sec.

A l'extérieur des boîtes, les poches de gel sont à conserver à l'abri de toute exposition directe du soleil.

## INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

### Indications

#### Application externe de froid

- Lésions aiguës des tissus mous,
- Inflammations locales (ex. tendinite, bursite),
- Maladies chroniques (ex. ostéo-arthrite, polyarthrite rhumatoïde),
- Spasmes musculaires,
- Rééducation après une lésion des tissus mous.

#### Application externe de chaud

- Douleurs musculaires,
- Inflammations subaiguës (y compris l'arthrite),
- Raideur des tissus mous.

### Contre-indications

. Ne pas appliquer de poche froide en cas de troubles circulatoires, maladie de Raynaud, cryoglobulinémie, hémoglobinurie paroxystique ou urticaire liés au froid.

. Ne pas appliquer de poche chaude en cas de troubles circulatoires, tumeurs, troubles sensitifs, traumatismes aigus, saignements, inflammations aiguës et œdème aigu.

## CONSEILS D'UTILISATION

### Mode d'emploi

#### Pour une application externe de froid

Placer la poche à plat au congélateur ou au réfrigérateur.

La poche est prête pour sa première utilisation après 2h de conservation au congélateur ou après 6h de conservation au réfrigérateur.

#### Pour une application externe de chaud

Placer la poche soit dans une eau portée à environ 80°C, la quantité d'eau chauffée doit recouvrir complètement la poche, soit au micro-ondes (180W), pendant les durées indiquées dans le tableau ci-dessous.

Référence	Eau chaude (env. 80°C)	Micro-ondes (180W)
72075-14	1 min	45 sec
72075-16 72075-17	2 min	4 min

- La poche s'applique froide ou chaude sur la zone à traiter, dans sa housse de protection ou en intercalant un linge ou une serviette entre la poche et la peau.
- L'utilisation d'une boîte isotherme de taille appropriée permet de conserver la poche à une température chaude ou froide pendant environ 6 heures.

### Précautions d'emploi

- USAGE EXTERNE UNIQUEMENT.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas utiliser si l'enveloppe plastique est détériorée.
- Respecter le temps d'application, qui ne devrait pas dépasser 20 à 30 minutes.
- Utiliser sous surveillance chez les enfants.

Particularités d'utilisation

Ne pas appliquer directement sur la peau. Toujours intercaler un linge entre la poche et la peau.

**Accessoires associés**

Bandes de fixation, si besoin : Co-Plus®, Tensoplast®, Tensoplus®.

**Entretien**

La poche se nettoie à l'eau ou, si besoin, à l'aide d'un désinfectant. La poche est réutilisable tant que l'enveloppe externe est intacte.

**INFORMATIONS REGLEMENTAIRES****Autorisation de marquage CE**

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

**Remboursement**

Non remboursé par l'assurance maladie.

**Procédés de destruction**

Incinération contrôlée ou enfouissement, selon la réglementation locale en vigueur.

<b>Distributeur</b>	<b>Fabricant légal</b>
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485