

	<b>Marque :</b>	/
	<b>Classe CE :</b>	I, non stérile
	<b>Durée de vie :</b>	3 ans
	<b>Année de mise sur le marché :</b>	2009 en France
	<b>Code CLADIMED :</b>	M50AB01
	<b>Code CND :</b>	/
	<b>Code GMDN :</b>	33521
	<b>Version :</b>	B
	<b>Date :</b>	13/06/2021

## DONNEES PRODUIT

### Description

Bande adhésive inélastique (rigide) enduite d'une masse adhésive à l'oxyde zinc et caoutchouc.

### Caractéristiques

- Pouvoir adhésif très élevé,
- Très forte résistance à la traction,
- Hydrophobe,
- Facile à dérouler,
- Formule avec latex (caoutchouc naturel), sans phtalates.

### Composition

Support : rayonne 100 %. Couleur chair.

Masse adhésive : à base de caoutchouc naturel.

### Contrôles des matières premières et des produits finis

#### ✓ Matières premières

Effectués par le fabricant

#### ✓ Produits finis

Contrôle quantitatif et qualitatif de la masse adhésive.

Contrôle de l'adhésivité sur acier par pelage.

Structure de la trame textile, rigidité.

### Conditionnement / Stérilisation

Boîte unitaire. Livré non stérile. Usage unique

### Référence

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809042191	76168-00	38 mm x 13,7 m	12	30	

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

**INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS****Indications**

- . Traumatologie sportive notamment pour des applications spéciales telle que la technique Mc Connell lors de douleurs femoro-patellaires.
- . Contention rigide (technique taping) ou contention adhésive mixte (strapping).

**Contre-indications**

Sujets sensibilisés au latex/caoutchouc naturel

**CONSEILS D'UTILISATION****Mode d'emploi**

1. Analyser le mouvement de la rotule,
2. Appliquer sur peau sèche et propre. Corriger l'inclinaison de la rotule au moyen de Leukotape® P en partant du milieu de la rotule jusqu'au condyle fémoral médian : soulever le tissu mou de la face interne vers la ligne médiane de la rotule et fixer la bande adhésive.
3. Corriger le mouvement de glissement de la rotule au moyen d'une bande adhésive partant du bord latéral vers la partie médiane. De nouveau, soulever le tissu mou de la face interne vers le milieu de la rotule et fixer la bande adhésive.
4. Corriger la rotation de la rotule,
5. Dans le cas d'une rotation externe placer la bande adhésive sur le pôle distal, (c'est-à-dire sur la partie inférieure de la ligne médiane) et faire effectuer à la rotule un mouvement de rotation vers l'intérieur, en tirant la bande adhésive dans le même sens.
6. Vérifier de nouveau la position pour vous assurer que la rotule soit droite,
7. Si la rotule n'est pas parallèle au plan du fémur, une bande adhésive de correction supplémentaire s'avèrera nécessaire,
8. Régler à présent le mouvement qui, auparavant provoquait la douleur. Si la douleur n'est pas considérablement réduite, consulter votre le médecin ou le physiothérapeute qui devrait recommander une technique de taping différente.

Leukotape® P peut s'utiliser seul pour la réalisation d'une contention articulaire rigide, technique dite du "Taping"

- Dérouler Leukotape® P,
- Le pré-découper aux longueurs voulues,
- L'appliquer en tension selon la pathologie à traiter sans réaliser de circulaires complètes (effet de garrot),
- Lisser pour renforcer l'adhésivité du montage.

Leukotape® P peut également s'utiliser en complément d'une contention adhésive souple pré-existante pour renforcer sa force de contention et surtout limiter l'amplitude du mouvement.

**Précautions d'emploi**

- . Ne pas utiliser en tension maximale lorsqu'une circulaire est faite sur un membre.
- . Protéger la peau avec par exemple Hypafix®, si celle-ci est soumise à une trop forte sollicitation par Leukotape® P.
- . Dans le cadre d'une pose selon la technique de Mc Connell ne pas appliquer de bande adhésive à l'arrière du genou

**Particularité d'utilisation**

Doit être appliqué sur peau sèche et propre

**Accessoires associés**

Non applicable.

**Entretien**

Non applicable

**INFORMATIONS REGLEMENTAIRES****Autorisation de marquage CE**

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal

**Remboursement**

Non remboursé par l'assurance maladie.

**Procédés de destruction**

Ceux prévus pour la destruction des pansements (en particulier : incinération), selon la réglementation locale.

<b>Distributeur</b>	<b>Fabricant légal</b>	<b>Mandataire Européen</b>
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical (Pty) Ltd. 30 Gillitts Road Pinetown, 3610 Afrique du Sud Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485