

	Marque :	Leukoplast®
	Classe CE :	I, non stérile
	Durée de vie :	5 ans
	Année de mise sur le marché :	2004 en France (sous Coverplast® Classic jusqu'en 2015)
	Code CLADIMED :	F51CA02
	Code CND :	/
	Code GMDN :	44990
	Version :	E
	Date :	13/06/2021

DONNEES PRODUIT

Description

Pansement adhésif constitué d'un support tissé couleur chair extensible dans le sens de la trame, enduit d'une masse adhésive à base de caoutchouc naturel et d'une compresse médiane absorbante neutre, non-adhérente à la plaie.

Caractéristiques

- Support résistant,
- Hautement élastique, conformable,
- Fort pouvoir adhésif,
- Forte tenue dans le temps,
- Support déperlant,
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, limite le risque de macération,
- Compresse absorbante et non adhérente à la plaie,
- Formule avec latex, sans phtalates.

Composition

Support : tissé de couleur chair, 100% coton.

Masse adhésive : à base de caoutchouc naturel, lanoline, oxyde de zinc et colophane.

Compresse : viscosse (85%) et PE/PP (15%), en non tissé blanc et recouverte d'un voile en polyéthylène.

Contrôles des matières premières et des produits finis

✓ Matières premières

Effectués par le fabricant.

✓ Produits finis

Contrôle Visuel, contrôle quantitatif de la masse adhésive, force d'adhésivité, perméabilité à l'air.

Conditionnement / Stérilisation

Boîte distributrice contenant une bande à découper ou boîte de pansements prédécoupés. Boîtes regroupées par 10 sous film plastique. Produit livré non stérile.

Références

Bande à découper

Code EAN13	Code Produit	Dimensions pansement	Dimensions compresse	Nombre de bandes par boîte	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809660470	76459-04	6 cm x 1 m	2,5 cm x 1 m	1	10	120	
4042809660517	76459-06	8 cm x 1 m	4 cm x 1 m	1	10	120	

Pansements prédécoupés et emballés individuellement

Code EAN13	Code Produit	Dimensions pansement	Dimensions compresse	Nombre de pansements par boîte	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809660623	76459-11	3,8 cm x 7,5 cm*	2,5 cm x 2,3 cm	20	10	120	

* Pansement en forme de H (forme spéciale main et talon)

Assortiment de pansements prédécoupés et emballés individuellement

Code EAN13	Code Produit	Dimensions pansement	Dimensions compresse	Nombre de pansements par boîte	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809660579	76459-09	2,2 cm x 3,8 cm ¹	1,2 cm x 1,8 cm	6	10	120	
		3,8 cm x 7,5 cm ²	2,5 cm x 2,3 cm	6			
		5 cm x 6,3 cm ³	1,3 cm x 3,6 cm	6			
		5 cm x 7,2 cm ⁴	2,5 cm x 4 cm	2			

¹ pansement de forme rectangulaire

² pansement en forme de H (forme spéciale main et talon)

³ pansement de largeur inégale, en forme de 8 (forme spéciale bout des doigts)

⁴ pansement de forme rectangulaire, à bords arrondis

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Indications

Soins de courte durée de plaies superficielles (coupures, lacérations, abrasions ou à la suite d'une prise de sang, une vaccination).

Contre-indications

Sensibilisation connue au caoutchouc naturel ou à la colophane.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

Appliquer la compresse du pansement sur la plaie.

Précaution d'emploi

Appliquer sur peau propre et sèche.

Accessoires associés

Non applicable.

Entretien

Non applicable. Usage unique.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Non remboursé par l'assurance maladie.

Procédés de destruction

Ceux prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération...) et selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485