

# I Gamme Embal.net®

Emballages combinés type 4G pour Déchets d'activités de soins à risques infectieux 3291

CARTOSPE  
PACKAGING



Recyclable



Matière infectieuse  
Classe 6.2



Homologués UN 3291



La gamme Embal.net® a été conçue dans le respect de toutes les réglementations en vigueur. Il s'agit d'une caisse carton doublée d'une sache en polyéthylène Haute Densité 40µ avec un lien coulissant. Ces emballages sont utilisés dans les différents établissements de santé (hôpitaux, cliniques, centres de santé, laboratoires...). Attention, ils ne doivent pas contenir de matières répondant aux codes UN 2814 et 2900.



### Emballages carton pour DASRI (ONU 3291)

La gamme Embal.net® a été conçue dans le respect de toutes les réglementations en vigueur. Il s'agit d'une caisse carton doublée d'une sachette en polyéthylène Haute Densité 40µ avec un lien coulissant. Ces emballages sont utilisés dans les différents établissements de santé (hôpitaux, cliniques, centres de santé, laboratoires...). Attention, ils ne doivent pas contenir de matières répondant aux codes UN 2814 et 2900.

- AVANTAGES**
- Lien coulissant de fermeture
  - Conforme ADR, Arrêtés du 24/11/2003 et du 07/11/2019, NFX 30-507 (Version juillet 2018)
  - Poignées solides avec une manipulation sans contact possible avec les déchets.
  - Sachette juppable
  - Système de fermeture provisoire et définitive
  - Visuel de fermeture définitive tel que le prévoit la norme NFX 30-507.



Recyclable




Matière infectieuse  
Classe 6.2




Homologués 3291

#### Mise en forme

Après avoir introduit la main dans l'emballage, exercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme.

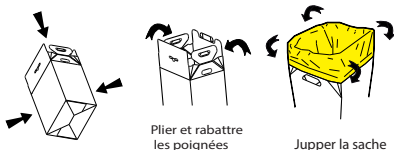

#### Fermeture

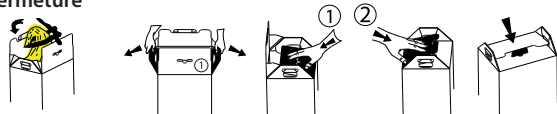

Faire un premier noeud  
Plier en col de cygne  
Faire un second noeud

Ecarter les poignées avant  
de rabattre le rabat n°1

Fermeture provisoire

Fermeture  
définitive

#### Contact

CARTOSPE Packaging  
13, voie industrielle  
60350 ATTICHY

Tél. : (+33) 03.44.42.73.99

Fax : (+33) 03.44.42.73.98

email : [cartospe@cartospe.fr](mailto:cartospe@cartospe.fr)

web : [www.cartospe.fr](http://www.cartospe.fr)

### Gamme Embal.net®

Référence	Embal.net 6l	Embal.net 12l	Embal.net 25l	Embal.net 50l bas	Embal.net 50l haut
Dimensions intérieures (mm)	200 x 200 x 181	200 x 200 x 302	230 x 230 x 430	380x280x480	295x295x575
Volume réel	7.24L	12.08L	22.75L	51.07L	50.04L
Volume utile	6.88L	11.48L	21.61L	48.52L	47.54L
Poids de l'emballage	170 gr	220 g	335 g	575 g	555 g
Epaisseur carton	cannelure B 2,8 mm en carton recyclé				
Architecture	fond automatique pour un montage simple et rapide				
Fermeture	provisoire et définitive simple, intuitive et efficace				
Epaisseur sachet	PEHD 40µ de couleur jaune				
Traitement	corona pour un collage efficace				
Fermeture	Lien coulissant				
Homologation ADR	4G/Y4/S/**/F/BVT 172735/cartospé	4G/Y4/S/**/F/BVT 172735/cartospé	4G/Y12/S/**/F/BVT 172734/cartospé	4G/Y13/S/**/F/BVT 172739/cartospé	4G/Y12.5/S/**/F/BVT 172750/cartospé
Homologation Arrêté du 24/11/2003	Oui				
Conformité à la Norme NFX 30-507	Oui				
Masse brute maximale admissible	4 Kg	4 Kg	12 Kg	13 Kg	12.5 Kg
Marquage	Conforme à la réglementation ADR, Arrêtés du 24/11/2003 et du 07/11/2019, NFX 30-507 (Version juillet 2018)				
Conditionnement	par paquets de 10 unités sur palette				
Nombre par palette	600	440*	500	420	440
Dimensions palette (LxHxcm)	120 x 80 x 120	120 x 80 x 114	100 x 80 x 180	140 x 80 x 200	120 x 80 x 190
Poids palette	112 kg	107 kg	178 Kg	252 Kg	254 Kg
Protection palette	Renfort carton cerclage + film étirable				

\* (gerbage 1/1 pendant le transport)