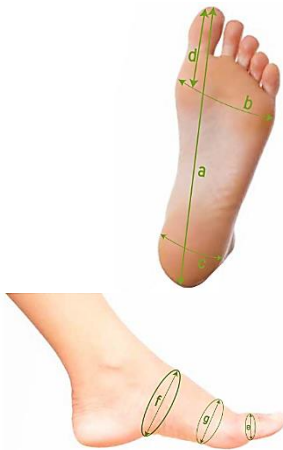
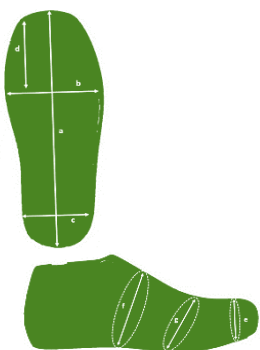



<b>Nom commercial</b>	<b>Dani</b>	<b>Référence :</b>	DANIECCANE
<b>Fabricant :</b>	<b>Celia Ruiz Calzados, SL</b> C/Ciudadela, 18. Pol. Industrial Carrús. 03206 Elx-Elche (Spain) Telf. 965 448 245 Fax: 966 660 098. información@celiaruizcalzados.com		
<b>Nom de la marque :</b>	Dani		
<b>Combinaisons disponibles :</b>	● Noir		
<b>Classification et évaluation de la conformité :</b>	<b>Dispositif Médical (MD) de Classe I.</b> Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux Dispositifs Médicaux, garantissant la qualité et la sécurité du produit avec le marquage CE.		
<b>Champ d'application :</b>	Conception, Développement, Fabrication et Commercialisation de chaussures destinées à la prise en charge des pathologies du pied.		

**Dimensions et pointure :**
**Mesures du pied**


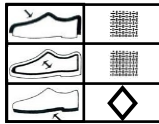
Point.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
(a) cm	23,3	24	24,7	25,3	26	26,7	27,3	28	28,7	29,3	30	30,7	31,3
(b) cm	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3
(c) cm	5,9	6	6,2	6,3	6,5	6,6	6,8	6,9	7,1	7,2	7,4	7,5	7,7
(d) cm	6,8	7,0	7,2	7,5	7,8	8,0	8,3	8,6	9,1	9,4	9,6	9,6	9,7
(e) cm	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	26,5
(f) cm	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	31,5
(g) cm	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28	28,5	29

**Dimensions et pointure :**
**Mesures de la forme - Unisexe**


Point.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
(a) cm	24	24,7	25,3	26	26,7	27,3	28	28,7	29,3	30	30,7	31,3	32
(b) cm	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5
(c) cm	6	6,2	6,3	6,5	6,6	6,8	6,9	7,1	7,2	7,4	7,5	7,7	7,9
(d) cm	7,0	7,2	7,5	7,8	8	8,3	8,6	9,1	9,4	9,6	9,6	9,7	9,9
(e) cm	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	26,5	27
(f) cm	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	31,5	32
(g) cm	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28	28,5	29	29,5

Description du produit :	Image :
<p>Conçu pour les personnes ayant divers problèmes fonctionnels lors de la marche et qui nécessitent une largeur spéciale, un ajustement facile avec un matériau qui offre un plus grand confort.</p> <p>Chaussures unisexes à forme fermée, avec une large bande dorsale Velcro auto-ajustable dans la zone supérieure de l’empeigne, qui possède une longue extension pour la fixation et l’ouverture.</p> <p>Dans la zone arrière du talon, nous trouvons un Velcro pour pouvoir ouvrir et fermer facilement la chaussure, son tissu textile supérieur est très résistant pour la prise en Velcro.</p> <p>Dans la zone médiane, sur toute la longueur du premier rayon, un textile en lycra a été implanté pour une meilleure adaptation aux syndromes et aux maladies de cet endroit, comme l’Hallux abductus valgus.</p> <p>Les matériaux utilisés offrent un plus grand confort, sont indispensables en cas de maladies systémiques et régulent la température des pieds.</p> <p>Semelle amovible qui permet l’utilisation d’une semelle orthopédique, d’embout en silicone ou de prothèses de pied.</p> <p>La doublure intérieure offre les qualités antibactériennes, hypoallergéniques et cytotoxiques appropriées, ce qui évite la dégradation de la doublure, les mauvaises odeurs et ne crée pas d’environnement microbien.</p> <p>La semelle haute densité et résistante à l’abrasion offre une bonne adhérence lors de la marche.</p> <p>Les textiles techniques à l’extérieur de l’empeigne assurent une température optimale pour le pied, à tout moment de l’année. De plus, cela permet au Velcro d’agripper n’importe quelle partie de l’empeigne de la chaussure.</p> <p>La couture interne de bout de la tige est réalisée en zigzag pour éviter tout frottement.</p>	

<p><b>Objectif prévu :</b></p> <p><i>Application thérapeutique</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La particularité de ce modèle est l'utilisation d'un matériau élastique au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne. Le textile lycra réduit la pression sur le premier rayon et procure une plus grande sensation physiologique de confort. Pour cette raison, <i>Dani</i> est particulièrement indiqué pour les patients présentant des points de pression dans la zone Hallux (premier orteil) ou après des opérations dans la zone du premier rayon.</li> <li>• Maladies dermatologiques (infections bactériennes, virales et fongiques, Helomas, IPK).</li> <li>• Bandages postopératoires et épais.</li> </ul>
--	--

<b>Composition du produit :</b>	
Textile externe :	Textile spécial 100 % polyamide Textile Lycra : 56% polyester, 39% polyamide, 5% élasthanne
Textile interne :	100% fibres de Coolmax (polyester) / Charbon Textile lycra
Talon intérieur :	100% fibres de Coolmax (polyester) / Charbon
Moussé :	Mousse de polyester, polyéther et polyuréthane
Bordure :	100% polyester
Système de fermeture :	100% polyamide
Étiquette externe :	Polychlorure de vinyle vulcanisé
Étiquette intérieure :	Polyamide
Semelle intérieure :	100% fibres de Coolmax (polyester) / Charbon
Semelle amovible :	Mousse de latex synthétique verte (styrène-butadiène), textile éponge viscoélastique avec fibre polyester Coolmax / Charbon
Semelle :	Mélange de caoutchouc copolymère styrène-butadiène et de polymères d'isoprène ( <i>caoutchouc naturel - latex</i> )
Rembourrage semelle :	Granulés de liège naturel (98%), avec liant polyuréthane (2%)
Pictogramme :	
Régulation :	<p>Tous les textiles qui composent les chaussures Celia Ruiz sont certifiés <b>OEKO-Tex Standard 100</b> selon la réglementation <b>REACH</b>.</p> <p>Le textile intérieur a passé avec <b>succès</b> les tests de <b>biocompatibilité</b> pour garantir la conformité à la norme <b>ISO 10993</b>.</p> <p>Ces chaussures ont été évaluées sur la base de <b>tests chimiques</b> et <b>mécaniques</b> dans des <b>laboratoires accrédités</b> pour garantir le <b>respect</b> des normes de qualité.</p> <p>L'<b>évaluation clinique</b> de ces chaussures a été réalisée sur la base du règlement <b>UE 2017/745</b>.</p>

**Précaution :**


**Veillez lire attentivement ces instructions d'utilisation** avant d'utiliser le produit. **Vérifiez** au préalable que l'emballage contient un produit identique à l'image sur l'étiquette de l'emballage, et qu'il n'a pas été endommagé.

Toute **altération** des propriétés du produit ou de ses performances **doit entraîner l'arrêt** de son utilisation et l'anomalie doit être immédiatement signalée au fabricant.

**Vérifiez** périodiquement la **capacité fonctionnelle** des chaussures, l'usure, les dommages ou toute détérioration associée. Si tel est le cas, arrêtez l'utilisation et contactez votre **spécialiste de la santé**.

Par ses propriétés de fabrication, un produit savonneux peut apparaître lors des premiers lavages de la semelle amovible. Ce savon n'altère pas les caractéristiques de la chaussure, mais il **ne doit pas** être en contact avec les muqueuses ni les plaies ouvertes.

Si vous avez des **questions** à ce sujet, consultez un **professionnel médical**.

**Avertissements :**


Les chaussures **Dani** ne doivent pas être utilisées par des personnes présentant une **hypersensibilité** à l'un des éléments constitutifs du produit. **Contre-indiqué aux personnes allergiques au latex**, car la semelle contient du caoutchouc naturel ou peut en contenir des traces.



Veillez noter qu'il existe un **risque de glissade** sur des surfaces mouillées ou glissantes, ainsi que sur la neige ou la glace. Procédez dans de tels cas avec la plus grande prudence

En cas d'incident grave (*décès ou détérioration grave de l'état de santé*), vous devez en informer le fabricant et/ou l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le patient est établi.

**Conservation et entretien :**

Conserver toujours dans un endroit **frais** et **sec**. Conservez le produit en toute sécurité et dans son **emballage d'origine**, en évitant la lumière intense.


Pour **nettoyer** le textile des chaussures, utilisez un savon neutre pour vêtements délicats. **Laver à la main** à l'eau tiède et bien rincer. Sécher loin d'une source de chaleur (*jamais de sèche-linge ou de radiateur*).

À la **fin** de la durée de **vie utile** du produit, éliminez le produit et son emballage conformément aux réglementations applicables en matière de gestion des déchets.


**Mode d'emploi :**

- 1) Asseyez-vous sur un siège stable.
- 2) Ouvrez les dispositifs de fermeture ajustables de la chaussure.
- 3) Placez le pied sur la chaussure.
- 4) Refermez la chaussure en l'adaptant au pied : ni trop serrée, ni trop lâche.



Identification du symbole :	
	<b>Marquage CE</b> <i>Sceau de conformité qui garantit que l'article a dépassé les exigences stipulées par le règlement communautaire.</i>
	<b>Dispositif Médical</b> <i>Indique que cet article est classé, fabriqué et appartient à un Dispositif Médical ou Produit de Santé, sous exigences et contrôles réglementaires.</i>
	<b>Lot</b> <i>Indiquer le code de lot du fabricant de formulaires pouvant être identifié, reflétant également la date de fabrication.</i>
	<b>Identification Unique du Produit</b> <i>Codifié et structuré sous le système GS1-128. Ce code est appelé identifiant unique de l'appareil, divisé en codes-barres structurés et référencés. Il permet d'identifier sans équivoque le produit spécifique sur le marché, en montrant ses caractéristiques, ainsi que ses variantes (lot, numéro de série, date de fabrication...)</i>
<b>REF</b>	<b>Numéro de Catalogue</b> <i>Indique le numéro de catalogue du fabricant afin de permettre l'identification du Dispositif Médical.</i>
	<b>Fabricant</b> <i>Il indique qui est le fabricant et directement responsable du dispositif médical.</i>
	<b>Date de Fabrication</b> <i>Indique l'année et le mois de fabrication de la chaussure.</i>
	<b>Distributeur</b> <i>Indique l'entité qui distribue ce produit médical sur le site.</i>
	<b>Consulter les instructions d'utilisation</b> <i>Indique la nécessité pour l'utilisateur ou le professionnel de consulter les instructions respectives avant utilisation.</i>
	<b>Allergène - Contient du latex</b> <i>Alerte sur une éventuelle réaction allergique, indiquant la présence de caoutchouc naturel sec ou de latex comme matériau de construction au sein du produit médical ou même dans l'emballage lui-même.</i>
	<b>Utilisation multiple chez un seul patient</b> <i>Il indique que ce Produit Médical peut être utilisé à plusieurs reprises par un patient individuel.</i>
	<b>Emballage endommagé</b> <i>N'utilisez pas ce produit si l'emballage est endommagé ou détérioré et consultez la notice d'utilisation.</i>
	<b>Précaution</b> <i>Soyez extrêmement prudent aux points indiqués par ce symbole, pour une utilisation correcte et sûre de ce produit médical.</i>