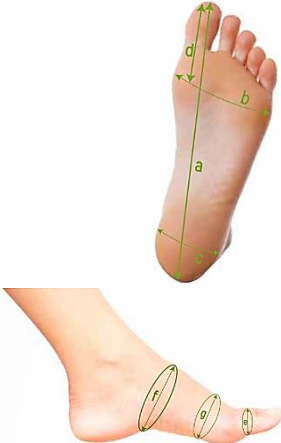
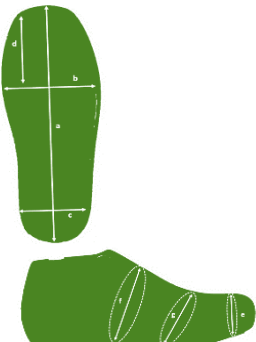



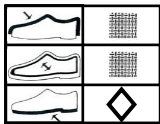
<b>Nom commercial</b>	<b>Franky</b>	<b>Référence :</b>	FRKECCANE // FRKECCAMA
<b>Fabricant :</b>	<b>Celia Ruiz Calzados, SL</b> C/Ciudadela, 18. Pol. Industrial Carrús. 03206 Elx-Elche (Spain) Telf. 965 448 245 Fax: 966 660 098. información@celiaruizcalzados.com		
<b>Nom de la marque :</b>	Franky		
<b>Combinaisons disponibles :</b>	● Noir ● Marine		
<b>Classification et évaluation de la conformité :</b>	<b>Dispositif Médical (MD) de Classe I.</b> Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux Dispositifs Médicaux, garantissant la qualité et la sécurité du produit avec le marquage CE.		
<b>Champ d'application :</b>	Conception, Développement, Fabrication et Commercialisation de chaussures destinées à la prise en charge des pathologies du pied.		

Dimensions et pointure :		Mesures du pied												
	<b>Point.</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
	<b>(a) cm</b>	23,3	24	24,7	25,3	26	26,7	27,3	28	28,7	29,3	30	30,7	31,3
	<b>(b) cm</b>	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3
	<b>(c) cm</b>	5,9	6	6,2	6,3	6,5	6,6	6,8	6,9	7,1	7,2	7,4	7,5	7,7
	<b>(d) cm</b>	6,8	7,0	7,2	7,5	7,8	8,0	8,3	8,6	9,1	9,4	9,6	9,6	9,7
	<b>(e) cm</b>	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	26,5
	<b>(f) cm</b>	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	31,5
	<b>(g) cm</b>	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28	28,5	29

Dimensions et pointure :		Mesures de la forme - Unisexe												
	<b>Point.</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
	<b>(a) cm</b>	24	24,7	25,3	26	26,7	27,3	28	28,7	29,3	30	30,7	31,3	32
	<b>(b) cm</b>	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5
	<b>(c) cm</b>	6	6,2	6,3	6,5	6,6	6,8	6,9	7,1	7,2	7,4	7,5	7,7	7,9
	<b>(d) cm</b>	7,0	7,2	7,5	7,8	8	8,3	8,6	9,1	9,4	9,6	9,6	9,7	9,9
	<b>(e) cm</b>	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	26,5	27
	<b>(f) cm</b>	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	31,5	32
	<b>(g) cm</b>	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28	28,5	29	29,5

Description du produit :	Image :
<p>Le modèle Franky offre un haut degré de confort et un ajustement parfait. Grâce aux fermetures à ouverture totale, la chaussure offre une entrée/sortie du pied très facile.</p> <p>Il est donc particulièrement adapté aux personnes souffrant de troubles de la marche.</p> <p>La largeur de la chaussure peut être ajustée individuellement et en continu à la voûte plantaire grâce aux fermetures Velcro, pour s'adapter facilement au gonflement/inflammation.</p> <p>Chaussures unisexes conçues avec des ouvertures latérales et au talon.</p> <p>Semelle amovible, permet l'utilisation d'une semelle orthopédique, d'embout en silicone ou de prothèses sur le pied.</p> <p>La doublure intérieure offre les qualités antibactériennes, hypoallergéniques et cytotoxiques appropriées, ce qui évite la dégradation de la doublure, les mauvaises odeurs et ne crée pas d'environnement microbien.</p> <p>La semelle haute densité et résistante à l'abrasion offre une bonne adhérence lors de la marche.</p> <p>Les textiles techniques à l'extérieur de la tige assurent une température optimale pour le pied, à tout moment de l'année. De plus, cela permet au Velcro d'agripper n'importe quelle partie de la tige de la chaussure.</p>	

<p><b>Objectif prévu :</b></p> <p><i>Application thérapeutique</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maladies circulatoires, œdèmes, inflammations et problèmes lymphatiques.</li> <li>• Déformations digitales : Hallux valgus, Quintus varus, orteils en griffe et en marteau.</li> <li>• Déformations de l'avant-pied : coalition scaphocuboïde et coalition calcanéo-scaphoïde.</li> <li>• Résultats osseux avec déformations de l'avant-pied. Présence d'ostéophytes dans les articulations. Kystes sous-chondraux dans les os du pied.</li> <li>• Maladies dermatologiques (infections bactériennes, virales et fongiques, Helomas, IPK).</li> <li>• Pansements postopératoires épais.</li> </ul>
--	---

<b>Composition du produit :</b>	
Textile externe :	Textile spécial 100 % polyamide
Textile interne :	100% fibres de Coolmax (polyester) / Charbon
Talon intérieur :	100% fibres de Coolmax (polyester) / Charbon
Moussé :	Mousse de polyester, polyéther et polyuréthane
Bordure :	100% polyester
Système de fermeture :	100% polyamide
Étiquette externe :	Polychlorure de vinyle vulcanisé
Étiquette intérieure :	Polyamide
Semelle intérieure :	100% fibres de Coolmax (polyester) / Charbon
Semelle amovible :	Mousse de latex synthétique verte (styrène-butadiène), textile éponge viscoélastique avec fibre polyester Coolmax / Charbon
Semelle :	Mélange de caoutchouc copolymère styrène-butadiène et de polymères d'isoprène ( <i>caoutchouc naturel - latex</i> )
Rembourrage semelle :	Granulés de liège naturel (98%), avec liant polyuréthane (2%)
Pictogramme :	
Régulation :	<p>Tous les textiles qui composent les chaussures Celia Ruiz sont certifiés <b>OEKO-Tex Standard 100</b> selon la réglementation <b>REACH</b>.</p> <p>Le textile intérieur a passé avec <b>succès</b> les tests de <b>biocompatibilité</b> pour garantir la conformité à la norme <b>ISO 10993</b>.</p> <p>Ces chaussures ont été évaluées sur la base de <b>tests chimiques</b> et <b>mécaniques</b> dans des <b>laboratoires accrédités</b> pour garantir le <b>respect</b> des normes de qualité.</p> <p>L'<b>évaluation clinique</b> de ces chaussures a été réalisée sur la base du règlement <b>UE 2017/745</b>.</p>

**Précaution :**


**Veillez lire attentivement ces instructions d'utilisation** avant d'utiliser le produit. **Vérifiez** au préalable que l'emballage contient un produit identique à l'image sur l'étiquette de l'emballage, et qu'il n'a pas été endommagé.

Toute **altération** des propriétés du produit ou de ses performances **doit entraîner l'arrêt** de son utilisation et l'anomalie doit être immédiatement signalée au fabricant.

**Vérifiez** périodiquement la **capacité fonctionnelle** des chaussures, l'usure, les dommages ou toute détérioration associée. Si tel est le cas, arrêtez l'utilisation et contactez votre **spécialiste de la santé**.

Par ses propriétés de fabrication, un produit savonneux peut apparaître lors des premiers lavages de la semelle amovible. Ce savon n'altère pas les caractéristiques de la chaussure, mais il **ne doit pas** être en contact avec les muqueuses ni les plaies ouvertes.

Si vous avez des **questions** à ce sujet, consultez un **professionnel médical**.

**Avertissements :**


Les chaussures **Franky** ne doivent pas être utilisées par des personnes présentant une **hypersensibilité** à l'un des éléments constitutifs du produit. **Contre-indiqué aux personnes allergiques au latex**, car la semelle contient du caoutchouc naturel ou peut en contenir des traces.



Veillez noter qu'il existe un **risque de glissade** sur des surfaces mouillées ou glissantes, ainsi que sur la neige ou la glace. Procédez dans de tels cas avec la plus grande prudence


En cas d'incident grave (*décès ou détérioration grave de l'état de santé*), vous devez en informer le fabricant et/ou l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le patient est établi.

**Conservation et entretien :**


Conserver toujours dans un endroit **frais** et **sec**. Conservez le produit en toute sécurité et dans son **emballage d'origine**, en évitant la lumière intense.

Pour **nettoyer** le textile des chaussures, utilisez un savon neutre pour vêtements délicats. **Laver à la main** à l'eau tiède et bien rincer. Sécher loin d'une source de chaleur (*jamais de sèche-linge ou de radiateur*).

À la **fin** de la durée de **vie utile** du produit, éliminez le produit et son emballage conformément aux réglementations applicables en matière de gestion des déchets.

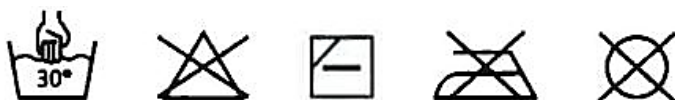
**Mode d'emploi :**

- 1) Asseyez-vous sur un siège stable.
- 2) Ouvrez les dispositifs de fermeture ajustables de la chaussure.
- 3) Placez le pied sur la chaussure.
- 4) Refermez la chaussure en l'adaptant au pied : ni trop serrée, ni trop lâche.

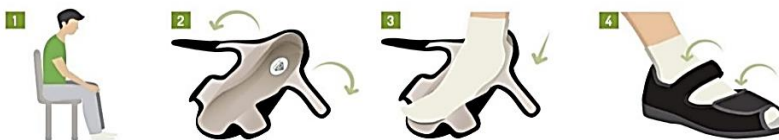

Identification du symbole :	
	<b>Marquage CE</b> <i>Sceau de conformité qui garantit que l'article a dépassé les exigences stipulées par le règlement communautaire.</i>
	<b>Dispositif Médical</b> <i>Indique que cet article est classé, fabriqué et appartient à un Dispositif Médical ou Produit de Santé, sous exigences et contrôles réglementaires.</i>
	<b>Lot</b> <i>Indiquer le code de lot du fabricant de formulaires pouvant être identifié, reflétant également la date de fabrication.</i>
	<b>Identification Unique du Produit</b> <i>Codifié et structuré sous le système GS1-128. Ce code est appelé identifiant unique de l'appareil, divisé en codes-barres structurés et référencés. Il permet d'identifier sans équivoque le produit spécifique sur le marché, en montrant ses caractéristiques, ainsi que ses variantes (lot, numéro de série, date de fabrication...)</i>
<b>REF</b>	<b>Numéro de Catalogue</b> <i>Indique le numéro de catalogue du fabricant afin de permettre l'identification du Dispositif Médical.</i>
	<b>Fabricant</b> <i>Il indique qui est le fabricant et directement responsable du dispositif médical.</i>
	<b>Date de Fabrication</b> <i>Indique l'année et le mois de fabrication de la chaussure.</i>
	<b>Distributeur</b> <i>Indique l'entité qui distribue ce produit médical sur le site.</i>
	<b>Consulter les instructions d'utilisation</b> <i>Indique la nécessité pour l'utilisateur ou le professionnel de consulter les instructions respectives avant utilisation.</i>
	<b>Allergène - Contient du latex</b> <i>Alerte sur une éventuelle réaction allergique, indiquant la présence de caoutchouc naturel sec ou de latex comme matériau de construction au sein du produit médical ou même dans l'emballage lui-même.</i>
	<b>Utilisation multiple chez un seul patient</b> <i>Il indique que ce Produit Médical peut être utilisé à plusieurs reprises par un patient individuel.</i>
	<b>Emballage endommagé</b> <i>N'utilisez pas ce produit si l'emballage est endommagé ou détérioré et consultez la notice d'utilisation.</i>
	<b>Précaution</b> <i>Soyez extrêmement prudent aux points indiqués par ce symbole, pour une utilisation correcte et sûre de ce produit médical.</i>