

Conveen®

Conveen® Active

Conveen® Optima



Incontinence Urinaire Masculine

Etuis péniens Conveen Optima

Bonnes pratiques de soins



SOMMAIRE

1. Indications	p. 1
2. Bénéfices du système collecteur Conveen	p. 2
3. A prendre en compte	p. 2
4. Critères de choix	p. 3
4.1. L'étui	
4.2. La poche à urine	
4.3. Intérêt du système collecteur Conveen	
5. Procédures	p. 5
5.1. Recommandations	
5.2. Préparation du matériel de pose	
5.3. Choix de l'étui le plus adapté au diamètre et à la longueur du pénis	
5.4. Procédure de pose	
5.5. Raccordement de l'étui à la poche à urine	
5.6. Retrait de l'étui pénien	
5.7. Transmission	
5.8. Surveillance	
6. Réponses aux questions les plus fréquentes	p. 9
7. Comment libeller l'ordonnance	p. 10
8. Fiche résumé	p. 11
9. Références	p. 13

Bonnes pratiques de soins : Étuis péniens

Chez l'homme incontinent urinaire

1. Indications

Les systèmes collecteurs d'urine sont à proposer aux hommes incontinents urinaires modérés à sévères de préférence aux protections absorbantes et au sondage à demeure, lorsque c'est possible.¹⁻⁵

NB : Si fuites par regorgement lié à une rétention urinaire : traiter d'abord la cause.

Le recours aux étuis péniens peut être :

- au quotidien (sur 24H), en l'absence - ou dans l'attente - d'une solution curative
- ponctuellement en cas de difficulté de mobilité : post op (ex. prothèse totale de hanche)
- la nuit, dans les services MCO et SSR EHPAD* long séjour lorsque l'incontinence fonctionnelle est palliée le jour par des mictions programmées, pour un confort de sommeil de nuit et limiter le risque de chutes

* MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique

SSR : Soins de suite et de réadaptation

EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

2. Bénéfices du système collecteur Conveen

- **Bien-être du patient** : efficacité, absence d'odeurs, image de soi, sentiment de sécurité, discrétion⁶
- **Prévention des complications cutanées** (escarres)⁸
- **Possibilité de surveiller le volume de la diurèse** (poches graduées)
- **Possibilité de faire un prélèvement pour un ECBU*** (poches stériles avec site de prélèvement)
- **Possibilité d'activités sportives/rééducation y compris en piscine**



3. À prendre en compte

- **En cas de plaie ou d'irritation cutanée au niveau du pénis** : attendre la cicatrisation avant de poser un étui pénien.
- **Si allergie connue au latex** : opter pour un étui hypoallergénique en dérivé de silicone type Conveen Optima.

Respecter la procédure de soins afin d'éviter les accidents de fuites et le risque de macération :

- 1) choix de l'étui pénien : diamètre et longueur
→ penser à réévaluer l'adaptation de la taille de l'étui dans les 48h si problème
- 2) fréquence de changement : → a minima 1 fois par jour lors de la toilette : l'étui+poche^{2,4}
→ entre chaque sondage si fuites : étui pénien seul
- 3) Adapter la poche en fonction du volume des fuites et de l'indication des étuis.
- 4) Vidanger la poche régulièrement en journée, et la nuit utiliser une poche grande capacité pour éviter d'avoir trop de volume d'urine dans la poche et risquer une déconnexion du dispositif.

* Examen Cyto-chimique et Bactériologique des Urines

** Polysiloxane

4. Critères de choix

4.1 L' étui

- Une **taille adaptée** au diamètre et à la longueur du pénis :
 - S'aider d'un mesureur* la première fois pour faciliter le bon choix de la taille de l'étui. Le diamètre de l'étui doit être approprié afin d'éviter les risques de fuites (trop large) ou de lésions du pénis (trop étroit).
 - les étuis péniers de longueur standard sont adaptés à la plupart des hommes. Il est recommandé d'utiliser des étuis spécifiques pour les pénis courts/retractés.
- Un **matériau translucide et hypoallergénique** : ce type d'étui permet de surveiller l'état cutané du pénis. Le latex pose le problème de l'allergie à ce matériau, il est donc recommandé de ne plus utiliser les étuis en latex.¹⁰
- **Dispositif d'aide à la pose** : la double languette de déroulement des étuis Conveen Optima facilite la pose et permet d'éviter le contact entre les gants et la partie adhésive de l'étui.⁷
- Le **bulbe anticoudage** : les étuis munis d'une zone en accordéon au niveau de l'extrémité qui se raccorde à la tubulure de la poche à urine permettent d'assurer un écoulement fluide des urines quelle que soit la position du patient. Le bulbe anticoudage limite ainsi le risque de connexion de l'étui et de fuites.
- **ECBU** : lorsqu'un ECBU doit être réalisé, il peut être effectué sur un étui pénien non stérile, après changement de celui-ci et sur la 1^{ère} miction.⁹
- **Emballage individuel compact** : celui-ci assure un espace de stockage réduit et hygiénique des étuis péniers.


4.2 La poche à urine

- **Sélectionner des poches à urine différentes pour le jour et la nuit** : une capacité plus faible le jour (type Conveen Active ou Conveen 750ml) et une poche de capacité supérieure munie d'une tubulure plus longue pour la nuit (Conveen 1.5l ou 2l).
- **Les attaches de jambe Conveen** :
 - permettent le maintien du dispositif, la mobilité du patient (rééducation/loisirs/...).
 - doivent être ajustées à la dimension de la jambe (cuisse ou mollet) sans serrer : le surplus peut être coupé pour plus d'esthétique et de confort/sécurité.
- **L'attache de maintien Conveen** :
 - permet le maintien de la tubulure des poches Conveen.
 - doit être ajustée à la dimension de la cuisse sans serrer : le surplus peut être coupé pour plus d'esthétique et de confort/sécurité.

* Mesureur disponible gratuitement auprès de votre délégué Coloplast ou en téléphonant au Service Clients au : 01-56-63-18-00 (ouvert de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00)

4.3 Intérêt du système collecteur Conveen

Les systèmes collecteurs Conveen (étuis péniens Conveen Optima + poche Conveen) devraient être recommandés à la place des protections absorbantes chez les hommes incontinents.⁶

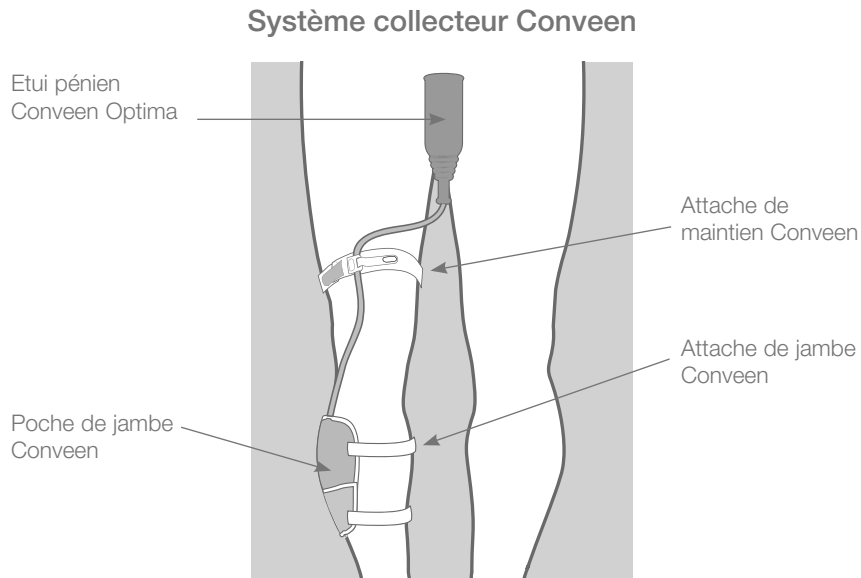

Les avantages de Conveen Optima :

- Sécurité
Absence de latex ► étui hypoallergénique*
Raccordement hermétique ► embout strié permettant une meilleure connexion à la poche
Évacuation continue des urines ► bulbe anti-coudage
- Facilité d'application
Double languette de déroulement permettant une pose homogène de l'étui sur le pénis⁷
- Confort
Etui en polysiloxane, **matériau souple dérivé du silicone** donnant une impression de «double peau»
- Discretion
Emballage compact et ergonomique ► aspect non médical et faible encombrement lors du stockage/transport



* Données de biocompatibilité et de matériovigilance, septembre 2014

5. Procédures



5.1 Recommandations

- **Informez le patient des raisons et de la nécessité de la pose d'un système collecteur d'urine.** S'assurer de son adhésion après lui avoir expliqué sa mise en place.
- **Encouragez le patient à participer :** même si le patient ne peut pas mettre en place tout seul l'étui pénien, notamment pour des raisons cognitives ou de dextérité, il peut être en mesure de participer à certaines étapes :
 - notamment lors de la pose (presser doucement sur le pourtour de l'étui pour assurer une bonne fixation)
 - pour la vidange de la poche
 - pour la surveillance du bon écoulement des urines (absence de coudure de la tubulure ou de vrille de l'étui)
- Prévoir des sous-vêtements et pantalons avec une taille supérieure pour prévenir tout problème de drainage des urines.²
- **Changer l'étui pénien et la poche à urine toutes les 24 h,** après avoir réalisé impérativement une toilette intime au savon ordinaire + rinçage et séchage minutieux.^{2,4}
- Recaloter si besoin le pénis pour éviter tout risque d'œdème du gland.²

5.2 Préparation du matériel pour la pose

- 1 paire de gants non stériles à usage unique
- 1 gant à usage unique pour la toilette
- 1 surblouse non tissée
- Savon doux liquide ou solution hydroalcoolique
- Lingettes nettoyantes sans alcool
- Etais péniers de différents diamètres et longueurs
- 1 poche à urine de jour et/ou de nuit
- 1 porte poche à urine
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour procéder à la dépilation et adapter la longueur de la tubulure de la poche de recueil si nécessaire) ou une tondeuse avec lames jetables

5.3 Choix de l'étui le plus adapté à la longueur et au diamètre du pénis

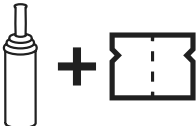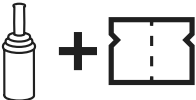Longueur du pénis	Produit conseillé	
Standard Longueur = 7.8 cm	Conveen Optima	
Court Longueur = 4.6 cm	Conveen Optima Specific	
Si peau humide	Utiliser Conveen Prep* avant la pose de l'étui	 ou 

* Conveen Prep pour étuis péniers : augmente le pouvoir adhésif de l'étui dans des situations spécifiques (effort physique intense, forte chaleur,...). Boîte de 54 compresses imprégnées. Ref : 620420. GTIN : 5701780768375

- Pour la mesure, il est préférable que le patient soit allongé
- **Le diamètre du pénis doit être mesuré à l'endroit le plus large** à l'aide d'un mesureur**. En cas d'hésitation entre 2 tailles, choisir le diamètre existant le plus proche. Ne pas hésiter à effectuer un test avec les 2 tailles afin de trouver celui qui convient le mieux au patient. ⁴
- **En cas de pénis rétracté** utiliser les étuis péniers spécifiques pour les pénis courts type **Conveen Optima Specific**. ^{2,4}

** Mesureur disponible gratuitement auprès de votre délégué Coloplast ou en téléphonant au Service Clients au : 01-56-63-18-00 (ouvert de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00)

5.4 Procédure de pose

- **Après un bain ou une douche**, attendre 15 à 20 min avant de poser l'étui pénien.
- Se nettoyer les mains par friction avec une solution hydroalcoolique, ou à l'eau et au savon doux si nécessaire.
- **Utiliser de préférence un gant à usage unique pour la toilette intime.**
- **En cas de pilosité importante, couper les poils** au niveau de la base du pénis, à la tondeuse ou aux ciseaux, de préférence avant la douche. Cela facilite la pose, et garantit une bonne tenue de l'étui pénien en limitant le risque de fuites (la présence de poils entre l'étui et la peau peut altérer l'adhésivité de l'étui).
Nb : Ne pas utiliser de rasoir qui pourrait occasionner des microlésions cutanées. ^{1,2,4}
- **Effectuer une toilette intime** à l'eau et au savon doux. Rincer et sécher minutieusement la peau. Ne pas utiliser de savon surgras, de crème ou de talc qui pourraient compromettre la bonne adhésivité de l'étui. ⁴

Nb : les lingettes nettoyantes sans alcool peuvent être utilisées dans la journée, en déplacement, mais effectuer a minima une toilette intime quotidienne au savon et à l'eau.

- Placer l'étui, après avoir déroulé le 1^{er} tour, à l'extrémité du pénis. Pour les hommes non circoncis, **laisser le prépuce en place** sur le gland pour éviter tout risque d'oedème. ²
- **Laisser un espace d'environ 1 à 2 cm entre l'extrémité du gland et le fond de l'étui** pour ne pas gêner l'écoulement des urines.
- Maintenir l'étui d'une main et de l'autre le **dérouler doucement et complètement, sans à-coups**, en tirant sur la double languette.
- **Exercer une légère pression sur le pourtour de l'étui** afin d'assurer une parfaite étanchéité.

5.5 Raccordement de l'étui à la poche à urine

- Avant de positionner la poche, **fermer le robinet de vidange** et enlever les films protecteurs des patchs adhésifs, si besoin, en fonction du modèle.
- Tenir la poche tubulaire vers le haut et robinet vers le bas.
- Fixer la poche sur la cuisse (droite de préférence pour Conveen Active) et s'assurer que la tubulure est légèrement incurvée vers l'intérieur de la cuisse.
- **Ajuster si nécessaire la longueur de la tubulure** pour éviter toute coudure. **Laisser un peu de jeu au niveau de la tubulure** et vérifier le maintien de la poche sur la jambe pour permettre de s'asseoir avec plus de sécurité (limite les risques de traction ou de déconnexion). ^{2,4}
- **Raccorder l'étui à la poche à urine**, en enfonçant le connecteur de la tubulure dans l'embout de l'étui pénien pour une bonne étanchéité.
- **Fixer la tubulure à la cuisse** à l'aide d'une attache de maintien en s'assurant qu'elle ne tire pas sur l'étui pénien. Celle-ci permet de limiter les mouvements de la tubulure et ainsi les risques de déconnexion entre l'étui et la poche.
- La poche à urine peut être fixée au niveau de la cuisse ou du mollet avec des attaches de fixation ou un filet de maintien. Pour éviter l'effet garot, s'assurer qu'un doigt passe facilement en-dessous de l'attache.
- **Vérifier l'absence de coudure de la tubulure et l'absence de vrille de l'étui.** ⁴
- Eliminer les déchets (emballages, gants, lingettes nettoyantes).
- **Se laver les mains.**

5.6 Retrait de l'étui pénien

- **Détacher l'étui pénien** de la poche en retirant le connecteur de la tubulure.
- **Retirer délicatement l'étui en l'enroulant sur lui-même tout en maintenant le pénis.** Ne pas tirer. ^{1, 4}
- L'étui pénien et la poche à urine vidée peuvent être jetés à la poubelle avec les déchets hospitaliers.
- La petite coque de l'étui pénien Conveen Optima est recyclable et valorisable au même titre que les bouchons de bouteilles en plastique.

5.7 Transmission

- Noter la marque, la longueur et le diamètre de l'étui utilisé.
Ex : Conveen Optima : Longueur : standard, diamètre : 35mm
- Noter la marque et le volume de la poche à urine utilisée. Ex : Conveen 500 ml
- Noter la date de l'étui / poche et initiales du soignant
- Noter l'état cutané du pénis :
 - En cas d'aspect anormal (rougeur, oedème, ulcération), prévenir l'infirmière ou le médecin.¹¹
- Noter les caractéristiques de l'urine :
 - Couleur : jaune pâle / jaune foncé / rouge
 - Limpide / trouble
 - Présence de résidus / dépôts
 - En cas d'anomalie, prévenir l'infirmière ou le médecin
- Si besoin (prescription du médecin), noter le volume des urines lors de chaque vidange de la poche de manière à surveiller la diurèse des 24h. Préciser l'heure de vidange de la poche.¹¹

5.8 Surveillance

- Bien s'assurer de la vidange régulière de la poche à urine (lorsqu'elle est à peu près à moitié pleine).
- S'assurer également du changement quotidien de l'étui pénien avec toilette préalable.⁴
- Penser à utiliser une poche de nuit 2L lorsque les fuites nocturnes sont importantes.

- **L'étui pénien et la poche à urine doivent être changés toutes les 24 h.**
À cette occasion, effectuer impérativement une toilette intime au savon ordinaire + rinçage et séchage minutieux atraumatique.^{2,4}
- **Réévaluer l'adaptation de la taille de l'étui (longueur et diamètre)** dans les 48 à 72h (équipe et contre équipe) pour confirmer la taille de l'étui.
- **Surveiller le bon écoulement des urines** dans la poche.
- **S'assurer du respect de l'état cutané** : pas d'irritation cutanée, de macération, d'oedème du gland ou par choix d'étui pénien inadapté.¹
- **S'il y a déconnexion de l'étui se poser la question POURQUOI ?**
Revoir alors la Procédure de soins et s'assurer :
 - Du bon choix de l'étui pénien : diamètre/longueur
 - De la fréquence de changement
 - De l'adaptation de la poche en fonction du volume des fuites et de l'indication des étuis
 - De la vidange régulière de la poche en journée, et de l'utilisation la nuit d'une poche grande capacité (1.5L /2L), pour éviter d'avoir trop de volume d'urine dans la poche et risquer une déconnexion du dispositif.²

6. Réponses aux questions les plus fréquentes

Chaque problème a sa solution

S'il est utilisé convenablement, le système collecteur Conveen (étui pénien Conveen Optima + poche de recueil Conveen) est très fiable. ⁶ Toutes les difficultés susceptibles de se présenter peuvent facilement être résolues si les instructions sont suivies correctement.

Si mauvais écoulement des urines vérifier :

- Absence coudage
- Absence de vrille
- Poche non collabée
- Espace suffisant (1 à 2 cm) entre l'étui et le gland

Difficulté	Recommandations
Décollement de l'étui	• Changer l'étui (pas plus de 24h de port). ^{2,4} • S'assurer que le diamètre et la longueur sont adaptés en utilisant le mesureur*. • S'assurer qu'il n'y a pas de poils pubiens entre la peau et l'étui. • S'assurer que la peau est bien sèche. Veiller à attendre 15 à 20 minutes après une douche ou un bain avant la pose de l'étui. Utiliser si besoin une lingette Conveen Prep**.
L'urine s'écoule de façon irrégulière dans la poche de recueil des urines	• Le pénis est peut-être trop proche de l'embout de l'étui pénien, empêchant l'écoulement de l'urine dans la poche de recueil : s'assurer de laisser un espace de 1 à 2 cm entre l'extrémité du gland et le fond de l'étui. • Vérifier que l'étui pénien n'est pas trop serré et qu'il ne comprime pas l'urètre, obstruant ainsi l'écoulement de l'urine. • Maintenir la tubulure sur la jambe en position légèrement incurvée afin d'éviter qu'elle ne soit coudée. • Choisir une poche de recueil munie d'une tubulure crénelée anticoudage afin d'assurer un bon écoulement des urines.
La poche est pleine trop rapidement	• Utiliser une poche de recueil d'urine de capacité plus importante et une tubulure plus longue pendant la nuit (type Conveen 2L).
Difficultés pour enrouler / retirer l'étui pénien	• Maintenir le pénis d'une main et retirer doucement de l'autre l'étui pénien en le ré-enroulant sur lui-même mais sans tirer.
L'étui pénien se plisse pendant son déroulement	• S'assurer à l'aide d'un mesureur* de la bonne taille de l'étui et changer l'étui pénien pour éviter tout risque de fuites.
L'étui pénien se ré-enroule lorsque le patient bouge	• Dérouler complètement l'étui pénien afin que la partie adhésive intégrée soit bien appliquée sur la peau de manière uniforme. • Vérifier que le diamètre et la longueur d'étui pénien choisis sont adaptés et pas trop grands. Attention au priapisme chez le patient neurologique. • La peau était peut-être humide lorsque l'étui pénien a été mis en place. Veiller à bien sécher la peau avant la pose. Appliquer un film protecteur, par exemple Conveen Prep**, avant la pose de l'étui, peut aider à préserver la peau sèche.
Les poils pubiens se collent ou se coincent dans l'étui pénien	• Utiliser des ciseaux à bouts ronds ou une tondeuse pour couper les poils de la base du pénis. Revoir procédure de pose.
Problème cutané	• En cas d'aspect anormal (rougeur, oedème, ulcération), prévenir l'infirmière ou le médecin.

* Mesureur disponible gratuitement auprès de votre délégué Coloplast ou en téléphonant au Service Clients au : 01-56-63-18-00 (ouvert de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00)

** Conveen Prep pour étuis péniers : augmente le pouvoir adhésif de l'étui dans des situations spécifiques (effort physique intense, forte chaleur,...). Boîte de 54 compresses imprégnées. Ref : 620420. GTIN : 5701780768375

7. Comment libeller l'ordonnance ?



1. Choix de l'étui Conveen Optima



Conveen Optima 7,8 cm					
Version standard					
	● 25	● 30	● 35	● 40	
Réf	220250	220300	220350	220400	
GTIN	5708932224963	5708932220255	5708932220279	5708932224987	



Conveen Optima Specific 4,6 cm					
Version courte					
	● 21	● 25	● 30	● 35	
Réf	221210	221250	221300	221350	
GTIN	5708932244879	5708932244893	5708932244916	5708932244930	



2. Choix de la poche à urine Conveen



Conveen Active



Poche de jambe Conveen
0,5 l - 0,75 l - 1,5 l

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
☐ Conveen Active 250 ml tub. 7 cm ajustable	255020	5708932467568
☐ 0,5 l tub. crénelée 30 cm ajustable	051600	5708932498227
☐ 0,75 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051670	5708932498265
☐ 1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620	5708932498289



Poche de nuit Conveen

A raccorder à la poche de jambe



Poche de nuit Conveen 2 l
Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
☐ 2 l tub. crénelée 140 cm ajustable	213460	5701780820615



3. Solutions de maintien poches de jambe



Conveen Attaches de jambe
Délivrables à la paire,
conditionné par boîte de 10



Référence	GTIN
☐ 050501	5701780581431



Conveen Attaches de maintien
Boîte de 2 attaches - maintien des sondes à demeure

Référence	GTIN
☐ 90 cm ajustable	383004 5708932507233



Conveen Filets

Boîte de 2 filets. Pour une utilisation sur le mollet ou la cuisse avec les poches de jambe Conveen.

Taille	Circonf.	Réf.	GTIN
☐ ● Standard	40-60 cm	783681	5708932507141
☐ ● Medium	45-65 cm	783687	5708932507172
☐ ● Large	55-85 cm	783695	5708932507202

Exemple de prescription pour 1 mois d'utilisation

Prescripteur → Dr Dupont
26 rue de la Source
54000 NANCY

Date de la prescription → le 27/09/2014

Bénéficiaire → M. Durand

Dénomination produit
Marque
Référence ou
Diamètre / longueur
Quantité quotidienne

Quantité → 4 SP 1 mois
Nbre de renouvellements → AR 1 fois

Signature →

Prescription text:

- Conveen Optima : étuis péniers,
1 boîte - 1/jour Réf. : 220300
- Conveen Poche de Jambe : 0,75 L,
1 boîte - 1/jour Réf. : 051670
- Conveen Attaches de jambe :
1 boîte Réf. : 050501
- Conveen Poche de nuit 2 L :
1 boîte - 1/jour Réf. : 213460

Etuis Conveen Optima et poches Conveen et Conveen Active : Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

Dispositifs médicaux de classe I, marqués CE.

Fabricant : Coloplast A/S


Lire attentivement la notice d'instruction avant utilisation.

8. Fiche résumé

Protocole de pose système collecteur Conveen® (étui pénien Conveen Optima + poche à urine Conveen)

Mise en place de l'étui pénien

- Couper les poils (ne pas les raser)
- Faire une toilette (eau + savon neutre)
- Sécher soigneusement
- Veillez à laisser un espace de 1 à 2 cm entre l'extrémité du gland et le fond de l'étui pénien
- Dérouler l'étui avec la languette
- Exercer de légères pressions autour de la verge pour une bonne adhérence

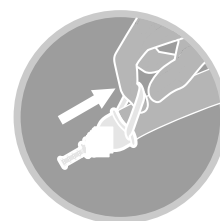

Préparation de la poche à urine

- Froisser la poche en vue de faciliter son remplissage
- Fermer le robinet de vidange
- La tubulure de la poche peut être ajustée à l'aide d'une paire de ciseaux. Pour les tubulures crénelées, couper au sommet d'un segment lisse afin de conserver celui-ci entier. La section doit être droite et nette afin d'assurer une connexion étanche
- Mettre le connecteur (embout conique blanc) dans la tubulure (poches 500ml et au-delà). NB : Conveen Active est pré-connectée
- Raccorder l'étui pénien à la poche en vous assurant que le connecteur de la tubulure est bien enfoncé dans l'embout de l'étui pénien



Mise en place des attaches sur les poches de jambe Conveen

- L'attache la plus large en haut et la plus fine en bas
- Mettre les boutons vers l'extérieur (côté plastifié de la poche)
- Mettre en place les attaches de jambe - le surplus pouvant être coupé
- Fixer l'attache de maintien au niveau de la cuisse.

Vidange de la poche à urine

- Si la poche est placée au niveau du mollet : mettre le pied sur le rebord des toilettes et vidanger
- Si la poche est placée au niveau de la cuisse : enlever l'attache de jambe inférieure (pour avoir du jeu) et vidanger dans les toilettes

Retrait de l'étui pénien

- Détacher l'étui pénien en retirant le connecteur de la tubulure de la poche à urine.
- Retirer délicatement l'étui en l'enroulant sur lui-même tout en maintenant le pénis. Ne pas tirer.

Evacuation des systèmes collecteurs usagés

- La poche vidangée peut être jetée dans une poubelle
- L'étui peut être jeté également dans une poubelle
- La petite coque conditionnant l'étui est recyclable comme les bouchons de bouteille en plastique.

9. Références

- 1- Recommandations de l'International Consultation on Incontinence_5ème édition (ICI), 2013.
- 2- EAU Guidelines on Urinary Incontinence. European Urology 59 (2011) 387-400.
- 3- Conférence de Consensus SPILF AFU. Infections urinaires nosocomiales de l'adulte. Nov 2002.
- 4- CODIMS AP-HP. Recommandations Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical. Déc 2009.
- 5- Bonnes pratiques de soins. Etuis péniens. EAUN 2008.
- 6- BJU Int. 2011 Jul;108(2):241-7. Etude clinique comparative randomisée en cross-over évaluant la préférence et l'impact sur la qualité de vie des systèmes collecteurs (étuis Conveen Optima + poches Conveen) vs protections absorbantes chez 58 patients incontinents urinaires.
- 7- Pemberton P, Brooks A, Eriksen CM, Frost S, Graham S, Greenman L, Hannigan H, Looms D, Moran S, Neilsen PN, Ollerhead D, Shaw J, Williams D. A comparative study of two types of urinary sheath. Nurs Times. 2006 Feb 14-20;102(7):36-41.
- 8 - Dieuleveux A. Gestion de l'incontinence urinaire masculine et prévention des escarres : la pratique d'une équipe. Atelier 8. Journées de l'infirmière en urologie AFIIU, nov 2012.
- 9- Nicolle LE et al. Urine specimen collection with external devices for diagnosis of bacteriuria in elderly incontinent men. J Clin Microbiol 1988; 26: 1115-9.
- 10- Pariente JL. Le latex: un biomatériau historique à proscrire aujourd'hui. Progrès en Urologie (2005), 15 893-896.
- 11- Technique de pose d'un étui pénien chez une personne soignée à domicile, CCLIN Sud-Est, juin 2000.

L'histoire de Coloplast commence en 1954 au Danemark. Elise Sørensen est infirmière. Sa soeur Thora vient juste d'être opérée d'une colostomie et refuse de sortir de chez elle de crainte que sa stomie ne fuie en public.

Pour répondre aux problèmes de sa soeur, Elise crée la première poche de stomie adhésive au monde. Une poche de recueil qui ne fuit pas, donnant à Thora, et à des milliers de personnes comme elle, la chance de reprendre une vie normale.

Une solution simple mais qui peut changer une vie.

Aujourd'hui, notre activité concerne les soins des stomies, l'urologie, la continence et les soins des plaies.

Nous continuons de suivre l'exemple d'Elise : nous écoutons, nous apprenons et nous développons, en étroite collaboration avec les utilisateurs, des produits et services qui facilitent la vie des personnes souffrant de troubles physiques intimes.

Le service clients Coloplast est une équipe de professionnels à votre écoute pour toute question sur nos produits, commandes et envoi d'échantillons.

Tél. 01 56 63 18 00 de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h

Soins des stomies
Urologie & Continence
Soins des plaies

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 1946E - Octobre 2014



Laboratoires Coloplast
Les Jardins du Golf
6, rue de Rome
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. : 01 56 63 17 00
Fax : 01 56 63 18 07