

Conseils d'utilisation


AVANT TOUTE MANIPULATION se laver les mains à l'eau et au savon. Nettoyer soigneusement le pénis à l'eau et au savon. Normalement une toilette quotidienne est suffisante. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

SpeediCath Compact Homme

Sondes compactes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi



1 Tenir la sonde verticalement en maintenant la partie avec le bouchon vers le haut. Dévisser en tournant les deux parties en direction opposée.

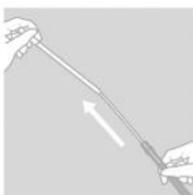

2 Tenir le connecteur blanc et sortez la sonde. Vous pourrez sentir une légère résistance en sortant la sonde.



3 Après utilisation, vous pouvez remettre la sonde dans son emballage. Une fois dedans, elle ne pourra pas être réutilisée.

SpeediCath Compact Set

Sets de sondage compacts, hydrophiles autolubrifiés prêts à l'emploi




1 Dévisser le capuchon et le retirer.




2 Déplier la poche.



3 Retirer la sonde en la dévissant.

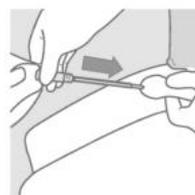

4 Redresser le pénis d'une main pour étendre le canal de l'urètre. Insérer la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler.

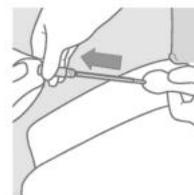

5 Lorsque l'urine cesse de couler, ressortir la sonde d'environ 1 à 2 cm. Si l'urine recommence à couler, attendre qu'elle s'arrête. Puis tirer à nouveau sur la sonde pour la sortir de 1 à 2 cm. Lorsque la vessie est vide, retirer la sonde.



6 Refermer la sonde en la revissant à son tube.



7 Ouvrir la poche à urine en déchirant la partie prédécoupée du set.




8 Vider la poche dans les toilettes.

SpeediCath Flex


Sondes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi




1 Ouvrir l'emballage et sortir la sonde. Tenir les deux poignées turquoises et ouvrir la sonde en dévissant dans le sens indiqué par la flèche.

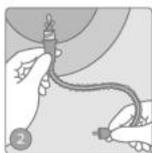

2 Vider l'eau présente dans la gaine par le connecteur dans les toilettes ou dans un lavabo avant de réaliser le sondage. Il est également possible de connecter une poche à urine ; dans ce cas, l'eau s'écoulera directement dans la poche.

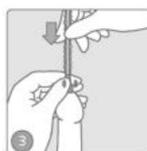

3 Saisir la poignée turquoise où se trouve l'extrémité de la sonde et insérer la sonde dans le méat urinaire. Puis à l'aide de la gaine, poursuivre l'insertion tout le long de l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler.

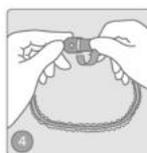

4 Après utilisation, refermer la sonde en revissant les deux poignées turquoises. La sonde peut alors être replacée dans son emballage refermable pour une élimination en toute discrétion.

Il est conseillé au patient de s'adresser à son professionnel de santé en cas d'infection urinaire s'accompagnant de symptômes tels que fièvre, gêne au moment de vider la vessie, envies fréquentes d'uriner ou sang dans les urines. L'autosondage ne doit être pratiqué que sous avis médical et sur prescription d'un médecin ou d'un infirmier. Respecter toujours les instructions des professionnels de santé. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

Produits stériles à usage unique. Ne pas résteriliser. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité. • Sérum physiologique stérile.



Une question ? Besoin d'aide ?

sur l'utilisation des sondes SpeediCath, veuillez contacter Coloplast :

Toute l'équipe du **Service Relations Utilisateurs** est à votre écoute du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

☎ par téléphone au : **0 800 01 58 68** Service & appel gratuits puis tapez 1


✉ par e-mail à : contact.france@coloplast.com

Conseils d'utilisation

AVANT TOUTE MANIPULATION se laver les mains à l'eau et au savon. Nettoyer soigneusement le méat urinaire à l'eau et au savon. Normalement une toilette quotidienne est suffisante. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

SpeediCath Compact Eve

Sondes compactes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi, de forme triangulaire pour une manipulation facilitée

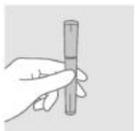

1 Tenir la sonde verticalement de sorte que la poignée de préhension (extrémité la plus large) soit orientée vers le haut.



2 Dévisser en tournant les deux parties en direction opposée. Tirer la poignée jusqu'à sentir une résistance. Continuer à tirer délicatement jusqu'à ouverture complète de la sonde.



3 Pour s'assurer que la sonde est bien ouverte, vérifier que le corps de la sonde est totalement sorti.



4 Insérer délicatement la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler.



5 La sonde peut être refermée hermétiquement après usage pour un transport facilité ou une élimination plus pratique.

SpeediCath Compact Set

Sets de sondage compacts, hydrophiles autolubrifiés prêt à l'emploi



1 Dévisser le capuchon et le retirer.



2 Déplier la poche.



3 Retirer la sonde en la dévissant.



4 Insérer la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler.




5 Lorsque l'urine cesse de couler, ressortir la sonde d'environ 1 à 2 cm. Si l'urine recommence à couler, attendre qu'elle s'arrête. Lorsque la vessie est vide, retirer la sonde.



6 Refermer la sonde en la revissant à son tube.




7 Ouvrir la poche à urine en déchirant la partie pré-découpée du set.

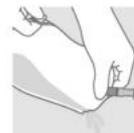

8 Vider la poche dans les toilettes.

SpeediCath Compact et SpeediCath Compact plus

Sondes compactes, hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi

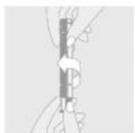

1 Tenir la sonde verticalement en maintenant la partie la plus fine vers le bas. Déchirer le film plastique en tournant les deux parties en direction opposée.



2 En maintenant toujours la sonde verticale, séparer les deux parties en tirant doucement (sinon risque d'éclaboussures) sur chacune d'elles jusqu'à voir apparaître les 2 ergots, puis libérer la sonde.



3 Insérer délicatement la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler. Une fois la vessie vidée, ressortir doucement la sonde et la jeter. Vider la poche en abaissant la partie grise du robinet de vidange.

Il est conseillé au patient de s'adresser à son professionnel de santé en cas d'infection urinaire s'accompagnant de symptômes tels que fièvre, gêne au moment de vidanger la vessie, envies fréquentes d'uriner ou sang dans les urines. L'autosondage ne doit être pratiqué que sous avis médical et sur prescription d'un médecin ou d'un infirmier. Respecter toujours les instructions des professionnels de santé. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.



Une question ? Besoin d'aide ?

sur l'utilisation des sondes SpeediCath, veuillez contacter Coloplast :

Toute l'équipe du **Service Relations Utilisateurs** est à votre écoute du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

☎ par téléphone au : **0 800 01 58 68** Service & appel gratuits puis tapez 1

✉ par e-mail à : contact.france@coloplast.com