



<i>Description générale</i>	Brosse en plastique (PP) avec poils blancs plus une rangée poils noirs pour le nettoyage en profondeur des mains. Non stérile.	
<i>Stérilisation</i>	Oui	Oxyde d'éthylène et chimique. Pas à air chaud ou gamma
<i>Autoclavable</i>	Oui	Sous sachet environ 200 fois à 121° C pour 15 mn ; 126° C pour 10 mn ; 134° C pour 3 min
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec une solution n'attaquant pas le PP , au détergent.
<i>Substance(s) impropre(s)</i>	Produit attaquant le PP comme l'acétone Benzène Chloroforme.	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Base en polypropylène MA-410 (PP T = 135°C) vert et poils en Nylon 6.12 transparent (T = 165°C) + 6.6 noir (T = 201°C)	
<i>Etiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Non	
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre (brosses empilables)
<i>Durée d'utilisation</i>	Moyenne – cycle de 200 autoclavages environ.	
<i>Références + extensions</i>	16 200 20	
<i>Désignation</i>	Brosse autoclavable	
<i>Dimensions Lo x La x H (mm)+- 3mm</i>	110 x 40 x 40	
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	31	
<i>Couleurs</i>	Socle = vert , poils = transparents et noirs	
<i>Résistance température (°C)</i>	Max = +135° Min = -10	
<i>Utilisation</i>	Article permettant le nettoyage des mains et des ongles par brossage avec un produit nettoyant et/ou désinfectant.	
<i>Mode d'emploi</i>	Prendre une brosse et la passer sous l'eau propre en rajoutant un produit nettoyage et/ou désinfectant, brosser la zone à nettoyer/désinfecter selon les recommandations ou les besoins. <u>Brosser sous les ongles par l'intermédiaires de la rangée noire, plus dure.</u>	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	En cas de stérilisation, vérifier que les poils ne soient pas compressées par le sachet de stérilisation ou tout autre objet car les poils se plieront et ne pourront pas être redressés.	
<i>Latex/ Antistatique</i>	Non/Non	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non	
<i>Phtalates/PVC</i>	Non/Non	
<i>RoHs</i>	NA	