

<i>Description générale</i>	Permet de couper ou de broyer un comprimé	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo,
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Oui	A l'oxyde d'éthylène
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	A l'eau + nettoyant ménager.
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le plastique	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Plastique PVC	
<i>Standard fabrication</i>	S.O.	
<i>Étiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Non	
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références</i>	16 200 59	
<i>Désignation</i>	Couper/broyeur de comprimés	
<i>diamètre x hauteur (mm)</i>	41 x 65	
<i>Résistance température (C°)</i>	-40 à 95°C	
<i>Poids net (g)</i>	46	
<i>Couleurs</i>	Blanc opaque	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de couper ou de broyer les comprimés pour une ingestion plus facile	
<i>Mode d'emploi</i>	Placer le comprimé dans la partie triangulaire du dessus et refermer le couvercle pour couper le comprimé. Placer le comprimé dans la partie basse et revisser la partie basse afin de broyer le comprimé.	
<i>Précaution d'emploi</i>		
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans des bacs à déchets médicaux.	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	