



**SACHET DE 5 ATTELLES. DIM. : 13 X 230 MM**

## Description

Les attelles alu-mousse sont légères et stables.

Pour immobilisation du poignet ou des doigts.

Attelles en aluminium sur une face, l'autre est recouverte d'une mousse.

Matières : aluminium AlMg3 et mousse de polyuréthane sur une base de polyester.

Grande absorption.

Utilisables sur plaie ouverte comme support de produits.

Hypoallergéniques.

Très malléables.

Grand choix de dimensions.

Non stérile.

Dispositif médical de classe I.

Usage unique.

## Mode d'emploi

Choisir une attelle adaptée selon le membre blessé et la longueur nécessaire.

Positionner l'attelle du côté mousse directement sur la peau en la pliant sur la zone à immobiliser.

Utiliser du sparadrap pour maintenir l'attelle alu-mousse.

Usage unique.

L'attelle doit être propre avant de l'utiliser.