

Attelles Aluminium

Des attelles extrêmement simples à utiliser pour une **immobilisation temporaire des membres** (poignet et doigts : en cas d'entorse ou de fracture).

Les attelles sont en **aluminium** pour conserver la rigidité nécessaire avec un côté en **mousse** pour préserver le confort du patient.

Utilisation: après avoir choisi la largeur appropriée au membre concerné, il suffit de couper l'attelle à la bonne longueur (à l'aide de ciseaux). L'attelle se place en « sandwich » avec le côté mousse sur la peau et se fixe à l'aide de sparadrap. S'assurer au préalable que l'attelle est propre et sèche et ne présente pas de bords pointus.

Attelles alu / mousse à usage unique en non stérile.

Elles doivent être propres et sèches lors de leur emploi.

Conditionnées par 5 attelles.

Mousse de Polyuréthane sur une base de Polyester.

Caractéristiques des Attelles Aluminium

Dimensions (Largeur x Longueur et Poids):

- 13 mm x 230 mm Poids 9 grammes.
- 20 mm x 450 mm Poids 27 grammes.
- 25 mm x 450 mm Poids 32 grammes.
- 50 mm x 400 mm Poids 58 grammes.
- 80 mm x 400 mm Poids 90 grammes.
- 100 mm x 400 mm Poids 115 grammes.