



## Attelles de type Grenouille

### Attelles de doigt alu / mousse de type Grenouille - Grand modèle

**Des attelles de type « Grenouille » extrêmement simples à utiliser pour immobiliser temporairement des doigts.**

Les attelles sont préformées, en aluminium capitonné de mousse pour associer la rigidité nécessaire et le confort du patient.

**Utilisation** : après avoir choisi une attelle de longueur adaptée au doigt concerné, il suffit de la placer en «sandwich» sur le doigt, puis de rabattre les côtés mousses sur la peau et sur la partie à immobiliser. Fixer ensuite l'attelle en place à l'aide d'un sparadrap pour en assurer le maintien.

#### **Attelles alu / mousse à usage unique en non stérile.**

Elles doivent être propres et sèches lors de leur emploi.

Vendues à l'unité.

Fabriquées en mousse de Polyuréthane sur une base de Polyester.

Matière hypoallergique.

Epaisseur de l'aluminium : 1,05 mm - Mousse : 7 mm

Tableau des tailles (du bout du doigt jusqu'au pli palmaire) :

Existe en trois tailles : S / M / L :

S : 6 cm env.

M : 7,5 cm env.

L : 8,5 cm env.