


POIRE ENEMA

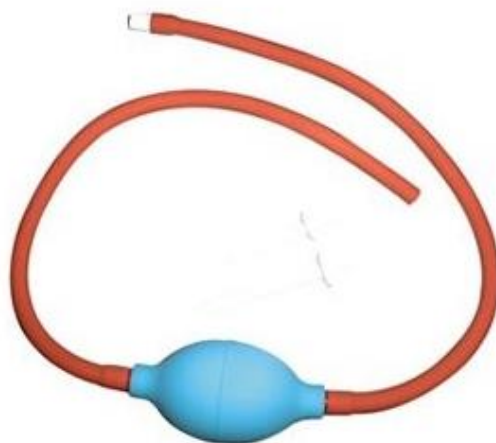

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Cette poire ENEMA ORL est une poire à lavement qui permet le lavement par liquide de l'oreille ou du nez. Cette poire en PVC est fournie avec 2 canules (une petite 46mm & une grande 70mm). La poire Enema OrL est un matériel médical non invasif et non chirurgical.

CARACTERISTIQUES :

Poire à 2 valves

Poire en PVC plastifié sans cadmium bleu ;

Tuyau en PVC plastifié sans cadmium orange ;

Canules et valves en polyéthylène de couleur blanche.

Contenance 65 ml

Destinée aux professionnels du milieu médical, particulièrement ORL

Matière plastique : Elastomère

Tubulure : 85 cm

Sans DEHP et sans LATEX

Dispositif médical de classe I marqué CE

Conditionnement : 1 poire sous sachet

MODE D'EMPLOI :

Avant tout utilisation, bien vérifier la propreté des embouts des canules pour éviter tout risque d'obstruction par le cérumen.

1. Préparer une solution liquide dans un récipient ouvert
2. Introduire la valve anti-retour dans le liquide
3. Choisir la canule appropriée et la fixer sur l'autre tuyau
4. Pomper le liquide par l'intermédiaire de la poire : attention ne pas rentrer la canule entièrement dans l'orifice.
5. Désinfecter les canules après utilisation

Attention, ce dispositif médical ne doit être utilisé que par une personne compétente et qualifiée.