



Poire à lavement effilée

La poire à lavement effilée permet le lavement par liquide de l'oreille ou du nez.

MODE D'EMPLOI :

- Prendre la poire effilée et pomper un liquide.
- Puis introduire la pointe effilée, dans l'oreille ou le nez, et vaporisez.
- Nettoyez après chaque usage.

PRECAUTION D'EMPLOI :

- Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée.
- Ne pas rentrer la pointe entièrement dans l'orifice.
- Bien nettoyer après usage.
- Ne doit pas être utilisé pour plusieurs personnes en même temps.
- Risque de contaminations si pas ou mal nettoyé après un usage uni-personnel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Dispositif usage unique : Mono patient pendant l'utilisation
- Matières : Ethylène polyrisé
- Couleur : Bleu
- Nettoyage : Avec une solution n'attaquant pas le PE ou détergent
- Poids : 20 gr
- Capacité : 75 mL