

## DOIGTIER ROULE EN LATEX

Le **doigtier roulé en latex** est utile lors de certains examens nécessitant la protection du doigt.

Fabriqués en **latex 100% naturel et biodégradable**, ils sont à utiliser seulement pour les orifices naturels. Attention toutefois à la composition qui peut provoquer de possible réaction cutanée en cas d'allergie au latex.

**Non stériles** et à **usage unique**, ils sont à jeter après chaque utilisation. Notez qu'ils sont légèrement **poudrés** et **non antistatiques**.

Ils s'adaptent à toutes les morphologies grâce au **large choix de taille disponible**.

Choisissez bien la taille qui vous correspond, ne prenez pas une taille trop petite afin d'éviter de déchirer malencontreusement le produit.

### Mode d'emploi

Déroulez le doigtier directement sur le doigt.

Enfilez-le du côté légèrement poudré.

Une fois utilisé, enrroulez à nouveau depuis la base.

Jetez le doigtier à la poubelle.

### Précautions d'emploi

Évitez d'avoir les ongles trop longs ou pointus sous peine de déchirer le doigtier.

Réutiliser le produit peut engendrer un risque de contamination.

N'utilisez pas celui-ci sur des plaies ouvertes.

### Caractéristiques techniques

**Composition** : Latex / Caoutchouc 100% naturel / Sans huile / Sans silicone

**Unités par sachet** : 100 doigtiers

**Longueur** : 7 cm

**Largeur taille S** : 2,4 cm

**Largeur taille M** : 2,8 cm

**Largeur taille L** : 3 cm

**Largeur taille XL** : 3,5 cm

**Épaisseur** : 0,09 mm

**Température d'utilisation** : -10°C à +40°C