



Description

- Pince Adson au choix avec ou sans griffes.
- Cette pince est utilisée en chirurgie pour les dissections et les chirurgies des structures délicates.
- Adaptée pour des actes médicaux nécessitant une grande précision.
- Permet de manipuler des compresses, des tampons ou des fils de suture.
- Grâce à la finesse de son mors et à ses pinces larges, la pince à disséquer Adson garantit une bonne préhension.
- Apporte au chirurgien précision et finesse d'exécution.
- Longueur de 12 cm, idéale pour une bonne manipulation et une préhension confortable.
- La pince à disséquer Adson est atraumatique pour les tissus.
- A la fois robuste et délicate.
- La pince Adson avec griffes est privilégiée pour saisir des petits éléments durs et résistants sans les endommager et lors de la pose de sutures ou d'agrafes cutanées. On l'utilise sur des tissus plus épais.
- Le modèle sans griffe est préféré pour les tissus plus délicats.
- Pince ergonomique avec rainures, pour une bonne prise en main.
- Stérilisable par autoclave.
- Pince à disséquer Adson vendue en sachet individuel.
- Avant utilisation, stériliser cette pince Adson par autoclave à 134°C pendant 18 minutes.

Mode d'emploi

- Ne pas utiliser de produit attaquant l'acier inoxydable lors du nettoyage de l'instrument. Préférer un détergent doux de type Steranios.
- Bien désinfecter et stériliser la pince Adson après usage.
- À conserver dans un endroit propre et sec.
- Résistance température : -40°C à +95°C.