



STYLO ANTI-DOULEUR PAINGONE PLUS



Le stylo Paingone Plus a été conçu pour soulager les douleurs chroniques rapidement, facilement et sans médicaments.

C'est un dispositif médical enregistré de classe IIA, testé cliniquement et recommandé par des experts médicaux.

Paingone Plus utilise la thérapie de l'électrostimulation (TENS).

En effet, lorsque vous appuyez sur le bouton, une impulsion électrique minime est produite, stimulant le cerveau à envoyer de l'endorphine (l'anti-douleur secrété naturellement) vers la zone de douleur.

Il est conçu pour soulager les douleurs du dos, du genou et du cou.

Celui-ci convient aussi pour les personnes souffrant d'arthrose.

Paingone Plus peut être utilisé à tout moment, aussi souvent que vous voulez.

Son utilisation est sans danger et sans aucun effet secondaire.

Il comporte aucun fils permettant ainsi de l'emporter facilement dans votre poche ou votre sac.

Facile d'utilisation, il suffit de placer le stylo Paingone Plus sur la zone de douleur et maintenir le bouton enfoncé pendant 30 secondes.

Vous pouvez également l'utiliser à travers des vêtements légers.



UTILISATION



Choisir la zone

Choisissez la zone à cibler. Posez la pointe du dispositif directement sur cette zone. Vous pouvez appliquer Paingone sur la peau, mais vous pouvez également l'utiliser à travers les vêtements.



Activation de Paingone

Paingone est actionné à la main. Cliquez 30 à 40 fois sur le dispositif pour l'appliquer. Ceci prend environ 1 minute. Pour Paingone Plus, la version automatique, il suffit de maintenir le bouton appuyé 30 secondes.



Zones plus étendues

Si vous souhaitez couvrir une zone plus étendue, il suffit de déplacer Paingone autour lorsque vous cliquez dessus.



Répéter

Appliquer Paingone sur des zones supplémentaires en répétant les étapes ci-dessus. La plupart des utilisateurs pensent qu'1 à 5 applications par jour suffisent.

CONTRE-INDICATIONS

Personnes portant un pacemaker ou défibrillateur interne

Personnes souffrant d'épilepsie

Femmes enceintes

Enfants