

Paingone Aegis|Soulage les douleurs du dos

PG- PAINGONE AGS



Description :

Depuis environ 20 ans, Paingone aide des personnes souffrant de douleurs avec les différents produits cliniquement prouvés. Paingone est la marque en laquelle vous pouvez avoir confiance pour soulager vos douleurs rapidement, efficacement et sans médicament. Tous nos produits répondent aux normes internationales les plus récentes, garantissant que le produit que vous utilisez offre le meilleur en matière de sécurité, qualité et efficacité.

Aegis, est la dernière innovation de Paingone spécifique pour soulager les douleurs du dos. Son électrode de taille XXL (24cm de large) est doté de 16 intensités réglables et une télécommande pour un confort d'utilisation. De plus Aegis s'éteint automatiquement après 15 minutes et est rechargeable via micro-USB !

Ici les étapes de fonctionnement :

- . Fixez les gel pads à l'appareil Aegis
- . Fixer le groupe d'alimentation à l'unité principale
- . Appliquez Aegis à l'endroit douloureux – Avant toute utilisation, assurez-vous que votre peau soit propre et sèche
- . Appuyez sur le bouton « ON » de l'appareil et ensuite de la télécommande pour allumer l'appareil
- . Adapter l'intensité

Avec plus de 1,9 million d'utilisateurs dans le monde, le succès de Paingone parle de lui-même. Plus de 90% des personnes qui essayent Paingone choisissent de continuer à l'utiliser, un taux de réussite écrasant.

Caractéristiques:

- Appareil médical : de classe 2a, prouvé cliniquement
- Sans médicament : l'appareil émet des impulsions électriques qui stimulent le cerveau afin qu'il produise de l'endorphine, un antidouleur sécrété naturellement par le corps humain.
- Dos : spécialement conçu pour les douleurs du dos
- Télécommande : qui l'accompagne vous donne un contrôle total, donc, où que vous soyez, le soulagement n'est qu'à quelques minutes.
- Soulagement rapide et efficace
- Discret et léger : 82 gr, Aegis se porte sous les vêtements en toute discrétion
- Intensité réglable : 16 niveaux d'intensités
- Batterie rechargeable : réutilisable et pratique, tout en restant compact et léger
- La boîte contient : appareil Aegis + un câble de charge USB + 3 paires de gel pads + un étui de rangement + un miroir + instructions complètes
- Contre-indications : personnes souffrant d'une inflammation purulente, d'un empoisonnement sanguin aigu ou d'une hyperthermie continue & personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou cérébrovasculaires aiguës

Pays d'origine:

Autres informations:

Chine

Garantie: 2 ans (hors accessoires)

Code CNK: 4193579

Code ACL:

Barcode:

5060035704286

Intrastat code:

90189075

Conditionnement	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Quantité contenue	Code-barres
Pièce	2.8	26.0	14.0	0.1	1	5060035704286
Cart-in	12.0	26.5	15.0	1.319	4	25060035704280
Cart-out	29.5	59.0	33.0	14.2	40	15060035704283