



[Fiche technique]

Ceinture pelvienne Sam Sling

Réf. 303100 - 303200 - 303300

La ceinture pelvienne Sam Sling permet de stabiliser et réduire les fractures du bassin en toute sécurité et efficacement. Ne possédant pas de pièces détachables, elle permet une utilisation facile en seulement 3 gestes, ce qui demande moins d'une minute. Sa boucle « auto-stop » se bloque lorsque la traction nécessaire autour du bassin est atteinte (en fonction de la morphologie du patient) et maintient une compression stable.

Caractéristiques techniques

Descriptif technique	Produit radio-transparent et adapté pour les IRM.
	Nettoyage avec un détergeant standard ou une solution antimicrobienne. Ne pas stériliser à la vapeur (autoclave).
	Arrière offrant peu d'adhérence, ce qui permet de faciliter les transferts.
	Vérifier qu'il n'y a aucun objet dans les poches ou au niveau du bassin de la victime.
	Ne pas utiliser la ceinture sur un enfant.
Normes et Certification	Ne pas placer la ceinture sur une victime non extraite d'un véhicule.
	Dispositif médical de classe 1

Références

Réf. 303100	Ceinture pelvienne Sam Sling standard 81-127cm
Réf. 303200	Ceinture pelvienne Sam Sling XL 91-137 cm
Réf. 303300	Ceinture pelvienne Sam Sling XS 69-114 cm