

MANUEL D'UTILISATION

Garrot tourniquet Tactique Sof Tactical Réf. 303333 - 303444

Conçu pour arrêter un saignement important (hémorragie).

Utilisation du garrot :

- Tendre la sangle.
- Tourner la poignée de torsion jusqu'à ce que l'hémorragie soit contrôlée.
- Verrouiller la poignée à l'aide de l'anneau. Il n'est pas nécessaire de verrouiller les deux extrémités de la poignée.
- Serrer la vis de sûreté.
- Rechercher immédiatement une aide médicale.

Stockage :

- Stocker le garrot dans sa poche avec la sangle de 1 pouce passée dans la boucle rapide et la vis de sûreté légèrement desserrée.
- La boucle est traitée anti rouille mais il est recommandé de huiler occasionnellement la vis de sûreté.