

Référence : 304119

Valise Segments coupés complète

Nécessaire de transport pour les segments coupés

CONTENU

- 1 sac isothermique 25 x 32 cm
- 4 pochettes de froid.
- 1 pansement absorbant 10 x 20 cm Zetuvit
- 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m.
- 4 blisters de 2 compresses stériles. 7,5 x 7,5 cm 40 g
- 2 paires de gants vinyle stériles 8/9
- 2 paires de gants latex stériles.8/9
- 2 champs stériles Foliodrap 75 x 75 cm.
- 1 notice d'utilisation.

MODE D'UTILISATION

- Mettre les gants latex stériles.
- Stopper les petits saignements à l'aide du pansement américain, ou les saignements importants à l'aide du pansement compressif.
Dans les deux cas, éviter la formation de garrot.
- Prévenir l'état de choc chez le blessé en l'allongeant et en le couvrant.
- Protéger le moignon à l'aide des compresses ou d'un linge propre.
- Envelopper le segment coupé à l'aide du champ stérile (ne pas faire obstacle au froid par des surépaisseurs de tissu).
- Placer le segment dans le compartiment central du sac isothermique.
- Percuter les pochettes de froid en les pressant fortement et les disposer dans les compartiments latéraux du sac isothermique, en nombre suivant :
 - 1 ou 2 doigts, orteils, oreilles, etc... : 2 pochettes
 - Main, pied ou écrasement de membre : 4 pochettes
- Mesurer la température suivant les indications ci-après et la réguler en ajoutant des compresses entre les pochettes de froid.

DUREE D'UTILISATION

- La température obtenue doit être comprise entre 15° et 0°, mais jamais inférieure pour ne pas provoquer de gelures.
- Le matériel ci-joint, utilisé selon les recommandations permet de maintenir la température préconisée, 3 heures avec 2 pochettes en service et 4 heures avec 4 pochettes.
- Cette autonomie est suffisante pour tout transport d'une durée normale mais dans des conditions spéciales il sera peut-être nécessaire de changer les pochettes de froid.

RECOMMANDATIONS

- Le sac à segments peut être stérilisé.
- **NE JAMAIS UTILISER D'ANTISEPTIQUE OU AUTRES PRODUITS SUR LES TISSUS TRAUMATISES.**
- **NE JAMAIS FAIRE BOIRE OU MANGER LE BLESSE.**
- Agiter les pochettes de froid après les avoir percutées, pour accélérer la réaction chimique.