

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

- Hallux Valgus
- Indications post-opératoires ou post-traumatiques du pied et des doigts de pied

CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

La chaussure post-opératoire Podalux II offre la possibilité de moduler la rigidité de la semelle. Si le protocole post-opératoire nécessite une rigidité réduite, retirer le renfort (cambriion) amovible de la chaussure.

- 1) Ouvrir les sangles de fermeture auto-agrippantes
 - 2) Pour retirer le renfort (cambriion) amovible, enlever la semelle intérieure, (fig 1) retirer le renfort (cambriion) (fig 2) amovible, puis replacer la semelle intérieure (fig 3).
 - 3) Placer le pied dans la chaussure.
 - 4) Fermer les sangles de fermeture auto-agrippantes en commençant par la sangle distale, puis en fermant la sangle proximale (fig 4).
 - 5) Tester la chaussure en marchant sur une courte distance, puis réajuster le serrage des sangles de fermeture si nécessaire.
- Si les sangles de fermeture s'avèrent être trop courtes, ou leur maintien insuffisant, utiliser la patte auto-agrippante amovible pour sécuriser la fermeture de la chaussure. Apposer la patte de fermeture sur le dessus de la chaussure et la fixer à l'aide des rebords auto-agrippants.
 - La chaussure est également livrée avec une demi-chaussette pour protéger l'avant-pied.
 - Ne pas accrocher les sangles de fermeture sur la demi-chaussette.

ENTRETIEN

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux et rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher en machine ou utiliser d'agent blanchissant.

COMPOSITION

- Tissu extérieur : polyester / polyamide
- Podalux II: polyuréthane et Polyamide
- Demi-chaussette: Acrylique et Elasthane



SANS LATEX

Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

1



2



3



4



DONJOY®