



**AIRCAST®**

# FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

## UTILISATION / INDICATIONS

Support et stabilisation de la cheville, prévention des risques d'inversion/eversion.

- Lésions ligamentaires (élongations, déchirures)
- Entorses de cheville modérées à sévères
- Usage prophylactique, préventif
- Usage post-opératoire
- Instabilités chroniques des ligaments de la cheville

### Remarque :

- Pour assurer un confort et un support maximum, porter une chaussette absorbante et une chaussure de sport à lacets lors du port de la chevillère.
- Prendre garde à ne pas endommager les vêtements en attachant / détachant les sangles velcro.

## CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application.

En cas de douleur, gonflements, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

Si vous souffrez des conditions suivantes, l'attelle ne doit être utilisée que sur recommandation d'un professionnel de santé :

- Troubles de drainage lymphatique
- Troubles circulatoires
- Troubles sensoriels
- Maladies ou irritations de la peau
- Plaies ouvertes
- Lymphoedème, oedèmes

## SYSTÈME À LACETS ATOP/MOZ

### Pour détendre les lacets :

- Soulever la languette "PULL" du Système à Lacets ATOP/MOZ et détendre les lacets.

### Pour fermer et serrer les lacets :

- Appuyer sur la languette "PULL" du Système à Lacets ATOP/MOZ.
- Tourner le Système à Lacets ATOP/MOZ dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.
- Le Système à Lacets ATOP/MOZ doit être en position fermée durant l'utilisation de l'attelle.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Détacher les sangles et ouvrir la chevillère.
- Glisser le pied dans la partie arrière de la chevillère. Tirer les coques latérales de la chevillère vers le haut et les aligner le long de la cheville (Fig. 0).
- Fermer les sangles dans l'ordre de numérotation :
  1. Tirer la sangle supérieure à l'arrière du mollet et la fixer sur le côté externe de la chevillère sans trop serrer. Cela permet de positionner les coques latérales correctement. (Fig. 1).
  2. Tirer la sangle inférieure à l'arrière de la cheville et la fixer sur le côté externe de la chevillère sans trop serrer (Fig. 2).
  3. Serrer la chevillère en tournant le Système à Lacets ATOP/MOZ dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au niveau de maintien désiré (Fig. 3).

Remarque : Si la chevillère est trop serrée, soulever la languette "PULL" du Système à Lacets ATOP/MOZ, relâcher les lacets, refermer la languette puis réajuster le serrage. (Ne pas tourner le Système à Lacets ATOP/MOZ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer).

4. Tirer la sangle croisée avant à travers la boucle, bien la serrer et la fixer fermement sur l'avant de la chevillère (Fig. 4).

- Porter une chaussure à lacets ou une chaussure de sport.
- Pour ajuster le niveau de maintien, serrer ou desserrer le Système à Lacets ATOP/MOZ ou les sangles.

## ENTRETIEN

- Laver à la main à l'eau tiède (30 °C) à l'aide d'un détergent doux
- Laisser sécher à l'air libre (ne pas placer sur un radiateur ou une autre source de chaleur)
- Ne pas utiliser de javel ou de chlore, et ne pas repasser.

## COMPOSITION

Plastique, Silicone, PES (polyéthersulfone), Polyester, Polyamide, Elasthane, Comme naturel (Latex), Polyuréthane, Nylon



**MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES.**

(< 0.1% - PAS DE CONTACT DIRECT AVEC LA PEAU)

## RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

**GARANTIE** DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

**AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.**