



Fiche Technique

Référence : GAR 1501 TO



Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part

Photo non contractuelle

Garrot Tourniquet

Dimensions :

Dépliées : 95 x 4 cm

Pliées : 15 x 4 cm

Poids : 80 g

Descriptif :

Très simple d'utilisation, ce garrot tourniquet réutilisable, est un matériel d'urgence utilisé pour arrêter une hémorragie externe. Il est destiné à interrompre la circulation du sang dans un membre — membre supérieur (bras, avant-bras, main) ou membre inférieur (cuisse, jambe, pied).

Il peut être posé d'une seule main, être placé dans plusieurs positions, et utilisé dans toutes les conditions météorologiques.

Composition : Polyester & nylon

Emballage : Emballé individuellement avec notice d'utilisation

Indication d'utilisation :

- 1 : Appliquez le garrot à proximité de la zone de saignement et placez le membre blessé à travers la boucle.
- 2 : Tirez la bande très serrée et fixez-la sur elle-même.
- 3 : Collez la bande autour du membre.
- 4 : Tournez la tige jusqu'à ce que le saignement s'arrête.
- 5 : Placez la tige à l'intérieur du clip et verrouillez.
- 6 : Vérifiez l'état de saignement, appliquez un serrage supplémentaire à côté du garrot et réévaluez si le saignement persiste.
- 7 : Collez la bande sur la tige à l'intérieur du clip autour du membre.
- 8 : Sécurisez la tige et la bande avec la sangle, transportez réévaluez, & enregistrez le temps appliqué sur la sangle blanche si possible.

Avec Farmor, prenez le Reflex

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - info@reflex-premiers-secours.com

