

OMRON

Misuratore automatico di pressione arteriosa da braccio

M2+ (HEM-1788-LE)

M2 Essential (HEM-1788-E)

Italiano

Manuale di istruzioni N°1: Sicurezza e altre informazioni

Per informazioni sui simboli, consultare la sezione "Descrizione dei simboli".

Intelli
sense

UK
CA
089

CE 0197

A Display

B Pulsante (Memory)

C Pulsante (START/STOP)

D Pulsante BATTERIE

E Pressa per alimentatore CA (per l'alimentatore CA opzionale)

F Pressa per il tubo dell'aria

G Braccio del

H Attaccare del tubo dell'aria

I Tubo dell'aria

Introduzione

Grazie per aver acquistato il misuratore automatico di pressione arteriosa da braccio OMRON. Questo misuratore di pressione misura la pressione arteriale mediante il metodo oscillometrico. Ciò significa che questo misuratore misura la pressione del sangue attraverso l'arteria brachiale e converte la pressione in una misura digitale.

Istruzioni di sicurezza

Questo manuale di istruzioni fornisce all'utilizzatore informazioni importanti sul misuratore automatico di pressione arteriosa da braccio OMRON. Per garantire l'utilizzo sicuro e corretto di questo misuratore, LEGGERE e COMPRENDERE le presenti istruzioni nella loro interezza. **NON si comprendono le presenti istruzioni se il uomo ventuali domande, contattare il rivenditore o il distributore OMRON prima di utilizzare il misuratore. Per informazioni specifiche riguardo la propria pressione arteriosa, consultare il medico curante.**

Destinazione d'uso

Analisi preventiva

Questo dispositivo è un misuratore digitale destinato alla misurazione della pressione arteriale e della frequenza delle pulsazioni nei pazienti adulti. Il dispositivo rivela la presenza di battito cardiaco irregolare durante la misurazione e la indica con un simbolo insieme al risultato della stessa.

Sicurezza ai quali è destinato il prodotto

Popolazione di pazienti adulti

Utilizzatori ai quali è destinato il prodotto

Popolazione adulta (inclusi i pazienti stessi) in grado di comprendere le presenti istruzioni di istruzioni.

Altri pazienti

A pressione arteriosa dei pazienti può essere misurata in modo indipendente e non invasivo in ambiente domestico.

Modalità di utilizzo

Questo misuratore è destinato a utilizzare almeno da parte di più pazienti.

Limitazioni

La circonferenza del braccio del paziente deve essere compresa tra 7 e 42 cm.

Questo dispositivo viene utilizzato da individui sani, pazienti con ipertensione, pazienti affetti alla propria salute, in situazioni mediche generiche, per la misurazione della pressione arteriosa e della frequenza delle pulsazioni.

- NON smontare né tentare di riparare il misuratore o gli altri componenti. Questo può determinare risultati imprecisi.
- NON utilizzare in luoghi in cui sia presente umidità o in cui il misuratore non sia stato soggetto a schizzi d'acqua. Si rischia di danneggiare il misuratore.
- NON utilizzare il misuratore in un veicolo in movimento, ad esempio in automobile o in aereo.
- NON lasciar cadere né sottoporre il misuratore a urti violenti o a vibrazioni.
- NON usare il misuratore in luoghi con umidità eccessiva o insufficiente né a temperature troppo alte o basse. Fare riferimento alla sezione 4.
- Durante la misurazione, osservare il braccio per assicurarsi che il braccio non sia stato compresso o che non si sia verificata la circolazione del sangue.
- NON lasciare il misuratore contemporaneamente ad altri apparecchi elettrodomestici (EM). Ciò potrebbe determinare il funzionamento errato del dispositivo e può dare luogo a risultati imprecisi.
- Evitare di fare il bagno, non assumere bevande alcoliche o a base di caffeina, non fumare, non svolgere attività fisica né mangiare per almeno 30 minuti prima di eseguire una misurazione.
- Riposare per almeno 5 minuti prima di eseguire una misurazione.
- Togliere dal braccio eventuali indumenti eccessivamente aderenti o spessi quando si esegue la misurazione.
- Rimuovere fermi e NON parlare mentre si esegue la misurazione.
- Utilizzare il bracciale "SOLO" su persone con una circonferenza del braccio compresa nell'intervallo specificato al quale è destinato il bracciale.
- Assicurarsi che il misuratore si sia adattato alla temperatura ambiente prima di effettuare una misurazione. Se la misurazione viene eseguita dopo un cambiamento drastico di temperatura, rischia di ottenere un risultato impreciso. È consigliabile attendere per circa 2 ore che il misuratore si riscaldi o si raffreddi quando il misuratore deve essere utilizzato in un ambiente con una temperatura che rientra tra quelle specifiche nelle condizioni operative dopo essere stato conservato alla temperatura di conservazione massima o minima. Per ulteriori informazioni sull'intervallo di funzionamento e di conservazione/trasporto, fare riferimento alla sezione 4.
- NON usare il misuratore dopo il termine del periodo di durata operativa. Fare riferimento alla sezione 4.
- NON piegare eccessivamente il bracciale né il tubo dell'aria. NON piegare né attorcigliare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Si rischia di causare lesioni dovute all'interruzione e al flusso sanguigno.
- Per rimuovere l'attacco del tubo dell'aria, tirarlo afferendolo dall'attacco in plastica alla base del tubo e non dal tubo stesso.
- Utilizzare SOLO l'alimentatore CA, il bracciale, le batterie e gli accessori specificati per questo misuratore. L'uso di alimentatori o accessori non specificati può danneggiare il misuratore e causare

alteran la medición.		varie en función de las pilas y el manguito usados).
----------------------	--	--

incorrecto de los dispositivos y/o llevar a una lectura inexacta.