

## HydroClean® Advance

### Pansement irrigo-absorbant



Référence	Taille ou dimensions	Code EAN
609662	Rond : diamètre 4 cm	4052199242668
609664	Ovale : 4 x 8 cm	4052199242705
609666	Rond : diamètre 5,5 cm	4052199242743
609668	7,5 x 7,5 cm	4052199242200
609672	10 x 10 cm	4052199242330
609674	Ovale : 8 x 14 cm	4052199285146
609676	10 x 17 cm	4052199285177

### Produit

HydroClean® Advance est un pansement hydroactif constitué principalement d'un polyacrylate super absorbant (SAP) inclus dans des fibres de cellulose et activé (pré-humidifié) par la solution de Ringer. L'interface de contact avec la plaie est composée d'un tricot en polypropylène revêtu de bandes de silicone. L'interface de contact et les bandes de silicone empêchent l'adhérence au lit de la plaie. Sur la face opposée à la plaie, un film de polypropylène imperméable à l'eau, enduit d'un tissu de polypropylène hydrophobe, prévient tout dessèchement prématuré du coussinet. Cela permet d'humidifier le lit de la plaie jusqu'à trois jours, tandis que le film de polypropylène empêche également la surface extérieure du pansement de s'imprégner.

**Les pansements HydroClean® Advance sont conformes aux exigences de la LPPR.**

### Indications / Classification


HydroClean® Advance est indiqué pour le soin en milieu humide des plaies sèches, légèrement et modérément exsudatives, et en particulier des plaies dont la cicatrisation est entravée. Ce produit est particulièrement indiqué pour le traitement des plaies chroniques et dont la cicatrisation est difficile lors de la phase de détersion et de granulation.

Le pansement doit être utilisé par des professionnels de santé ou par des personnes formées par des professionnels de santé.

HydroClean® Advance est un dispositif médical de classe IIb (TUV-0123).

### Spécifications

#### Composition :

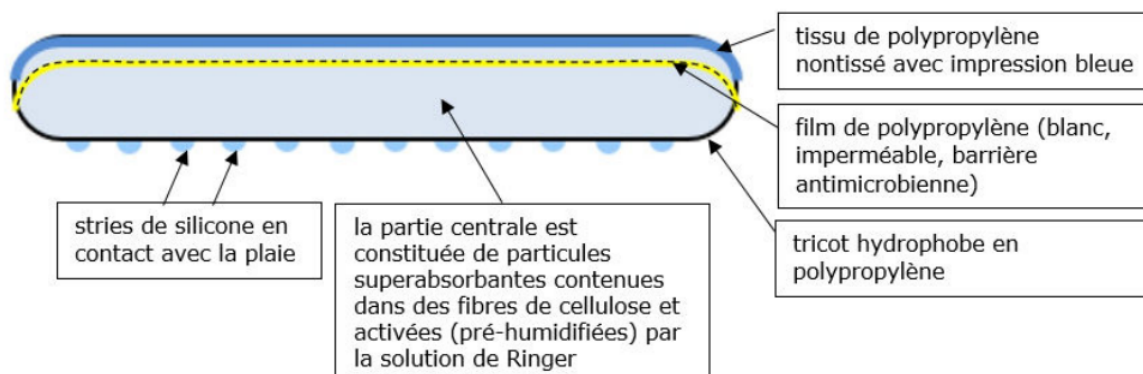

### Caractéristiques :

HydroClean® Advance libère la solution de Ringer dans la plaie jusqu'à trois jours. Pendant ce temps, l'irrigation interactive et continue de la plaie a lieu grâce au coussinet du pansement qui absorbe également l'exsudat de la plaie. Le SAP présent dans HydroClean® advance inactive les métalloprotéinases matricielles (MMP) qui altèrent la cicatrisation des plaies.

Remboursé LPPR.

Absence de latex\*  
Absence de phtalates\*  
Absence de colophane\*

\*(non ajouté intentionnellement).

## Présentation / Conditionnement/ Conditions de stockage

Présentation individuelle sous pochette pelable aluminium, puis en boîte.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
609662	Rond : diamètre 4 cm	1	10	6	180
609664	Ovale : 4 x 8 cm	1	10	6	189
609666	Rond : diamètre 5,5 cm	1	10	6	189
609668	7,5 x 7,5 cm	1	10	6	135
609672	10 x 10 cm	1	10	6	77
609674	Ovale : 8 x 14 cm	1	10	6	77
609676	10 x 17 cm	1	10	6	64

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton
609662	Rond : diamètre 4 cm	120 x 90 mm	127 x 92 x 50 mm	295 x 142 x 120 mm
609664	Ovale : 4 x 8 cm	145 x 100 mm	152 x 107 x 52 mm	240 x 175 x 180 mm
609666	Rond : diamètre 5,5 cm	105 x 150 mm	152 x 107 x 52 mm	240 x 175 x 180 mm
609668	7,5 x 7,5 cm	190 x 120 mm	197 x 127 x 57 mm	274 x 212 x 194 mm
609672	10 x 10 cm	205 x 155 mm	214 x 164 x 65 mm	511 x 235 x 160 mm
609674	Ovale : 8 x 14 cm	200 x 150 mm	214 x 164 x 65 mm	511 x 235 x 160 mm
609676	10 x 17 cm	242 x 100 mm	252 x 162 x 62 mm	339 x 262 x 205 mm

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité).

## Stérilisation

A la vapeur.

## Péremption

Durée de vie : 3 ans.

## Précautions d'emploi

Ne pas découper.  
Consulter la notice d'emploi.

## Contre-indications

Ne pas utiliser HydroClean® Advance sur des patients présentant une intolérance à l'un de ses composants.