

# Mode d'emploi de l'adaptateur universel pour smartphone HEINE DELTA 30 PRO, DELTA 30 et DELTAone.

Documentation dermatoscopique numérique à l'aide d'une caméra de smartphone.

## C'EST AUSSI SIMPLE !



Avec l'adaptateur universel pour smartphone HEINE, vous pouvez utiliser presque tous les smartphones, quel que soit le système d'exploitation (Android, Windows, etc.).

HEINE propose dans sa gamme de produits des coques de téléphone qui s'adaptent à de nombreux modèles d'iPhone\*, sur lesquels l'adaptateur est déjà fixé de manière permanente à la coque de téléphone HEINE. Vous pouvez trouver plus d'informations sur [www.heine.com](http://www.heine.com)



Vous avez besoin d'un DELTA 30 PRO, DELTA 30 ou DELTAone, d'un smartphone et de l'adaptateur approprié (pour DELTA 30 PRO, DELTA 30 ou DELTAone).



Tournez la vis à bascule pour ajuster le support de l'adaptateur à la largeur de votre smartphone. Placez le support approximativement au centre de l'arrière de votre smartphone et fixez-le à l'aide de la même vis à bascule.



Placez ensuite l'adaptateur devant l'appareil photo du smartphone : pour ce faire, desserrez la vis à bascule de l'adaptateur jusqu'à ce qu'il puisse pivoter facilement sur le côté et se déplacer d'avant en arrière.

Si votre smartphone ne possède qu'une seule caméra, fixez l'adaptateur au centre de cette caméra en serrant la vis à bascule au centre.

Si votre smartphone dispose de plusieurs caméras, déterminez d'abord laquelle des caméras est la caméra principale : Positionnez l'adaptateur de manière à ce que l'un des objectifs de la caméra de votre smartphone soit au centre. Le champ de vision sur l'écran est-il clair dans la vue de la caméra ? Si tout semble correct, fixez l'adaptateur sur cette caméra.



Presque fini!



L'aimant de l'adaptateur maintient désormais le smartphone en position sur la bague de mise au point du dermatoscope.

Vous pouvez désormais utiliser la fonction appareil photo de votre smartphone comme d'habitude pour prendre des photos.

Vous recherchez une solution de documentation numérique ?  
Vous trouverez des informations pertinentes sur :

[www.heine.com/en/digital-documentation-derm](http://www.heine.com/en/digital-documentation-derm)