



Barre d'appui 30, 45 , 60 cm


**SecurFix**

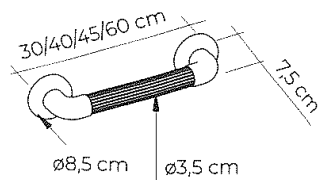


1

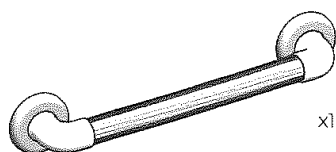


2

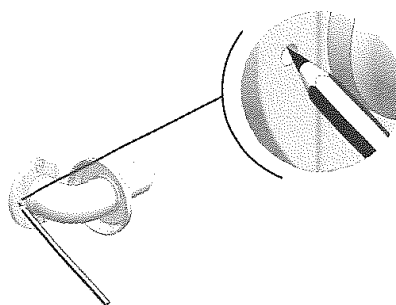


3

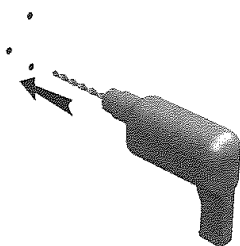

4

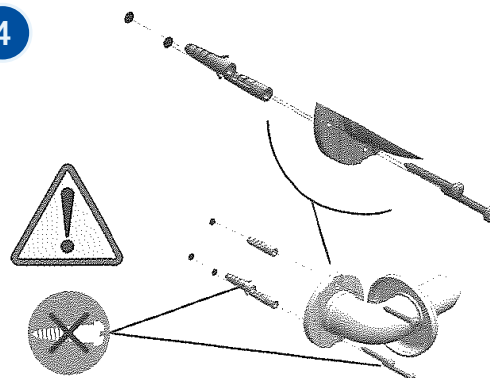


5

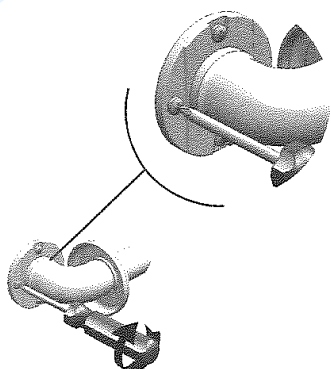

6



7

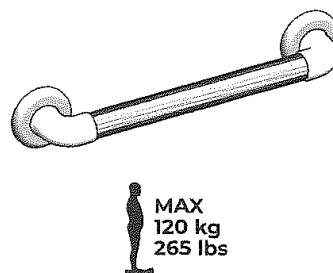

Barre d'appui 30, 45 , 60 cm

# SecurFix

---

## UTILISATION PRÉVUE

Les produits SecurFix permettent d'augmenter l'indépendance lors de la douche pour se lever ou s'asseoir sur la cuvette des toilettes ou dans la baignoire.

Ils offrent une prise ferme et stable grâce à laquelle l'utilisateur peut décharger une partie du poids porté par les jambes, réduisant ainsi la fatigue musculaire liée à la position debout, les risques de glissade et de blessure. Selon les besoins de l'utilisateur, ils peuvent être installés à différents endroits dans la salle de bains.

## INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

Les produits SecurFix sont destinés aux personnes âgées, aux utilisateurs de fauteuils roulants et à tous ceux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire lors de l'utilisation de la salle de bains et/ou des WC. L'utilisateur doit avoir une capacité suffisante pour saisir fermement la barre d'appui ainsi qu'une certaine autonomie.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INDICATIONS

- Ne pas dépasser la charge maximale indiquée dans les instructions de montage.
- Avant chaque utilisation, s'assurer que la barre d'appui est solidement fixée au mur.
- Lors de l'assemblage, suivre strictement ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Ne pas modifier la barre d'appui de quelque manière que ce soit.
- Ne pas utiliser la barre d'appui si elle est endommagée ou modifiée.
- Ne pas toucher la barre d'appui avec les mains grasses. Une surface glissante peut réduire la prise en main et causer une chute.
- Ne pas utiliser la barre d'appui à des fins autres que celles prévues.
- La barre d'appui ne doit pas être stockée à l'extérieur.
- Évitez le contact direct avec des plaies ouvertes ou une peau irritée pour prévenir l'infection.

## INFORMATIONS SUR L'ENTRETIEN

L'entretien du produit comprend des procédures de nettoyage et de désinfection. Afin de garantir une utilisation sûre et un niveau d'hygiène adéquat, l'utilisateur doit effectuer ces procédures avant chaque utilisation. L'utilisateur doit s'assurer de l'intégrité structurelle de l'appareil, de ses composants, et vérifier le serrage de vis.

Pour les procédures de nettoyage et de désinfection, suivez les étapes ci-dessous :

1. Portez des gants.
2. Éliminez les saletés visibles avant de procéder à la désinfection la plus précise.
3. Utilisez de l'eau ou un détergent non agressif pour la procédure de nettoyage.
4. Essuyez avec un chiffon sec et propre.

## EXIGENCES DE RÉUTILISATION

Le produit convient à une utilisation par d'autres utilisateurs.

## RECYCLAGE DU PRODUIT

Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Demandez à votre autorité locale la manière la plus respectueuse de l'environnement de le jeter.

## SIGNALEMENT DES INCIDENTS

En cas d'incident grave impliquant ce produit, contactez le fabricant et l'autorité responsable de ce votre pays.