



Installation
rapide



Aucun outils
requis



AquaFix

Barre d'appui à ventouses

30 cm / 40 cm

Réf: **HEXBV2530** / Réf: **HEXBV2540**

NOTICE

1. Choisissez une surface de montage lisse, plane et non poreuse, avec une zone complètement lisse d'un diamètre de 9,5 cm (3,5") pour chaque ventouse. Nettoyez la surface avec un chiffon humide, puis séchez soigneusement (voir figure 1).
2. Déverrouillez les leviers de succion en le tirant vers le haut et en les éloignant de la poignée (voir figure 2).

3. Appuyez fermement les ventouses contre la surface de montage, puis poussez les leviers vers le bas. Assurez-vous que l'indicateur de sécurité affiche entièrement la couleur verte (voir figure 3).

REMARQUE : Testez la force d'adhérence en tirant sur la poignée. Si celle-ci ne tient pas fermement, répétez les étapes 1 à 3 (voir figure 4).

4. Pour retirer :
Relevez les deux leviers et retirez la barre du mur (voir figure 2).
Utilisez les languettes des ventouses pour faciliter le retrait de la surface de montage (voir figure 5).

Figure 1 :

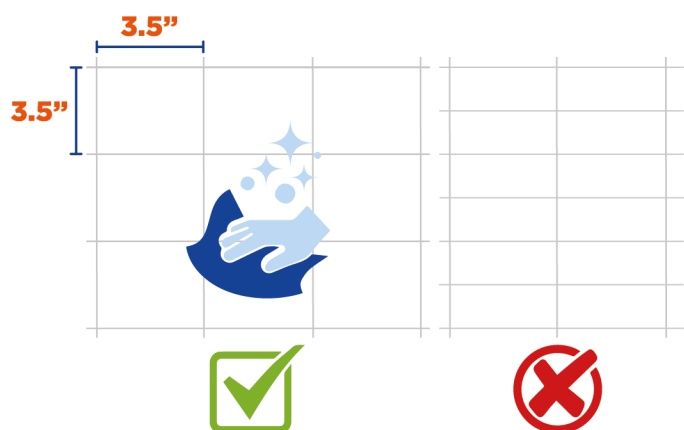


Figure 2 :



Figure 3 :

Indicateur de couleur de succion :
Vert : fixation sécurisée, prêt à l'emploi
Rouge : non fixé correctement au mur ou à la surface

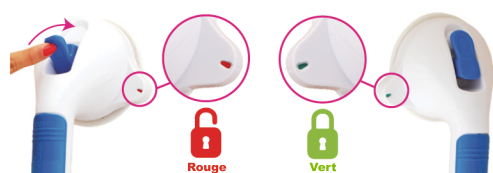


Figure 4 :



Figure 5 :

Languettes des ventouses



IMPORTANT : Avant toute utilisation, assurez-vous que la poignée est solidement fixée. Si la poignée est lâche, repositionnez-la et testez à nouveau. Toujours tester les ventouses sur la surface pour prévenir tout risque d'accident.