



AquaFix

Barre d'appui à ventouses

30 cm

Réf: **HEXBV25**


NOTICE

1. Vérifiez l'état des ventouses ainsi que la propreté et la compatibilité de la surface où la poignée sera fixée.
2. Nettoyez soigneusement la surface pour garantir une adhérence optimale.
3. Positionnez la poignée sur la surface et appliquez fermement les ventouses. Les leviers doivent être relevés, et les disques des ventouses doivent reposer complètement sur la surface.
4. Assurez-vous que les ventouses sont entièrement posées sur une surface pleine, comme un carrelage sans joints apparents ou une autre surface lisse. Les ventouses doivent être placées à environ 1,5 cm des joints pour une fixation correcte.
5. Appuyez sur le premier levier en vérifiant la résistance générée par la pression. Une résistance marquée doit être ressentie,

et la partie verte du témoin de sécurité doit être visible. Une forte résistance indique une fixation sécurisée.

6. Avant chaque utilisation, l'utilisateur ou un aidant doit vérifier que les ventouses sont correctement fixées et que la poignée est bien sécurisée. Si la poignée n'est pas solidement attachée, retirez-la complètement et répétez le processus de fixation conformément aux instructions.

Etape 1

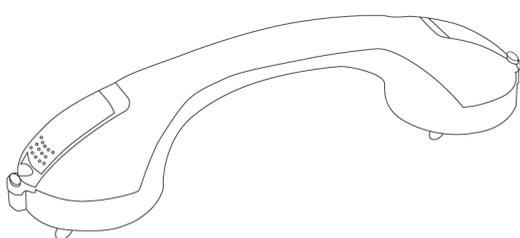


Surface plate




Surface irrégulière

Etape 2

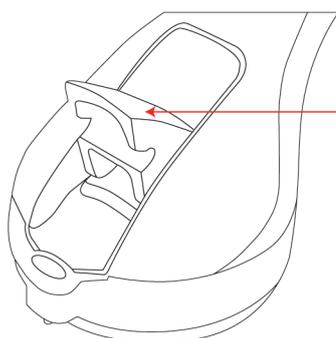

Etape 3

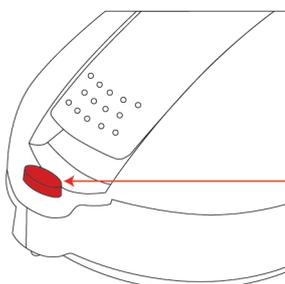

IMPORTANT : Avant toute utilisation, assurez-vous que la poignée est solidement fixée en vérifiant que le témoin de sécurité est sur le vert. Si la poignée est lâche, repositionnez-la et testez à nouveau. Toujours tester les ventouses sur la surface pour prévenir tout risque d'accident.