



AquaCurve


Siège de douche
avec découpe intime

Réf: **HEXCD25**

NOTICE

1. Avant la première utilisation, vérifiez que toutes les fixations sont bien vissées et que l'assise est réglée à la hauteur souhaitée. Assurez-vous que les cliquets de réglage de la hauteur des pieds sont correctement enclenchés (voir illustration ❶ au verso).
2. Pensez à contrôler régulièrement le serrage des vis ainsi que l'état d'usure des quatre embouts présents sur chaque pied.
3. Ne montez jamais debout sur la chaise et évitez de vous balancer lorsque vous êtes assis.
4. Utilisez et placez la chaise dans un intérieur ventilé à température ambiante. Une exposition prolongée à des températures extrêmes (très élevées ou très basses) pourrait entraîner une usure prématurée des embouts en caoutchouc.

Vérifiez le nombre de pièces


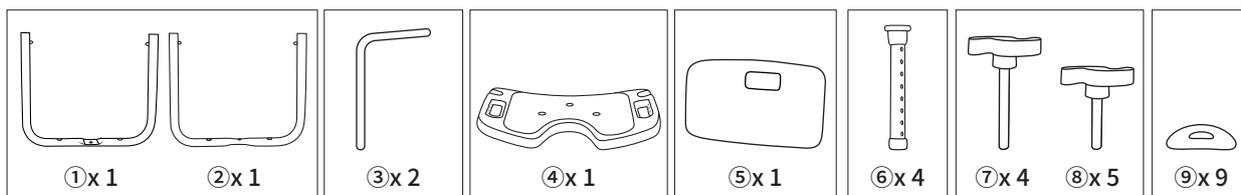


Etape 1

①x1 ②x1 ⑥x4

Etape 2

④x1 ⑧x1 ⑨x1

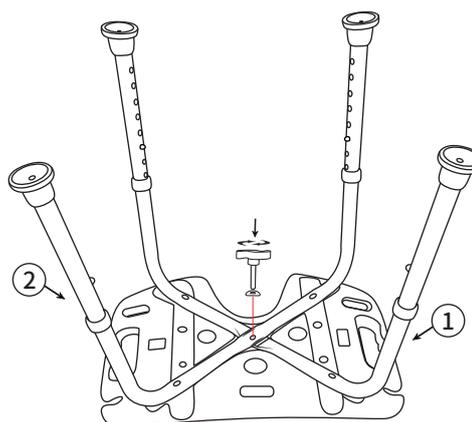
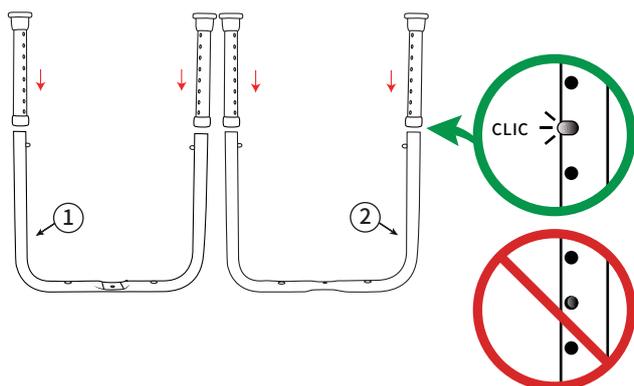


Etape 3

③x2 ⑦x4 ⑨x4

Etape 4

⑤x1 ⑧x4 ⑨x4

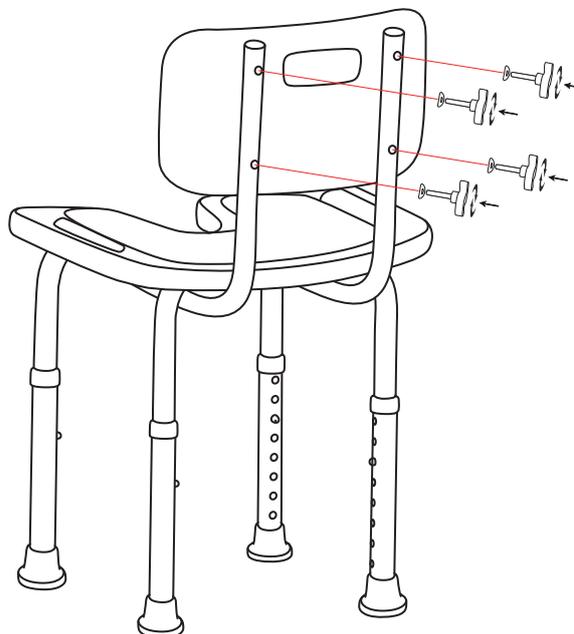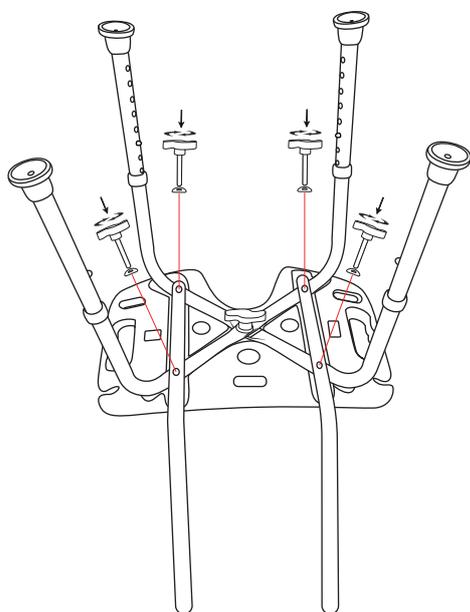

IMPORTANT : Vérifiez régulièrement le bon serrage des vis pour garantir une utilisation en toute sécurité. En cas de vis défectueuses, de jeu dans l'assise après montage ou de mauvais fonctionnement des cliquets de réglage de la hauteur, contactez votre revendeur (voir illustration ❶).