
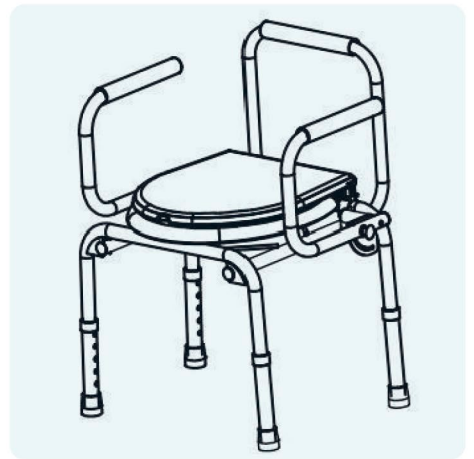
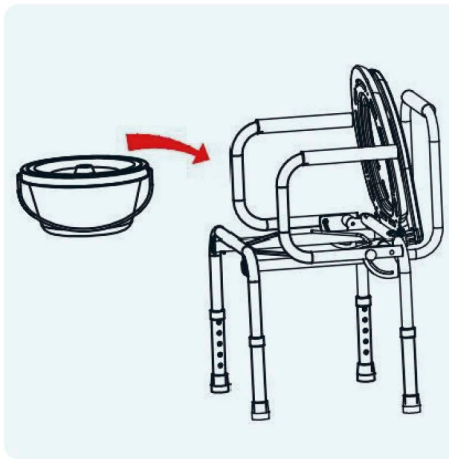


Chaise percée en acier avec accoudoirs

AquaWCEasy

INSTALLATION

1. Déballez le colis et insérez le tube du dossier dans le tube correspondant ; relevez les accoudoirs des deux côtés.
2. Soulevez la plaque de couverture et la plaque de siège. Puis placez le seau dans le siège en forme de V dans la direction de la flèche.
3. Abaissez la plaque de siège et réglez le tube à la hauteur appropriée.

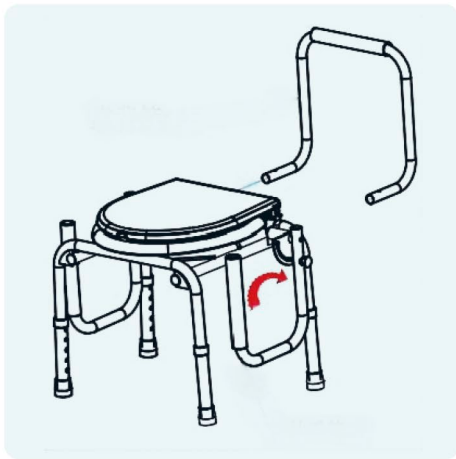

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

- Avant utilisation, vérifiez le serrage des vis et la stabilité du cadre ; ne dépassez pas le poids maximal autorisé (136 kg).
- Procédez à un nettoyage et à une désinfection régulièrement ; placez l'appareil dans un environnement sec et bien ventilé.

