

# Chaise garde robe avec coussin

## AquaConfort

---

Avant de commencer l'installation veuillez vérifier que les pièces suivantes sont complètes :

- 4 pieds de chaise
- 1 cadre d'assise
- 1 dossier
- 2 accoudoirs
- 1 coussin d'assise
- 1 seau

## INSTALLATION

### Pieds :

- Sortez le cadre d'assise et les 4 pieds de la chaise.
- Insérez les pieds dans les emplacements prévus et vissez-les.
- Réglez la hauteur de la chaise en faisant coulisser le système de réglage par clic.
- Assurez-vous que les pieds sont bien verticaux et que l'assise est parfaitement à niveau.

### Dossier :

- Repérez les trous de fixation du dossier à l'arrière du cadre de l'assise.
- Positionnez les fixations, puis enclenchez.

### Accoudoirs :

- Identifiez les emplacements de fixation des accoudoirs situés de chaque côté du cadre d'assise.
- Positionnez les accoudoirs, puis emboîtez.

**Pour retirer le dossier et les accoudoirs,  
pincez les 2 clips en plastique situés sous chacun des éléments.**

### Seau :

- Placez le seau sous l'assise en l'insérant par l'arrière, puis placez le coussin sur le dessus.

