


Movéo

Rollator 4 roues

COMPOSANTS


- ① Dossier
- ② Freins réglables (stationnement/marche)
- ③ Siège
- ④ Poignées réglables en hauteur
- ⑤ Roues avant pivotantes
- ⑥ Sac de courses
- ⑦ Porte-canne

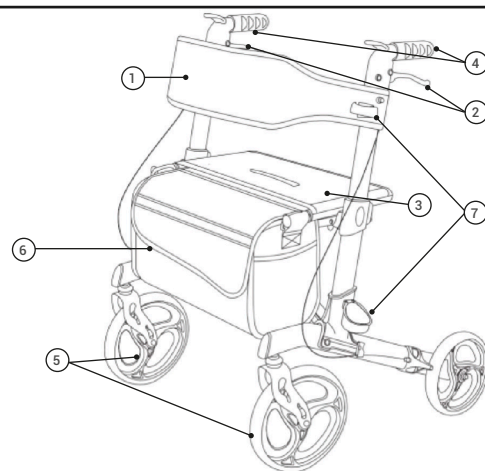

MONTAGE

Retirez tous les emballages. Le rollator est plié comme illustré.

- Fixation des roues avant : déployez le rollator et fixez-les à l'aide des molettes manuelles comme indiqué.
- Fixation des roues arrière : Déployez le rollator comme illustré et fixez-les à l'aide des molettes.
- Fixation du porte-canne.

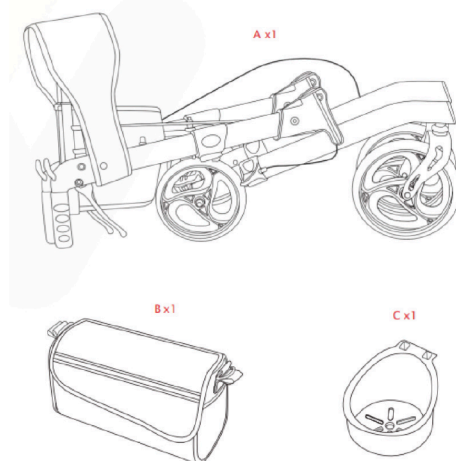

OUVERTURE DU ROLLATOR

Appuyez vers le bas sur les deux barres transversales de l'assise. Vous devez entendre un «clac» de chaque côté, indiquant que le rollator est correctement ouvert.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES POIGNÉES

Pour ajuster à la bonne hauteur, tenez-vous droit, bras le long du corps. Réglez la poignée pour qu'elle soit à la hauteur de votre poignet.

Une mauvaise hauteur peut nuire à votre posture :

- Trop basse : vous risquez de vous pencher en avant et de perdre l'équilibre.
- Trop haute : peut causer des tensions inutiles aux épaules.


Le bouton à ressort doit être positionné de manière symétrique des deux côtés.

PLIAGE DU ROLLATOR

Pour plier le rollator, tirez doucement sur la sangle située au centre du siège vers le haut.

RÉGLAGES DES FREINS : (À EFFECTUER DES 2 CÔTÉS DU ROLLATOR)

- Tournez la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension. (1)
- Verrouillez ensuite en tournant l'écrou de blocage dans le sens des aiguilles d'une montre tout en maintenant la vis. (2)

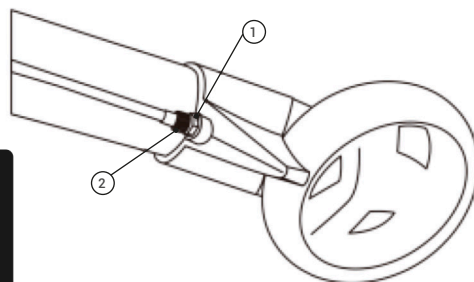

Diminuer la tension peut affecter le blocage du frein.

UTILISATION DU FREIN

- Tirez la poignée vers le haut pour ralentir.
- Freins «Parking» : Appuyez vers le bas pour verrouiller les roues arrière.
- Tirez à nouveau vers le haut pour déverrouiller.

Toujours appliquer le frein «Parking» en position verrouillée avant d'utiliser le siège. Testez le blocage en poussant légèrement le rollator.

AVANT CHAQUE UTILISATION

- Vérifiez la fixation des roues, poignées et molettes.
- Assurez-vous que les freins fonctionnent correctement. Si une pièce semble desserrée ou endommagée, contactez le revendeur.
- Les câbles de frein peuvent se détendre avec le temps. Faites-les vérifier régulièrement.

NETTOYAGE

- Utilisez un chiffon ou une éponge humide avec de l'eau savonneuse.
- Les nettoyeurs antibactériens domestiques sont autorisés.
- Évitez les tampons abrasifs, les grattoirs, les nettoyeurs fortement corrosifs qui pourraient abîmer la finition.
- Ne laissez aucun résidu sur les poignées ou le siège, cela peut les rendre glissants.

PRÉCAUTIONS

- Gardez le produit à l'abri de la pluie.
- Ne suspendez rien aux poignées, afin d'éviter un déséquilibre du rollator.
- Tenez le produit hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas les doigts dans les zones de rotation ou les clips du coussin de siège.

