


Mov'Go

Rollator 4 roues



COMPOSANTS

- ① Poignées
- ② Freins
- ③ Dispositif de pliage
- ④ Plateau en plastique (en option)
- ⑤ Panier
- ⑥ Siège
- ⑦ Filet en plastique
- ⑧ 4 roues

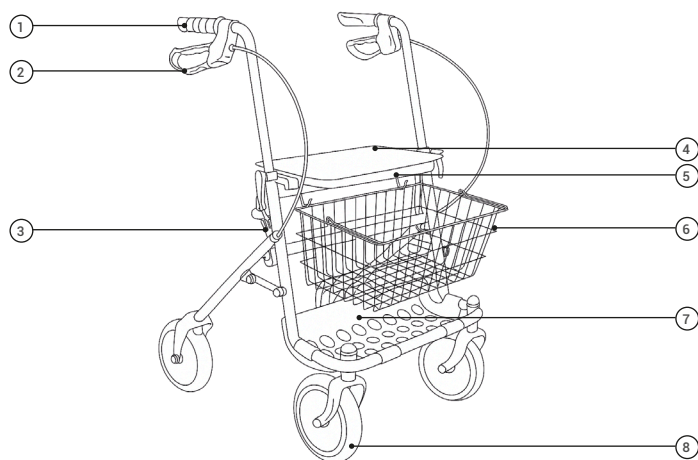


MONTAGE

- Déballiez votre produit et vérifiez si la livraison est complète.
- Insérez les poignées dans le cadre avant.
- Si nécessaire, ajustez les câbles reliés aux freins.
- Réglez les poignées à la hauteur souhaitée.

OUVERTURE DU ROLLATOR

- Poussez le levier situé sur le côté droit du cadre supérieur (1) vers le haut.
- Après avoir relâché le levier, poussez vers le bas le tube (2) situé sous le siège.

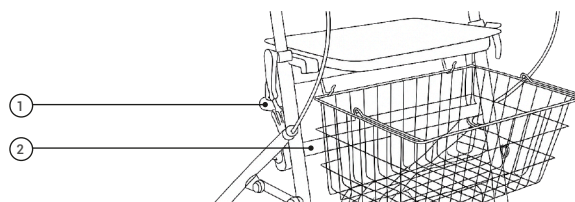


PLIAGE DU ROLLATOR

Pour déplier le déambulateur, répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES POIGNÉES

Le déambulateur peut être ajusté en hauteur en réglant les poignées :

- Déverrouillez / relâchez le levier (1) situé sur le côté.
- Faites coulisser la poignée (2) vers le haut ou vers le bas dans le tube du cadre (3) jusqu'à la hauteur souhaitée.
- Verrouillez à nouveau fermement la poignée.
- Répétez l'opération pour l'autre poignée. Assurez-vous que les deux poignées soient réglées à la même hauteur.

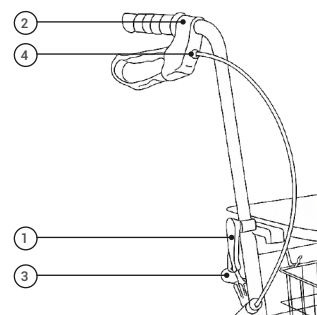


UTILISATION DU FREIN

Le déambulateur est équipé de freins actionnés par deux leviers.

Les leviers de frein fonctionnent selon deux modes : frein de marche et frein de stationnement.

- Pour utiliser les freins de marche, tirez simultanément les deux leviers de frein vers le haut [A] en effectuant un mouvement de pression. Pour arrêter le freinage, relâchez les leviers de frein.
- Pour utiliser les freins de stationnement, poussez simultanément les deux leviers de frein vers le bas en position verrouillée [B].

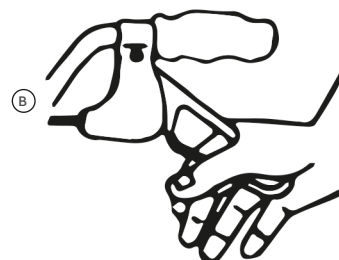

Risque d'endommagement

N'appuyez pas trop fort sur le déambulateur lors de l'utilisation des freins de marche.

Cela pourrait endommager les pneus ou les freins.

AVANT CHAQUE UTILISATION

- Assurez-vous que les deux leviers de frein sont en position de stationnement avant de vous asseoir.
- Gardez les freins activés jusqu'à ce que vous recommenciez à marcher.
- Gardez vos pieds entre les roues arrières.

NETTOYAGE

- Utilisez un chiffon doux et humide avec de l'eau tiède et un savon doux pour nettoyer le déambulateur.
- Évitez de l'immerger.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.

PRECAUTIONS

- Veillez à ce que le déambulateur soit stocké dans un endroit sec.
- Utilisez une protection ou un emballage suffisant pour éviter la rouille et l'infiltration de corps étrangers.
- Ne placez aucun objet sur ou contre le déambulateur, afin d'éviter tout dommage.
- Le panier de courses doit être monté à l'avant du déambulateur.
- Deux crochets permettent de fixer le panier au cadre du déambulateur.

