


Mov'Light

Rollator 4 roues

COMPOSANTS

- ① Poignées réglables
- ② Freins
- ③ Roues arrière
- ④ Roues avant pivotantes
- ⑤ Siège
- ⑥ Dossier
- ⑦ Sac
- ⑧ Porte canne
- ⑨ Barres latérales
- ⑩ Bouton poussoir

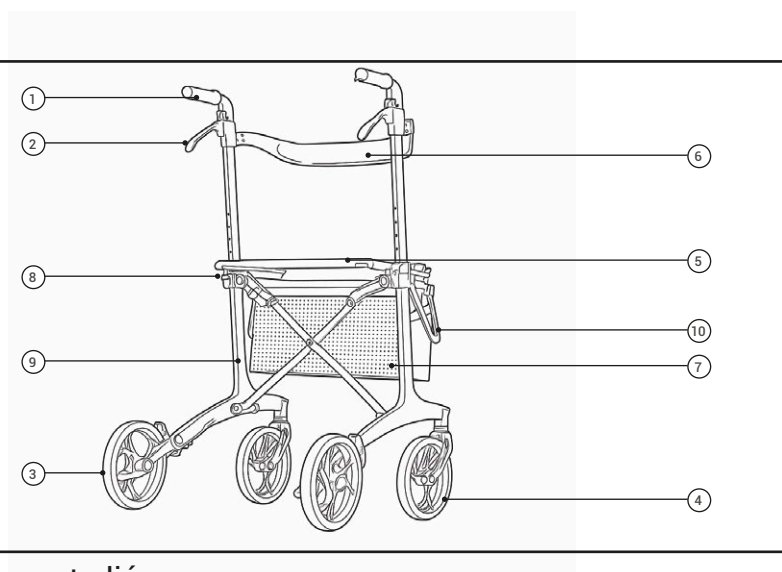


MONTAGE

- Retirez tous les emballages. Le rollator est plié.
- Fixez les roues.

OUVERTURE DU ROLLATOR

- Appuyez fermement sur les barres latérales de l'assise.

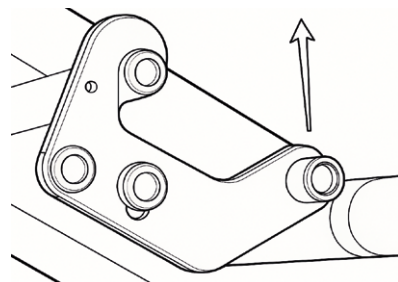

PLIAGE DU ROLLATOR

Pour plier le rollator, utilisez la sangle située au centre du siège (5) en la tirant doucement.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES POIGNÉES

Le déambulateur peut être ajusté en hauteur en réglant les poignées :

- Pour ajuster le rollator à la bonne hauteur, tenez-vous droit, les bras le long du corps. Les poignées doivent se trouver à la hauteur de vos poignets.
- Pour effectuer le réglage, appuyez sur les boutons-poussoirs de réglage situés de chaque côté de l'assise.
- Des graduations visibles vous aident à régler les deux côtés à la même hauteur, pour une posture équilibrée et sécurisée.

UTILISATION DU FREIN



Le déambulateur est équipé de freins actionnés par deux leviers.

Les leviers de frein fonctionnent selon deux modes : frein de marche et frein de stationnement.

- Pour utiliser les freins de marche, tirez les poignées pour ralentir (A).
- Pour utiliser les freins de stationnement, abaissez les poignées pour verrouiller, tirez les pour déverrouiller (B).



TOUJOURS APPLIQUER LE FREIN PARKING AVANT D'UTILISER LE SIÈGE.

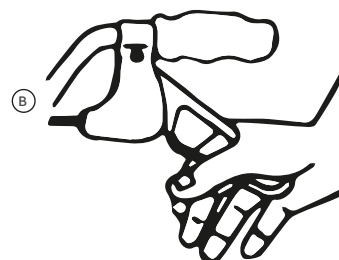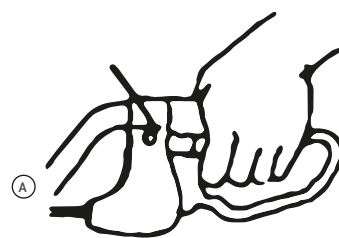

AVANT CHAQUE UTILISATION

- Vérifiez la fixation des roues, poignées et molettes.
- Assurez-vous que les freins fonctionnent correctement. Si une pièce semble desserrée ou endommagée, contactez le revendeur.
- Les câbles de frein peuvent se détendre avec le temps, faites les vérifier régulièrement.

NETTOYAGE

- Utilisez un chiffon sec pour la surface.
- Les nettoyeurs antibactériens domestiques sont autorisés.
- Evitez les tampons abrasifs, les grattoirs, les nettoyeurs fortement corrosifs qui pourraient abîmer les finitions.
- Ne laissez aucun résidu sur les poignées ou le siège, cela pourrait les rendre glissants.

PRECAUTIONS

- Après 6 mois d'utilisation, le rollator doit être vérifié pour la mobilité de chaque partie et voir si les boulons ne sont pas desserrés.
- De l'huile de lubrification doit être ajoutée au niveau des roues.
- Gardez le produit à l'abri de la pluie, dans un lieu propre et bien ventilé.
- Ne mettez pas les doigts dans les zones de rotation ou les clips du coussin de siège.

