

Planche de bain avec poignée

AquaPlanche - AquaPlanche XL

Les sièges de baignoire antidérapants sont fabriqués en PVC solide et antidérapant. Ils sont équipés d'une **poignée de sécurité** pour faciliter le transfert tout en assurant un **nettoyage en toute sécurité**.
Le siège comporte un **trou de drainage**.

INSTRUCTION D'INSTALLATION

1. Retirez tous les composants de la boîte et vérifiez qu'ils sont en bon état.
2. Placez la **poignée du bloc B** sur le **plateau A**. Serrez la **pièce C** par le dessous.
3. Utilisez les **pièces D** pour fixer les **pièces E** avec les **quatre pieds**.

AVERTISSEMENTS, INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Assurez-vous que le siège est parfaitement installé avant utilisation.
- Vérifiez que tous les composants sont correctement fixés.
- Assurez-vous d'un **usage approprié et d'une bonne stabilité**.
- Si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, contactez le service de vente.
- **Ne dépassez jamais la charge maximale spécifiée.**

