







## PedalFit+

Mini pédalier  
avec compteur électrique

HEXPP25

### Instructions de mise en fonctionnement :

- Sortez le Pedalfit+ de la boîte et manipulez-le avec précaution.
- Placez le Pedalfit+ sur une surface plane, puis fixez la vis A comme indiqué sur l'image. (Voir photo 1).
- Tournez la vis A pour ajuster la pression. (Tournez vers la gauche pour augmenter la pression, vers la droite pour la diminuer).
- Retirez le compteur numérique de la prise.
- A l'arrière de celui-ci soulevez les languettes et insérez une pile 1,5V AG13 côté positif vers le bas. (Voir photo 2).
- Remplacez le compteur numérique dans sa prise.
- Allumez le compteur : l'appareil est immédiatement opérationnel. (Voir photo).
- Après utilisation, tirez l'anneau (voir photo) vers l'intérieur et pliez correctement l'appareil comme illustré sur la photo.

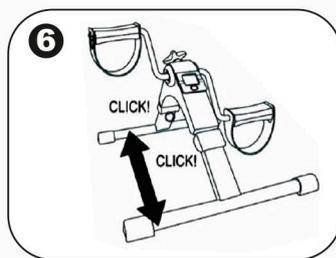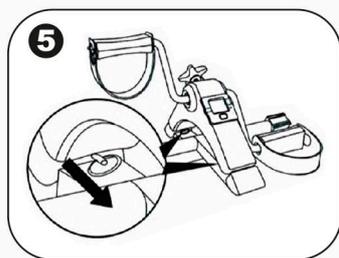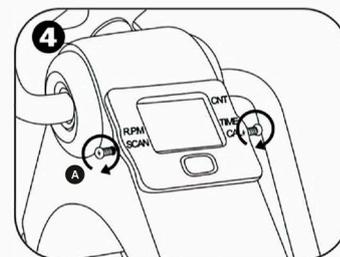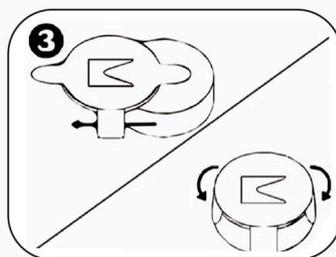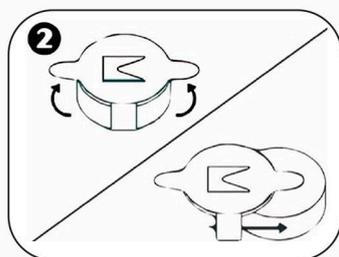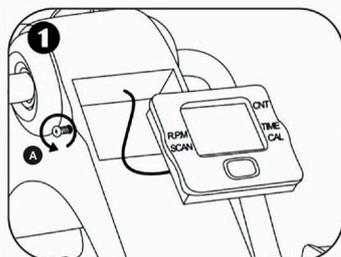

### Instructions d'utilisation :

#### Pour les membres inférieurs :

- Installez-vous sur une chaise stable, placez l'appareil à plat devant vous et adoptez une posture confortable.
- Ajustez la résistance à l'aide de la molette en fonction de vos besoins.
- Positionnez vos pieds sur les pédales et effectuez des mouvements avant ou arrière pour solliciter différents groupes musculaires.

Révision : 7 avril 2025



Distribué par Hexa Plus Santé  
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers  
66600 Rivesaltes - FRANCE  
(+33) 4 68 08 26 20



Yongkang Beiqin Industry and Trade Co., Ltd.  
18 Jintian Road, Wangxitian Natural  
Village, Longqqing Village, Xiangzhu Town,  
Yongkang City, Zhejiang Province, (CHINA)



SUNGO Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
2909VA Capelle aan den IJssel,  
The Netherlands



# PedalFit+

Mini pédalier  
avec compteur électrique

HEXPP25

## Pour les membres supérieurs :

- Placez l'appareil sur une table ou une surface plane.
- Réglez la résistance à l'aide de la molette avant de commencer.
- Asseyez-vous avec le dos droit et effectuez des mouvements contrôlés avec les bras pour cibler les muscles souhaités.

## Fonctionnalités du moniteur d'exercice :

### Mise en marche / arrêt automatique :

- Le système s'allume automatiquement lorsqu'un signal est détecté ou qu'une touche est pressée.
- Il s'éteint automatiquement après 4 minutes d'inactivité.

### Modes disponibles :

- **Temps (TIME)** : Affiche la durée totale de l'entraînement.
- **Compteur (COUNT)** : Indique le nombre total de répétitions effectuées.
- **Tours/minute (REPS/MIN)** : Mesure le nombre de tours par minute.
- **Calories (CALORIES)** : Affiche les calories brûlées pendant la session.

Pour sélectionner un mode, appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que l'indicateur pointe vers la fonction souhaitée. Pour réinitialiser toutes les valeurs, maintenez cette touche enfoncée pendant 4 secondes.

Si l'écran ne fonctionne pas correctement, retirez-le et réinitialisez-le.

## Spécifications techniques :

- Temps : 00 à 99 min 59 s.
- Compteur : 0 à 9999 répétitions.
- Tours/minute : 0 à 9999.
- Calories : 0 à 9999 Kcal.



Révision : 7 avril 2025



Distribué par Hexa Plus Santé  
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers  
66600 Rivesaltes - FRANCE  
(+33) 4 68 08 26 20



Yongkang Beiqin Industry and Trade Co., Ltd.  
18 Jintian Road, Wangxitian Natural  
Village, Longqing Village, Xiangzhu Town,  
Yongkang City, Zhejiang Province, (CHINA)



SUNGO Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
2909VA Capelle aan den IJssel,  
The Netherlands