

Réhausse WC en PU

AquaWCSoft

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce réhausse WC et les conserver pour références.

AVIS

Avis à l'utilisateur et/ou au patient : tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

INDICATIONS

Le réhausse WC est conçu pour faciliter l'assise sur les toilettes et ne doit pas être utilisé à d'autres fins. Il est recommandé aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas utiliser les toilettes par elles-mêmes.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser le réhausse WC comme une échelle, ne vous tenez pas dessus et ne laissez pas les enfants jouer avec.

MODE D'EMPLOI

Avant toute installation, vérifiez la bonne stabilité de la cuvette des toilettes.

MONTAGE

1. Retirez la lunette des toilettes avant la pose.
2. Positionnez le surélévateur en calant la partie avant contre celle du WC.
3. Serrez les deux pattes de fixation à l'aide des vis latérales.
4. Le traitement antiglisse des pattes assure une parfaite stabilité.

COMPOSITION

- **Enveloppe** : polychlorure de vinyle (PVC)
- **Intérieur** : mousse de polyuréthane injectée.

ENTRETIEN

- **Nettoyage** : eau savonneuse ou produits d'entretien courants.
- **Désinfection** : dilution chlorée ou aérosol désinfectant.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Ne pas immerger l'arrière de l'AquaWCSoft.
- Posez uniquement sur une surface plane.
- Ne pas laisser d'objet (désodorisant, etc...) sur la cuvette.
- Evitez tout contact avec des produits colorés.
- Ne pas monter sur le produit.
- Vérifiez régulièrement le serrage des pattes.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente un défaut ou une cassure.
- Tenir hors de portée des enfants.

