

Siège de bain pivotant

AquaPivot

UTILISATION

Aide au bain destiné à faciliter l'accès à la baignoire des personnes à mobilité réduite.
Poids max. : 120 kg.

INSTALLATION

1. Fixez le siège sur son axe et vissez la molette grise.
2. Posez le siège sur les rebords de la baignoire (au moins 5 cm d'appui de chaque côté).
3. Réglez les stabilisateurs latéraux jusqu'à ce que les embouts touchent les parois.
4. Vérifiez la stabilité et le bon état des embouts antidérapants.
5. Pour pivoter : levez le levier, orientez le siège, puis abaissez pour verrouiller.

ENTRETIEN

- Contrôlez régulièrement la solidité du siège, le levier de blocage et les embouts.
- Remplacez tout élément usé ou détérioré.
- Nettoyez à la main avec un détergent doux, sans solvants ni produits abrasifs.
- Température max. de nettoyage : 60°C.
- Stockez dans un endroit propre, sec et à l'abri de la chaleur.

SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser le siège s'il présente un défaut ou un dommage.
- Ne pas trop serrer les vis de réglage.
- Toujours **verrouiller la rotation** avant de s'asseoir ou de se relever.
- L'assise doit être sèche avant usage pour éviter tout glissement.
- Ne pas se tenir debout ni se balancer sur le siège.
- Placez les pieds sur une surface sèche avant de se relever.
- Attention à ne pas coincer les doigts dans la zone de rotation.

RESPONSABILITÉ

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de :

- non respect des consignes,
- montage ou utilisation incorrecte,
- modifications non autorisées ou pièces inadaptées.

